

ENTSCHEIDEND BESSER



# Seta pro

Das variable Krankenhausbett



# Inhalt

---

6 Modellvarianten

---

10 Seitensicherung

---

11 Leichte Bedienung

---

12 Haupt und Dekore

---

13 Liegeflächen und Bettverlängerung

---

14 Neue Details

---

15 Sichere Hygiene

---

16 Ausstattungen und Optionen, Technische Daten

---

18 Die Stieglmeyer-Gruppe

---



# Seta pro

## Das klassische Krankenhausbett für die Anforderungen von heute

Das Seta steht in vielen Krankenhäusern für Qualität, Langlebigkeit, leichte Bedienbarkeit und einen hohen Patientenkomfort. Dieses klassische Modell haben wir jetzt weiterentwickelt, um es noch besser auf die Anforderungen von heute und morgen vorzubereiten. Im Mittelpunkt stehen dabei eine sichere Hygiene und die Entlastung des Pflege- und Technikpersonals.

Das Seta pro zeichnet sich durch ein modernisiertes Untergestell mit geradliniger Gestaltung und ebenen Flächen aus. Sowohl mit der Hand als auch optional in einer Waschanlage lässt es sich ideal reinigen und desinfizieren. Da die Steuerung und der Akku nun leicht zugänglich unter der Rückenlehne platziert sind, können auch Wartungen und Inspektionen müheloser und schneller durchgeführt werden.

Sicherheit für die Patienten stand in der Seta-Serie schon immer im Mittelpunkt. Die stabile durchgehende Seitensicherung bleibt eine Stärke des Bettes. Die Führungen der Holme sind in die Häupter integriert und dadurch besonders wartungsarm und langlebig. Auf Wunsch ist das Bett auch ohne integrierte durchgehende Seitensicherungen lieferbar. Sollte sich die Pflegebedürftigkeit der Patienten ändern können die Seitensicherungsholme nachgerüstet werden. Insgesamt ist das Seta pro eine sichere Investition in die Zukunft, die das Arbeiten auf den Stationen erheblich angenehmer gestaltet.



### Seta pro Standard

Das Basis-Modell


- **Höhenverstellung:**  
32 bis zu 91 cm (variierend nach Rolle)
- **Das Bett für hohe Sicherheit:**
  - Liegefläche 90 x 200 cm
  - ergonomisch ideale Höhe für rücken-schonendes Arbeiten
  - hervorragende Hygiene-Eigenschaften



### Seta pro Varianten lino

Die schmalen Betten

- **Höhenverstellung:**  
32 bis zu 91 cm (variierend nach Rolle)
- **Ideal für begrenzte Räume:**
  - Liegefläche 80 x 200 cm oder 87 x 200 cm
  - Außenmaße nur 92,8 x 219,3 cm oder 99,8 x 219,3 cm für leichtes Fahren durch Türrahmen
  - präzises Manövrieren in kleinen Räumen oder Mehrbettzimmern

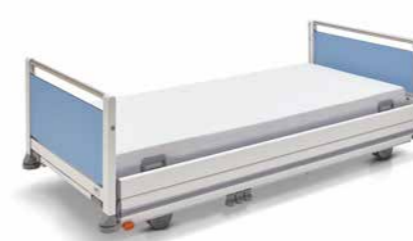

### Seta pro Variante brevo

Das niedrige Bett

- **Höhenverstellung:**  
28 bis 84 cm
- **Unterstützt die Sturzprophylaxe:**
  - Liegefläche 90 x 200 cm
  - bodennahe Tiefposition verringert das Risiko von Sturzverletzungen für die Patienten



### Seta pro Variante brevo lino

Das schmale, niedrige Bett

- **Höhenverstellung:**  
28 bis 84 cm
- **Liegefläche 87 x 200 cm**
  - kombiniert die schmalen Außenmaße und den tiefreichenden Verstellbereich der Modellvarianten brevo und lino




## Seta pro – Standard

### Das variable Krankenhausbett

Das Seta pro ist ein robustes Bett für Aufgaben in vielen Bereichen des Krankenhauses. Mit seinem Höhenverstellbereich von bis zu 91 cm ermöglicht es auch großen Pflegekräften ein ergonomisches Arbeiten. Die integrierte durchgehende Seitensicherung bietet sturzgefährdeten Patienten maximalen Schutz. Durch sein intelligentes Baukastensystem verschiedener Rollen, Liegeflächen und Zubehör wird das Seta pro überall zum maßgeschneiderten Wunschbett.

- hohe sichere Arbeitslast von 260 kg erfüllt auch die Bedürfnisse schwergewichtiger Patienten
- über den Handschalter einstellbare Sitzposition
- klassisch-elegante Optik

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

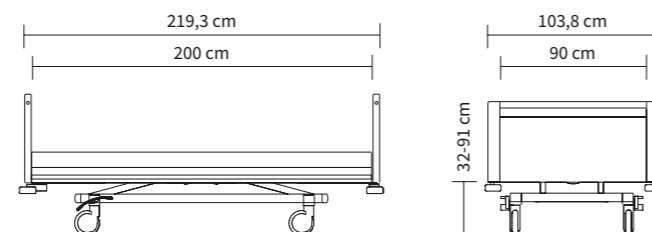


## Seta pro – Variante lino

### Das schmale Bett

Betten müssen im Krankenhaus oft schnell den Raum oder das Stockwerk wechseln. Das Manövrieren kann dabei zur Herausforderung werden: Mehrbettzimmer mit begrenzten Abmessungen oder schmale Korridore, in denen kaum zwei Betten aneinander vorbei geschoben werden können, belasten das Personal. Ein schmaleres Bett, das zugleich den Komfort des Patienten erhält, kann viele dieser Probleme lösen. Das Seta pro lino ist mit seiner Außenbreite von unter 100 cm eine ideale Wahl.

- Außenmaße von 92,8 x 219,3 cm oder 99,8 x 219,3 cm
- Liegefläche bietet mit 80 x 200 cm oder 87 x 200 cm hohen Komfort
- verschiedene wählbare Rollen und die optionale 5. Rolle ermöglichen punktgenaues Manövrieren in begrenzten Räumen

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

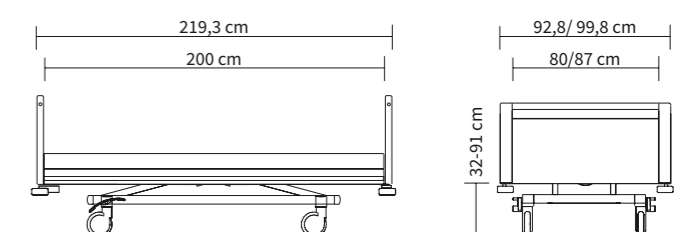





## Seta pro – Variante brevo

### Das niedrige Bett

Das Seta pro brevo lässt sich auf ein niedriges Maß von 28 cm hinabfahren. Aus dieser Höhe in Bodennähe droht sturzgefährdeten Patienten nur noch ein sehr geringes Verletzungsrisiko. Das Niedrigbett bietet optimalen Schutz auch ohne Einsatz der Seitensicherung.

- Niedrigbett mit großem Höhenverstellbereich von 28 bis 84 cm
- immer auf der optimalen Höhe für Sturzprophylaxe, sicheren Ein- und Ausstieg sowie rückenschonendes Arbeiten

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

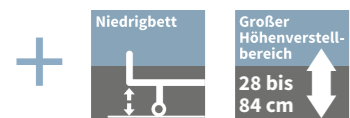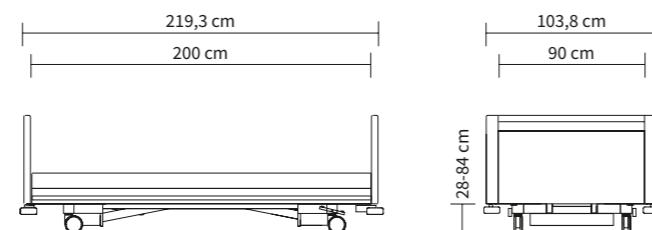


## Seta pro – Variante brevo lino

### Das schmale, niedrige Bett

In vielen Krankenhäusern sind zwei Trends zu beobachten: Die Zahl der Patienten bleibt auf einem hohen Niveau oder steigt, die durchschnittliche Verweildauer nimmt jedoch ab. Dieser schnellere Wechsel verlangt nach einer größeren Flexibilität, auch bei den Betten. Die Modellvariante brevo lino wird als schmales Niedrigbett diesem Anspruch gerecht. Sie ist schnell an jedem Einsatzort und erfüllt die unterschiedlichen Schutzbedürfnisse der Patienten.

- schmale Außenbreite von 99,8 cm kombiniert mit tief reichendem Verstellbereich von 28 bis 84 cm
- einfaches, präzises Manövrieren
- Sturzprophylaxe auch ohne Einsatz der Seitensicherung

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

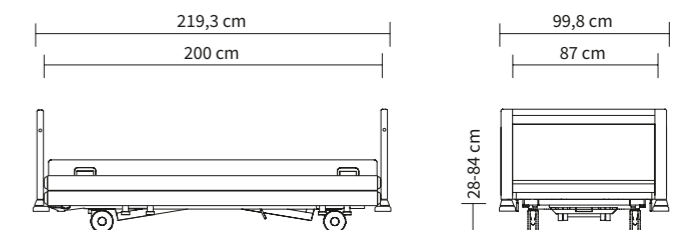



▲ Nur die Seta-pro-Betten bieten die Vorteile einer direkt in die Häupter integrierten durchgehenden Seitensicherung.

## Die Seitensicherung Schutz und Stabilität in jeder Situation

Die durchgehenden Seitensicherungen der Seta-pro-Modelle bieten sturzgefährdeten Patienten optimalen Schutz. Zugleich überzeugen sie durch einzigartige Stabilität und Langlebigkeit: Nur bei diesem Bett sind die Führungen der Holme direkt in Kopf- und Fußteil integriert. Sie bewegen sich leichtgängig, geräuscharm und benötigen im Gegensatz zu anderen Seitensicherungstypen keinen zusätzlichen Platz an den Bettseiten, wenn sie verstellt oder abgesenkt werden.

- bei Einsatz der Bettverlängerung sind die Holme serienmäßig ausziehbar
- große Schutzhöhe von 41 cm ermöglicht den Einsatz von Anti-Dekubitus-Matratzen
- glatte Oberflächen der Holme lassen sich leicht reinigen

▼ Bei Einsatz der Bettverlängerung lassen sich die Holme mit ausziehen.

▼ Die Pflegekraft kann die Seitensicherung mühelos per Knopfdruck auslösen.

▼ Durch die diagonale Anstellung der Holme genießen die Patienten eine bessere räumliche Orientierung.




## Leichte Bedienung Maßgeschneidert für alle Nutzergruppen

Das Seta pro lässt sich von Pflegekräften und Patienten intuitiv und sicher bedienen. Sowohl der serienmäßige Handschalter mit einfachen Piktogrammen als auch der moderne LCD-Handschalter mit nur 3 Tasten und großem Display bewähren sich selbst in angespannten Situationen. Weitere Bedien- und Verwaltungsfunktionen halten die Sperrbox oder das optionale Bedienmodul in der Bettzeugablage bereit.



▼ Mit der Sperrbox lassen sich einzelne Verstelloptionen gezielt sperren oder entsperren.

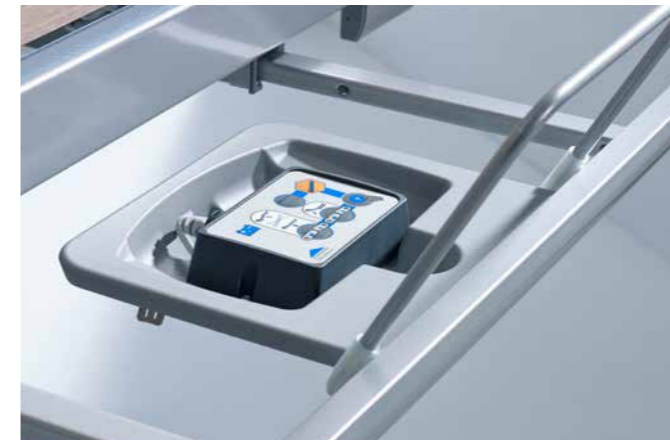

▲ Der optionale LCD-Handschalter bietet maßgeschneiderte Bedienebenen für Patienten, Pflegendende und Techniker.

◀ Der serienmäßige Handschalter steuert das Bett per Tastendruck mithilfe einfacher Piktogramme. Optional ist er auch mit Beleuchtung erhältlich.




▼ Das optionale Bedienmodul vereint alle Steuermöglichkeiten des Bettes auf einer großzügigen Fläche.




### ENTSCHEIDEND BESSER EasyCare entlastet Pflegekräfte

- Der LCD-Handschalter enthält **3 Bedienebenen** für Patienten, Pflegekräfte und technisches Personal.
- Pflegekräfte können bestimmte Verstellfunktionen **für den Patienten sperren und somit ausblenden**.
- Mit der Funktion **EasyCare** lassen sich diese Funktionen auf der Pflege-Ebene nutzen, ohne den Sperrstatus des Patienten zu ändern. Das spart der Pflegekraft viel Zeit und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

### Freigabe der Funktionen

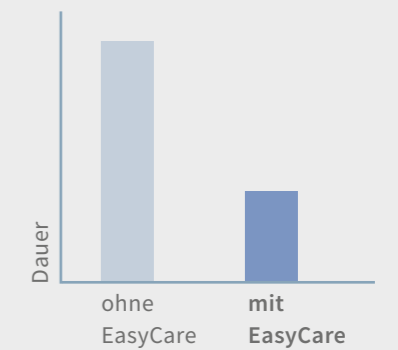

◀ Mit dem optionalen Fußschalter kann die Pflegekraft die Betthöhe auch dann verstellen, wenn sie keine Hand frei hat.

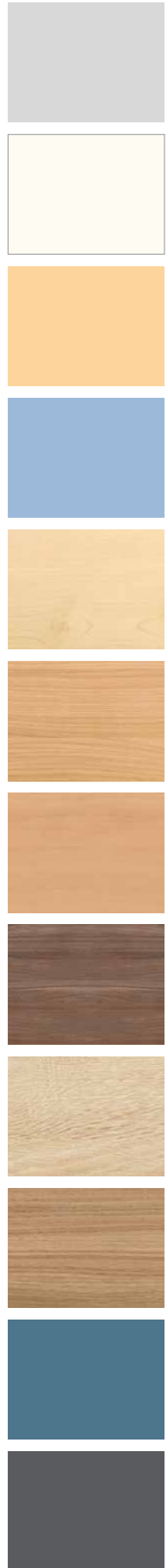

## Haupt und Dekore

### Elegant und praktisch

Alle Seta-pro-Betten sind serienmäßig mit unserem Hauptmodell „Base“ ausgestattet. Das elegante Haupt mit der praktischen Griffleiste bietet eine umfangreiche Farb- und Dekorauswahl zur individuellen Gestaltung des Bettes.

- einfache Entnahme der Füllbretter für schnellen Zugang zum Patienten
- Füllbretter als Reanimationsunterlage geeignet



▲ Um das Füllbrett zu entnehmen, muss zunächst die mit einem Schnappverschluss fixierte Griffleiste abgenommen werden.



▲ Danach kann das Füllbrett herausgezogen und in einem Notfall als Reanimationsunterlage verwendet werden.

▲ Das optisch ansprechende Base-Haupt fügt sich angenehm in jede Umgebung ein.

## Liegeflächen und Bettverlängerung

### Schlafkomfort und optimale Hygiene

Das Seta pro lässt sich in vielen Details individuell gestalten – das gilt auch für die 3 wählbaren Liegeflächen. Die Hygiene-Liegefläche aus Polypropylen besteht aus einzeln entnehmbaren Elementen, deren Form Wasser ableitet. Die Liegefläche aus Vollkunststoff setzt sich aus 4 flächigen HPL-Elementen zusammen, die sich auf Wunsch gegen Entnahme sichern lassen. Beide Modelle sorgen mithilfe von Aussparungen für eine gesunde Luftzirkulation. Als dritte Alternative eignet sich der stabile Stahlgitterboden hervorragend für die maschinelle Aufbereitung. Eine Bettverlängerung von 22,5 cm ist beim Seta pro ebenso Standard wie ausziehbare Seitensicherungsholme. Optional sind auch eine Verlängerung der Unterschenkellehne sowie ein passendes Polsterteil als Zubehör erhältlich.



▲ Hygiene-Liegefläche

▼ Stahlgitterboden

▼ HPL-Liegefläche



▲ Die integrierte Bettverlängerung des Seta pro lässt sich in wenigen Augenblicken ausziehen und bietet großen Patienten den benötigten Platz. Die Verlängerung der Unterschenkellehne und das Polsterteil sind als Zubehör erhältlich.



▲ Die optionale Verlängerung der Unterschenkellehne bewegt sich bei Verstellungen mit, sodass auch für große Patienten eine Beinhochlage möglich ist.



## Neue Details

### Fahrbarkeit und Wartungsfreundlichkeit

Das Seta pro wurde mit vielen innovativen Ideen weiterentwickelt, um den Arbeitsalltag und alle Aufgaben rund um Wartung und Inspektion zu erleichtern. Praktische Details entlasten die Mitarbeiter und sparen Zeit und Kosten.

- optionale 5. Rolle ermöglicht zusätzliche Stabilität bei Patiententransporten, egal ob die Pflegekraft das Bett vom Kopf- oder Fußende aus schiebt
- serienmäßige Wandabweisrollen und -kegel schützen das Bett vor Schäden durch Zusammenstöße oder bei der Höhenverstellung
- optionaler LCD-Handschalter ermöglicht Pflegekräften jederzeit vollen Zugriff auf das Bett mit der EasyCare-Funktion und bietet viele Hilfestellungen auf einer speziellen Techniker-Ebene
- Steuerung und Akku sind unter der Rückenlehne leicht zugänglich
- kopfseitig zwei innenliegende Aufnahmen für Aufrichter bzw. Infusionsständer
- fußseitig zwei Aufnahmen für Infusionsständer für eine Rundumversorgung der Patienten

▼ Elektronische Komponenten leicht zugänglich



▼ LCD-Handschalter mit einer Techniker-Ebene für eine leichte Fehleranalyse




▼ Wandabweiskegel



### ENTSCHEIDEND BESSER

#### Vorteile der 5. Rolle

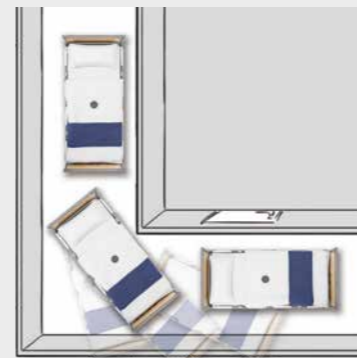

Wird das Bett mit einem Patienten schnell um die Kurve gesteuert, können hohe Zentrifugalkräfte entstehen. Die 5. Rolle als Spurrolle hält das Seta pro noch sicherer in der Spur und verhindert ein Wegrutschen zur Seite.

## Sichere Hygiene

### Beste Voraussetzungen für die manuelle oder automatische Aufbereitung



◀ Alle Teile der Konstruktion sind für eine gründliche Reinigung leicht zugänglich.



◀ Die verdeckte Kabelführung des Seta pro sorgt für ebene Oberflächen.

**10 x mehr waschbar als die Normanforderung**

Die herausragenden Hygiene-Eigenschaften der Seta-Serie wurden beim Seta pro noch weiter verbessert. Große, ebene Oberflächen und eine verdeckte Kabelführung erleichtern bereits die manuelle Reinigung und Desinfektion erheblich. Noch mehr Vorteile bieten die optionalen maschinenwaschbaren Modellvarianten:

- sichere Hygiene für einen effektiven Schutz vor multi-resistenten Krankheitserregern
- hoher Standard IPX6W schützt die Elektrokomponenten vor Feuchtigkeit
- Entlastung des Personals durch den Entfall der manuellen Aufbereitung
- Stieglmeyer-Service entwickelt auf Wunsch gemeinsam mit Ihnen ein optimales Aufbereitungskonzept für Ihr Haus



# Ausstattungen und Optionen

Seta pro	Standard	Variante lino 80 cm	Variante lino 87 cm	Variante brevo	Variante brevo lino
<b>Liegeflächenhöhen</b>					
Verstellbereich Standard	✓	✓	✓	-	-
tiefenverstellbar	-	-	-	✓	✓
<b>Bettbreiten außen</b>					
103,8 cm, Matratze 90 cm	✓	-	-	✓	-
99,8 cm, Matratze 87 cm	-	✓	✓	-	✓
<b>Seitensicherungen</b>					
durchgehend	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Design Kopf- und Fußteile</b>					
Base	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Grundfarben</b>					
Kristallweiß NCS S0500N	✓	✓	✓	✓	✓
Argentum ähnlich RAL 9006	0	0	0	0	0
<b>Dekontamination, Schutzgrad</b>					
manuelle Aufbereitung, IPX6	✓	✓	✓	✓	✓
maschinelle Aufbereitung, IPX6W	0	0	0	0	0
<b>Liegeflächen</b>					
Hygiene-Liegefläche PP	✓	✓	✓	✓	✓
Hygiene-Liegefläche PP für Gurtsystem	0	0	0	✓	0
Liegefläche aus Vollkunststoff (HPL) für Gurtsystem	0	-	0	0	0
Stahlgitterboden (entnehmbar oder nicht entnehmbar)	0	-	0	0	0
<b>Wandabweisrollen mit Abweiskegel</b>					
4 Kunststoff, umlaufend	✓	✓	✓	✓	✓
4 Universal, umlaufend	0	0	0	0	0
2 Universal kopfseitig, 2 Kunststoff, fußseitig	0	0	0	0	0
<b>Laufrollen</b>					
Integralrolle Ø 150 mm	✓	✓	✓	-	-
Steinco-Doppellaufrolle Ø 150 mm	0	0	0	-	-
Linea-Doppellaufrolle Ø 150 mm	0	0	0	-	-
Linea-Doppellaufrolle Ø 125 mm	-	-	-	✓	✓
<b>5. Rolle</b>					
Doppellaufrolle Ø 125 mm	0	0	0	-	-
<b>Laufrollenbelag leitfähig</b>					
1 Laufrolle	✓	✓	✓	✓	✓
2 Laufrollen	0	0	0	0	0
4 Laufrollen	0	0	0	0	0
5 Laufrollen	0	0	0	-	-
<b>Bremstritt</b>					
2 x Druckguss, verchromt	✓	✓	✓	✓	✓
2 x Druckguss, verchromt mit Farbkennzeichnung	0	0	0	0	0
4 x Druckguss, mit und ohne Farbkennzeichnung	0	0	0	0	0
<b>Spurrollenposition</b>					
kopfseitig rechts	✓	✓	✓	✓	✓
kopfseitig links	0	0	0	0	0
fußseitig rechts	0	0	0	0	0
fußseitig links	0	0	0	0	0
Bettmitte	0	0	0	-	-

Seta pro	Standard	Variante lino 80 cm	Variante lino 87 cm	Variante brevo	Variante brevo lino
<b>Bedienelemente</b>					
Standard Handschalter <sup>1)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Standard-Handschalter, beleuchtet <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0
LCD-Handschalter	0	0	0	0	0
Sperrbox in der Bettzeugablage	0	0	0	0	0
Bedienmodul in der Bettzeugablage	0	0	0	0	0
Fußschalter	0	-	0	-	-
<b>Out-of-Bed-System</b>					
ja	0	0	0	0	0
<b>Weitere Ausstattungen</b>					
Normschiene kopfseitig	0	0	0	0	0
Bettzeugablage	✓	✓	✓	✓	✓
Bettverlängerung	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Elektronik-Ausstattungen</b>					
Bremssignal	0	0	0	0	0
Unterbettbeleuchtung	0	0	0	0	0
Bediensatellit	0	0	0	0	0
Winkelanzeige im LCD-Handschalter	0	0	0	0	0
<b>Akku</b>					
Blei-Gel-Akku	✓	✓	✓	✓	✓
Lithium-Ionen-Akku	0	0	0	0	0

## Technische Daten

Seta pro	Standard	Variante lino 80 cm	Variante lino 87 cm	Variante brevo	Variante brevo lino
<b>Maße und Gewichte</b>					
Außenmaße	103,8 x 219,3 cm	92,8 x 219,3 cm	99,8 x 219,3 cm	103,8 x 219,3 cm	99,8 x 219,3 cm
Liegefläche (Matratzenmaß)	90 x 200 cm	80 x 200 cm	87 x 200 cm	90 x 200 cm	87 x 200 cm
Bettverlängerung	22,5 cm <sup>2)</sup>	22,5 cm <sup>2)</sup>	22,5 cm <sup>2)</sup>	22,5 cm <sup>2)</sup>	22,5 cm <sup>2)</sup>
Liegeflächenaufteilung	83 – 15 – 33 – 54 cm	83 – 15 – 33 – 54 cm	83 – 15 – 33 – 54 cm	83 – 15 – 33 – 54 cm	83 – 15 – 33 – 54 cm
Längenausgleich der Rückenlehne	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Sichere Arbeitslast	260 kg	260 kg	260 kg	260 kg	260 kg
Maximales Patientengewicht	ca. 220 – 250 kg	ca. 220 – 250 kg	ca. 220 – 250 kg	ca. 220 – 250 kg	ca. 220 – 250 kg
Bodenfreiheit Untergestell	16,9 cm	16,9 cm	16,9 cm	14,3 cm	14,3 cm
Bodenfreiheit Untergestell mit Linea-Rolle Ø 150 mm	14,1 cm	14,1 cm	14,1 cm	-	-
Gesamtgewicht	ca. 155 kg	ca. 155 kg	ca. 155 kg	ca. 155 kg	ca. 155 kg
Schutzhöhe Seitensicherungen	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
<b>Verstellbereiche</b>					
Schwenkung in Kopftiefe	17°	17°	17°	17°	17°
Schwenkung in Fußtiefe	17°	17°	17°	16°	16°
Liegeflächenhöhe	ca. 35 – 91 cm	ca. 35 – 91 cm	ca. 35 – 91 cm	ca. 28 – 84 cm	ca. 28 – 84 cm
Liegeflächenhöhe mit Linea-Rolle Ø 150 mm	ca. 32 – 88 cm	ca. 32 – 88 cm	ca. 32 – 88 cm	-	-
Winkel Rückenlehne	70°	70°	70°	70°	70°
Winkel Oberschenkellehne	40°	40°	40°	40°	40°
Winkel gestreckte Beinhochlage	16°	16°	16°	16°	16°

# Wertebewahrer Zukunftsgestalter



## STIEGELMEYERGRUPPE

### Wertebewahrer

Unser Unternehmen wurde im Jahr 1900 in Herford gegründet und ist bis heute familiengeführt. Respekt und Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern sind die Basis unserer täglichen Arbeit. Aufbauend auf diesen Werten sowie unserer langjährigen Erfahrung bieten wir unseren Kunden in aller Welt hochwertige Produkte, Lösungen und Services für die Anforderungen in Pflege und Gesundheit.

### Zukunftsgestalter

Um den schnellen Veränderungen im Pflege- und Gesundheitswesen gerecht zu werden, entwickeln wir alle unsere Produkte selbst. Innovationen und Visionen für die Pflege der Zukunft sind das Ziel unserer Arbeit. Dabei stehen wir immer im Austausch mit unseren Kunden, um sie bei ihren Aufgaben im Alltag gezielt zu unterstützen. Die Trends von morgen schon in der Gegenwart umzusetzen, ist bei uns eine erfolgreiche Tradition.

### Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Möbelsysteme
- Service



Die Stiegelmeier-Gruppe ist Ihr internationaler Partner für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und mit der Marke Burmeier für die häusliche Pflege. Wir unterstützen unsere Kunden mit praxisingerechten Produkten, Lösungen und Services, die wir stetig weiterentwickeln.

- 1900 gegründet und bis heute familiengeführt
- über 1.100 Mitarbeiter weltweit
- Fertigung aller Kernprodukte in eigenen Werken
- Produktentwicklung und Produktion in Deutschland
- Service, Schulung und Prozessoptimierung beim Kunden
- internationale Zertifizierungen und Export in mehr als 60 Länder
- Vertriebsgesellschaften in Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Südafrika

### Unsere Marken





## STIEGELMEYERGRUPPE

### Hauptsitz / Headquarters

---

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185 - 0  
Fax +49 (0) 5221 185 - 252  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
8 Allée des Chevreuils  
69380 Lissieu  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd**  
The Estuaries · Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl



Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website:  
*Find your local partner on our website:*  
[www.stieglmeyer.com/partner](http://www.stieglmeyer.com/partner)

[stieglmeyer.com](http://stieglmeyer.com)