



Venta

Modern, vielseitig und einfach zu bedienen

Venta

Die perfekte Verbindung von Sicherheit und Komfort

Ein modernes Bett für die stationäre Pflege muss hohe, sehr unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Besonders wichtig ist die Entlastung der Pflegekräfte: Auch in Zeitnot und angespannten Situationen sollte sich das Bett mühelos und ergonomisch bedienen lassen. Zugleich erwartet der Bewohner Komfort und Sicherheit ohne freiheitsentziehende Maßnahmen. Die innovative Technik für diese Ansprüche darf nicht die wohnliche Optik des Bettes beeinträchtigen, denn in einer privaten, ansprechenden Umgebung fühlen sich alle Beteiligten viel wohler.

Mit unserem Venta haben wir Antworten auf diese Fragen gefunden und dabei ein Pflegebett aus einem Guss geschaffen. Als Niedrigbett mit einer flexiblen Seitensicherung schützt und mobilisiert das Venta den Bewohner zugleich. Auch optisch ist das Venta mit seinem eleganten Erscheinungsbild und den wählbaren Softcovern ein wohnliches Designerbett für jeden Einrichtungsstil.



Inhalt

Modellvarianten

- Venta – Standard 4
- Venta – Variante movo 6
- Venta – Variante forto 7

Schutz und Mobilität in jeder Situation

- Schwenkbare Seitensicherung 8
- Schwenkbare Seitensicherung mit Teleskop 10

Design

- Softcover 12
- Häupter und Dekore 14
- Kopf- und Fußsteile 14

Untergestell

15

Liegeflächen

16

Bremsen

17

Bettverlängerung

18

3-Stop-Funktion

20

Flexibles Bedienkonzept

22

Out-of-Bed-System

24

24-Volt-System

25

Zubehör

26

Ausstattungen und Optionen

28

Technischer Service

- Ersatzteile, Bettenprüfung, Wartung 30

Die Stieglmeyer-Gruppe

31

Komfort



Venta – Standard

- Höhenverstellung:
25 – 80 cm
- Niedrigbett
- Ergonomische Arbeitshöhe:
Entlastung der Pflegekraft durch rücken-schonendes Arbeiten auf Hüfthöhe
- schwenkbare Seitensicherungen mit 42 cm Schutzhöhe

Seite 4

Fahrbarkeit



Venta – Variante movo

- Höhenverstellung:
28 – 83 cm
- Niedrigbett
- Rollen:
100-mm-Doppelaufrollen für hervorragende Manövrierfähigkeit

Seite 6

Schwerlast



Venta – Variante forto

- Höhenverstellung:
31 – 85 cm
- Sichere Arbeitslast:
260 kg für schwergewichtige Bewohner
- Liegeflächenbreite:
100 cm
- Rollen:
125-mm-Doppelaufrollen

Seite 7

Venta – Standard

Das wohnliche Niedrigbett

Pflegeheime müssen ihre Bewohner vor Sturzverletzungen schützen, ohne die Mobilität unnötig einzuschränken. Denn freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) senken die Lebensqualität der Pflegebedürftigen erheblich, beeinträchtigen die psychische und physische Gesundheit und sind rechtlich mit hohen Hürden verbunden.


Unser Venta hilft dabei, FEM zu vermeiden. Als Niedrigbett reduziert es das Risiko von Sturzverletzungen. Möchte der Bewohner aufstehen, kann er mithilfe des Handschalters automatisch die ergonomisch günstige Höhe von ca. 38 cm einstellen. Die schwenkbare Seitensicherung bietet normgerechten Schutz und lässt zugleich die untere Betthälfte für einen ungehinderten Ein- und Ausstieg frei.

- großer Höhenverstellbereich von ca. 25 - 80 cm ermöglicht rückenschonende Pflege
- Seitensicherung einhändig bedienbar
- moderne Handschalter für intuitive Steuerung zur Auswahl
- große Auswahl wohnlicher Häupterformen und Dekore
- textile Softcover ermöglichen Anpassung an jeden Geschmack



Niedrigbett

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

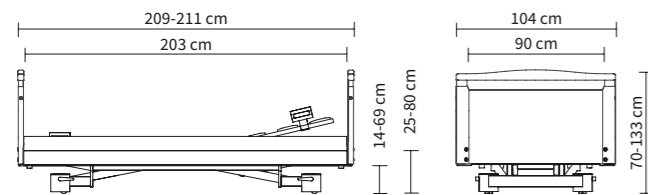

Das Venta entlastet die Pflegekräfte, fördert die Mobilität der Bewohner und überzeugt mit einer wohnlichen Optik. Design-Elemente wie die optionalen Softcover sorgen für eine wohnliche, private Atmosphäre.





Venta – Variante movo



Besonders gut fahrbar für einen lebendigen Alltag

Niedrigbett

Die Variante movo des Venta zeichnet sich durch eine besonders gute Fahrbarkeit aus. Bettlägerige Bewohner können dadurch leichter am täglichen Leben in den Gemeinschaftsräumen oder auf der Terrasse teilhaben und gewinnen neue Lebensfreude. Die Pflegekraft wird durch das einfachere Manövrieren z. B. in Mehrbettzimmern oder schmalen Fluren entlastet, zugleich sinkt das Risiko von Schäden durch Kollisionen.

- 100-mm-Doppellaufrollen mit sehr guten Fahreigenschaften
- Rollenzentralfeststellung serienmäßig
- großer Höhenverstellbereich von 28 - 83 cm

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

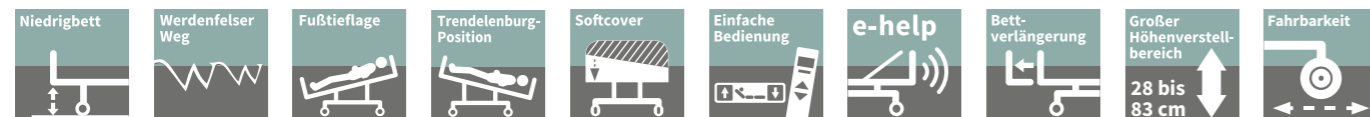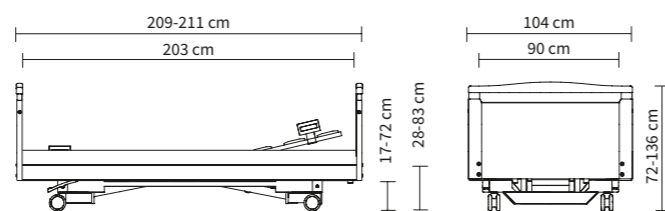

Venta – Variante forto


Komfort für schwergewichtige Bewohner


Schwerlastbett

Die Zahl übergewichtiger Menschen hat sich in vielen Industriestaaten in den vergangenen 40 Jahren verdoppelt. Auch von Adipositas sind immer mehr Menschen betroffen. Diese Entwicklung wird sich in der Pflege bemerkbar machen. Die Variante forto des Venta punktet als Schwerlastbett mit Platz, Komfort und Sicherheit. Mit dieser Modellvariante ist Ihr Haus auf viele Herausforderungen gut vorbereitet.

- hohe sichere Arbeitslast von 260 kg
- Liegeflächenbreite von 100 cm serienmäßig
- belastbare 125-mm-Doppellaufrollen
- Höhenverstellung von 31 - 85 cm für bequemen Ausstieg und ergonomische Pflege
- komfortable Sitzposition

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

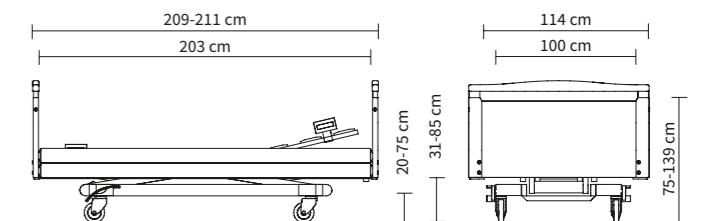

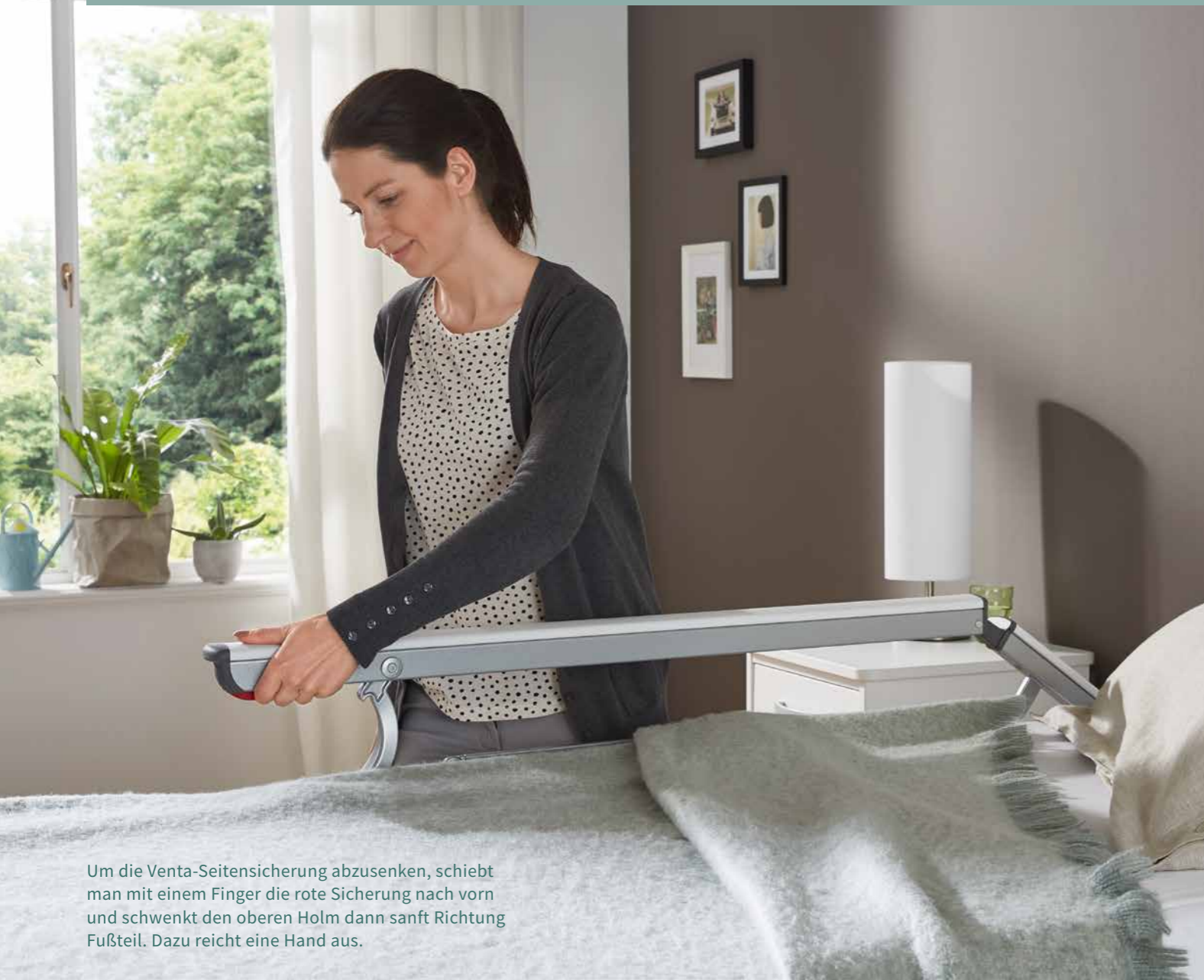

Um die Venta-Seitensicherung abzusenken, schiebt man mit einem Finger die rote Sicherung nach vorn und schwenkt den oberen Holm dann sanft Richtung Fußteil. Dazu reicht eine Hand aus.

Schwenkbare Seitensicherung

Schutz und Mobilität in jeder Situation



Die innovative Seitensicherung zählt zu den stärksten Vorteilen des Venta. Die stabile und zugleich filigrane Konstruktion deckt 50 % der Liegeflächenlänge ab und bietet dadurch normgerechten Schutz, ohne das Verlassen des Bettes über die fußseitige Hälfte zu verhindern. So vermeidet die Seitensicherung FEM und hilft, die Philosophie des Werdenfeller Weges umzusetzen und die Mobilität der Bewohner zu erhalten.

- freier Durchblick zwischen den Holmen
- elegante, dezente Form
- Handlauf wird im abgesenkten Zustand zur angenehmen Sitzfläche an der Bettkante

Ein optionales Füllstück schließt im abgesenkten Zustand die Lücke zwischen Handlauf und Fußende des Bettes.



Einhand-
bedienung

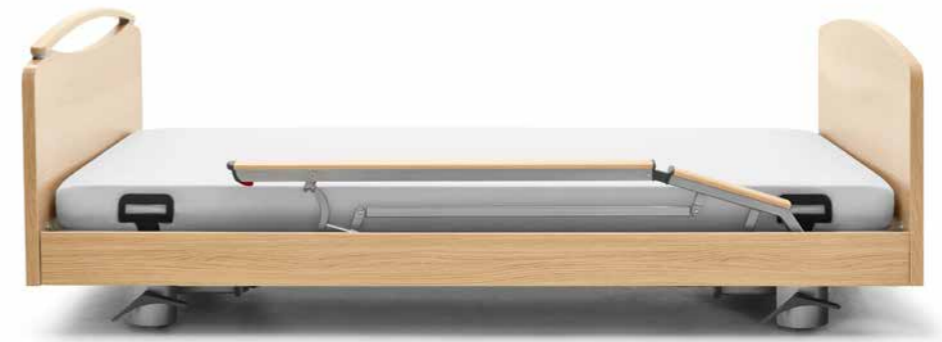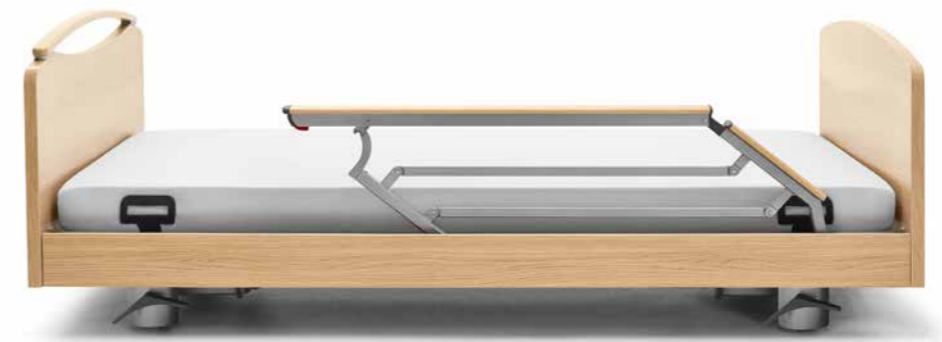

ENTSCHEIDEND BESSER

Einfache Bedienung mit einer Hand

Die leichte Bedienung der Venta-Seitensicherung mit nur einer Hand hilft der Pflegekraft in angespannten Situationen. Um eines der Elemente abzusenken, muss man nur mit einem Finger die rote Sicherung nach vorn schieben und gleichzeitig mit sanftem Druck den oberen Holm Richtung Fußende schwenken. Zum Anstellen der Seitensicherung genügt ein kurzer Schwung, danach richtet sie sich gedämpft von allein auf und rastet sicher ein. Steht die Pflegekraft am Fußende des Bettes, kann sie mit beiden Händen das rechte und linke Element gleichzeitig aufrichten und spart Zeit.



Schwenkbare Seitensicherung mit Teleskop

Flexibler Schutz für jede Anforderung

Ist ein pflegebedürftiger Mensch z. B. durch eine Demenz stark sturzgefährdet, kann ein umfassender Schutz unverzichtbar sein. In diesem Fall empfiehlt sich die optionale teleskopierbare Variante der Venta-Seitensicherung. Auch sie deckt im Normalzustand nur 50 % der Liegefläche ab, doch bei Bedarf lassen sich die Holme nahezu über die gesamte Länge der Liegefläche ausziehen und rasten am Ende sicher ein. Die letzte kleine Lücke am Fußende kann bei Bedarf mit einem Füllstück geschlossen werden, das als Zubehör lieferbar ist.

Auch die teleskopierbare Seitensicherung entlastet die Pflegekräfte durch eine mühelose Einhand-Bedienung. Zusätzlich überzeugt diese Variante durch ihre Flexibilität. Benötigt ein Bewohner je nach Tagesform unterschiedlichen Schutz oder soll das Bett wechselnden Bewohnern zur Verfügung stehen, passt sich die teleskopierbare Seitensicherung allen Bedürfnissen an. Das vereinfacht die logistischen Abläufe in der Einrichtung und spart Zeit und Kosten.



Wird die Teleskop-Verlängerung nicht ausgezogen, ermöglicht die Seitensicherung einen freien Ein- und Ausstieg.




▲ Die teleskopierbare Seitensicherung passt sich flexibel an wechselnde Schutzbedürfnisse der Bewohner an.



ENTSCHEIDEND BESSER Ergänzungstück für lückenlosen Schutz

Die teleskopierbare Venta-Seitensicherung deckt nahezu die komplette Längsseite des Bettes ab. Nur am Fußende lässt sie einen schmalen Bereich offen. Soll auch dieser für lückenlosen Schutz geschlossen werden, ist ein optionales Ergänzungstück als Zubehör erhältlich. Das Füllstück bleibt immer fest an seiner Position und bietet mit seiner Griffleiste zusätzlichen Halt, wenn der Bewohner z. B. neben dem Bett steht. Die gesamte Seitensicherung ermöglicht mit ihrer filigranen Konstruktion einen freien Blick in den Raum oder aus dem Fenster.

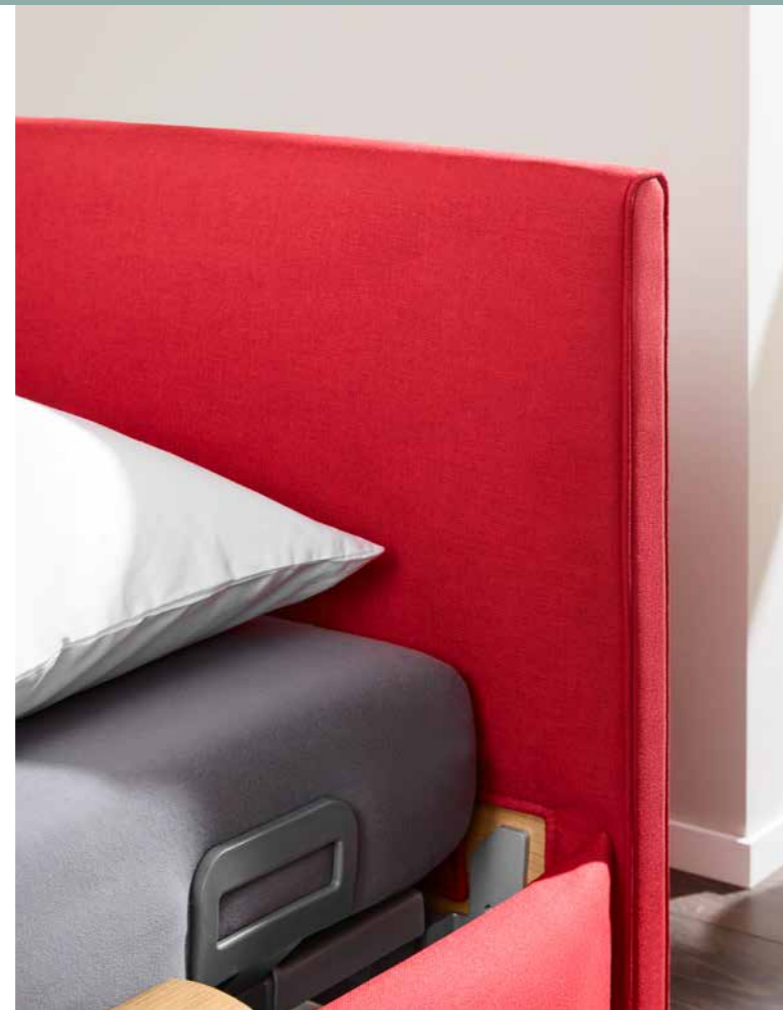

Die Kombination aus blauen Softcovern und dem weißen Dekor Kreide sorgt für eine frische, positive Atmosphäre.

▲ Softcover für die Häupter sind in einem Kissendesign (links) oder einem Kederdesign (rechts) erhältlich.

Design

Softcover – mehr Farbe und Eleganz

Farbe weckt Energie und positive Emotionen. Bei alten und demenzkranken Menschen kann sie die kognitiven Fähigkeiten und das Orientierungsvermögen unterstützen. Mit den optionalen Softcovern für die Häupter und Seitenblenden verwandelt sich das Venta in ein wohnliches Designerbett, das sich in jede Raumeinrichtung einfügt und dem Bewohner ein Gefühl von Geborgenheit und Identifikation mit seinem Zimmer vermittelt.

- 2 Formen zur Auswahl: Kissendesign mit spitzen Ecken, Kederdesign mit runden Ecken
- hochwertiger Stoff mit attraktiven Farben und Mustern
- Softcover für Häupter und Seitenblenden einzeln erhältlich und frei kombinierbar
- müheloses Anbringen und Abnehmen
- ideal für die Umsetzung von Farbkonzepten in Räumen oder Stationen



▲ Gedeckte Töne stehen ebenso zur Auswahl wie leuchtende Farben.



▲ Die Softcover lassen sich in wenigen Augenblicken über die Häupter ziehen und wieder abnehmen.


ENTSCHEIDEND BESSER Einfache Reinigung



Wenn pflegebedürftige Menschen einen Großteil des Tages im Bett verbringen und dort auch ihre Mahlzeiten einnehmen, kann es zu Verschmutzungen durch Flüssigkeiten oder Lebensmittel kommen. Der hochwertige Stoff unserer Softcover ist darauf vorbereitet. Flüssige und viskose Substanzen dringen nicht in das Gewebe ein. Sie können mit einer Bürste, Wasser und Reinigungsmitteln schnell und gründlich entfernt werden. Eine Reinigung in der Waschmaschine ist nicht möglich.

Häupter und Dekore

Die Wohnlichkeit und das individuelle Design des Venta spiegeln sich auch in zahlreichen wählbaren Häupterformen und Holzdekoren wider. Von sachlicher Geradlinigkeit bis zu spielerischen Rundungen ist jeder Stil vorhanden. Häupter mit Griffleisten erleichtern zusätzlich das Manövrieren des Bettes und geben dem Bewohner im Stehen sicheren Halt. Die Spanne der Dekore reicht vom weißen Ton Kreide bis zum opulenten dunkelbraunen Bella Noce Schoko.

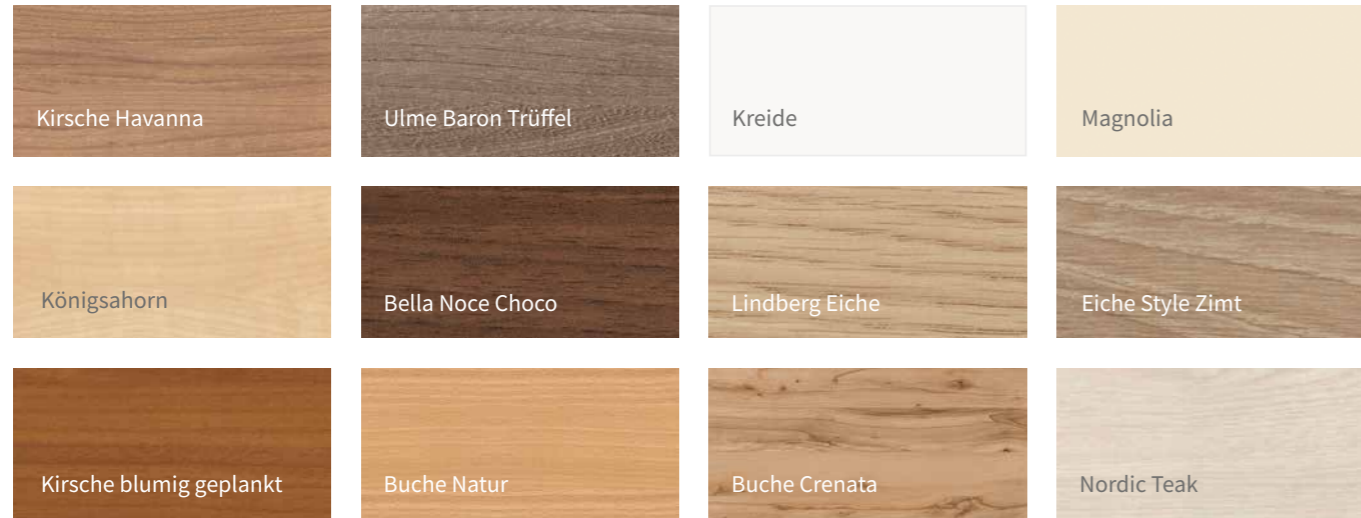

Kopf- und Fußteile



Häupter für Softcover geeignet



Untergestell mit harmonischer Linienführung


Zur Wohnlichkeit des Venta trägt neben dem individuellen Holzumbau und den Softcovern auch das Untergestell bei. Die Enden seiner Längsverstrebungen werden standardmäßig mit 4 einzelnen Kunststoffabdeckungen umkleidet. In ihrer silbergrauen Farbe passen sie genau zum Ton des Gestells. Die Abdeckungen ummanteln einige mechanische Merkmale und sorgen dadurch für eine harmonischere Linienführung des Bettes. Zugleich lässt sich die glattere Oberfläche noch einfacher und gründlicher reinigen. Bei Bedarf können die Kunststoffelemente werkzeuglos abgenommen werden.

Auf Wunsch ist eine noch umfassendere Abdeckung erhältlich. Ihre beiden Kunststoff-Elemente umkleiden die kompletten Stirnseiten des Untergestells und sind in den Farben mehrerer Holzdekore lieferbar. Wer nur das Kopf- oder das Fußteil ummanteln möchte, kann auch ein einzelnes Element erwerben. Die Dekorabdeckung verbirgt die technischen Aspekte des Pflegebettes und verleiht ihm ein besonders privates Aussehen. Auch sie lässt sich leicht reinigen und abnehmen.



▲ Serienmäßig umkleiden 4 Kunststoffabdeckungen die Enden der Längsverstrebungen.

ENTSCHEIDEND BESSER Attraktive Farben zur Auswahl

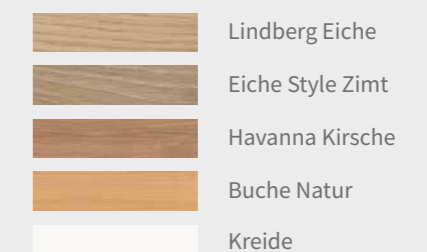



Liegeflächen

Die Grundlage für erholsamen Schlaf

Eine optimale Liegefläche unterstützt die Wirkung der Matratze und trägt zu den guten Hygiene-Eigenschaften des Pflegebettes bei. Die serienmäßige Hygiene-Liegefläche des Venta ermöglicht eine besonders leichte und gründliche Aufbereitung. Tiefgezogene Lüftungsschlitze im Polypropylen fördern ein gesundes Mikroklima im Bett und einen wohltuenden Schlaf. Alle Arten von Spezialmatratzen können zumeist ohne Unterlegematratzen aufgelegt werden, sodass die Schutzhöhe der Seitensicherung ausreicht.

Für besonders erholsamen Schlaf und eine ideale Anpassung an die Körperform steht die wählbare Komfort-Liegefläche. Sie besteht aus 30 flexibel gelagerten Flächenelementen mit 80 Schwenkfedern und unterschiedlichen Härtegraden. Die Komfort-Liegefläche ist etwas höher als herkömmliche Modelle, daher sollten Sie überprüfen, ob die Schutzhöhe der Seitensicherung in Kombination mit Ihrer Matratze ausreicht.



▲ Die Lüftungsschlitze der Hygiene-Liegefläche tragen zu einem gesunden Mikroklima im Bett bei.



▲ Die Komfort-Liegefläche



Bremsen – einfach und sicher

Die guten Fahr- und Manöviereigenschaften des Venta werden durch seine mühelos bedienbaren Bremsen noch verstärkt. Die Pflegekraft erreicht die Bremstritte mit dem Fuß selbst dann ohne Probleme, wenn sich die Liegefläche in der tiefsten Position befindet. Bücken und langwieriges Suchen in hektischen Situationen gehören der Vergangenheit an.

Das Venta besitzt serienmäßig eine paarweise Rollenfeststellung. Optional ist eine noch komfortablere Rollenzentralfeststellung erhältlich. Bei den Modellvarianten movo und forto ist letztere bereits standardmäßig enthalten. Gerade die besonders mobile Variante Venta movo ist dadurch jederzeit sofort startbereit und kann an der Zielposition mit nur einer Fußbewegung sicher gebremst werden.

▲ Jederzeit leicht erreichbar: die Bremstritte des Venta in der Standardausführung mit paarweiser Rollenfeststellung.

▼ Optional ist das Venta auch mit einer praktischen Rollenzentralfeststellung lieferbar.



▼ Bei der Modellvariante movo ist die Rollenzentralfeststellung serienmäßig enthalten.





Der Bettrahmen ist serienmäßig um 20 cm ausziehbar. Die Liegefläche lässt sich optional mit einem Polsterteil (oben) oder einem Verlängerungsstück für die Unterschenkellehne (unten) verlängern.

Bettverlängerung

Platz und Komfort für große Bewohner

Ausreichender Platz im Pflegebett ist eine entscheidende Voraussetzung für Wohlbefinden. Große Bewohner werden daher die integrierte Verlängerung des Bettrahmens um 20 cm schätzen, die jedes Venta standardmäßig besitzt. Pflegekräfte oder Techniker können diese Verlängerung losgelöst von der Seitensicherung ausziehen. Die dabei entstehende Lücke zwischen Seitenblende und Fußteil beeinträchtigt nicht die normgerechte Funktionsfähigkeit des Bettes. Natürlich sind als Zubehör teleskopierbare Seitenblenden lieferbar, die für eine durchgehende elegante Optik sorgen.

Um auch die Liegefläche zu verlängern, gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachere Variante ist ein Polsterteil, das mithilfe einer Halterung in den Bettrahmen eingelegt wird und bei Verstellungen der Liegefläche fest an seiner Position bleibt. Soll der Bewohner hingegen in den Genuss der gesundheitsfördernden Beinhochlage kommen, empfiehlt sich die Unterschenkellehnenverlängerung. Sie lässt sich einfach und werkzeuglos an der Liegefläche befestigen. Ein passendes Polsterteil kann entweder am Fußende oder – zur Vermeidung von Dekubitus an den Fersen durch die Nahtstelle – am Kopfende platziert werden. Auch die Verwendung einer 220 cm langen Matratze ist möglich.

- ▲ Die optionalen teleskopierbaren Seitenblenden lassen sich bei Nutzung der Bettverlängerung mit ausziehen.

ENTSCHEIDEND BESSER

Die Bettverlängerung

- Jede Venta-Variante ist mit einer Verlängerung des Liegeflächenrahmens von 20 cm ausgestattet.
- Die Verlängerung lässt sich werkzeuglos ausziehen und ohne weitere Umbauten normgerecht nutzen.
- Optionale teleskopierbare Seitenblenden schließen die optische Lücke am Fußende.
- Die Liegefläche lässt sich mit einem Polsterteil verlängern, das am Fußende eingelegt wird und sich bei Verstellungen nicht mitbewegt.
- Alternativ ist eine Unterschenkellehnenverlängerung erhältlich, die sich mitbewegt und so z. B. die Beinhochlage ermöglicht.

- ▼ Um die Verlängerung des Bettrahmens zu aktivieren, löst die Pflegekraft zunächst den Rastbolzen aus.



- ▼ Danach lässt sich die Verlängerung mühelos ausziehen.



- ◀ Die optionale innovative Unterschenkellehnenverlängerung bewegt sich beim Anstellen der Unterschenkellehne mit. So werden neben dem Bettrahmen auch die beweglichen Liegeflächen-elemente wirksam verlängert.



Auf der Tiefstposition ist der Bewohner ohne freiheitsentziehende Maßnahmen vor Sturzverletzungen geschützt.


3-Stopp-Funktion

Ergonomisch arbeiten und mobilisieren

Je nach Tageszeit und Tätigkeit sollte ein modernes Pflegebett unterschiedliche Höhenpositionen einnehmen können. Nachts schützt die Tiefstposition vor Sturzverletzungen, zum Aufstehen oder Hinlegen ist eine mittlere Höhe optimal, und die Pflegekraft schont ihren Rücken, wenn die Liegefläche auf Hüfthöhe hochgefahren wird. Mit dem großen Höhenverstellbereich des Venta von ca. 25 - 80 cm lässt sich jede Wunschhöhe stufenlos per Handschalter ansteuern. Für zusätzlichen Komfort sorgt die 3-Stopp-Funktion: Das Bett hält nicht nur automatisch auf der Höchst- und Tiefstposition, sondern legt auch bei ca. 38 cm einen Zwischenstopp ein.

- müheloses Ansteuern der ergonomisch vorteilhaftesten Ein- und Ausstiegsposition
- einfachere Mobilisierung der Bewohner
- Höhe des Zwischenstopps lässt sich für sehr kleine oder sehr große Bewohner individuell anpassen

◀ Der automatische Zwischenstopp bei ca. 38 cm eignet sich optimal für den bequemen Ein- und Ausstieg. Die Seitensicherung lässt genug Platz frei und dient als Mobilisierungshilfe.

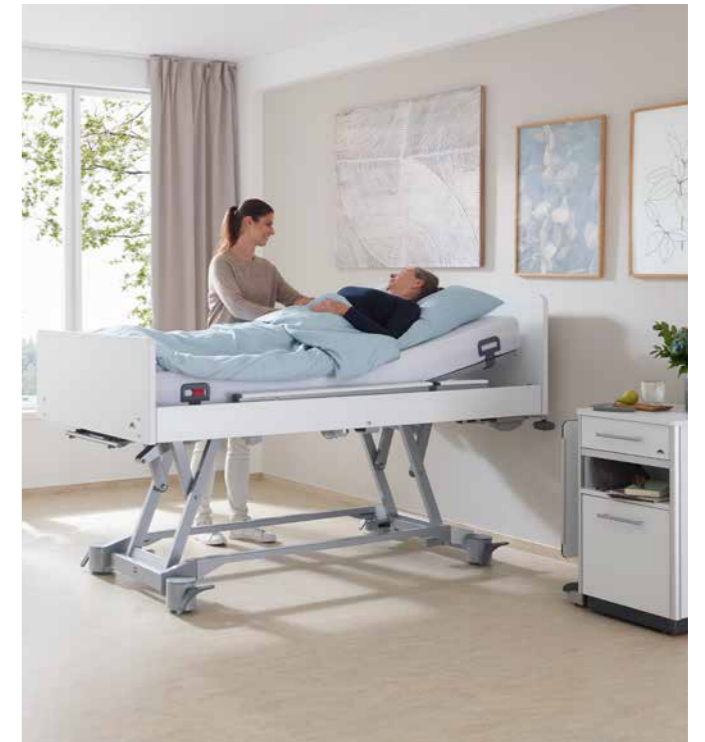

▲ Die maximale Höhe von 80 cm ermöglicht auch großen Pflegekräften ein rückschonendes Arbeiten in gerader Körperhaltung.

Flexibles Bedienkonzept

Handschalter für individuelle Anforderungen

Die Bedienung des Venta erfolgt mit einem individuell wählbaren Handschalter. Eine einfache, selbsterklärende Bedienung des Bettes mit dem Handschalter ist doppelt hilfreich. Die Pflegekraft muss auch in angespannten Situationen den Überblick und die Kontrolle behalten. Der Bewohner sollte auch mit eingeschränkten Fähigkeiten einfache Verstellungen selbst vornehmen können, um mehr Komfort zu genießen und die Pflegekraft zu entlasten.


Sie haben die Wahl


Je nach Präferenz kann der serienmäßige, beleuchtete Handschalter HB400 oder optional der LCD-Handschalter mit beleuchtetem Display und 3 Tasten gewählt werden.

▼ Beim HB400 sind die Tasten rund um die Uhr ideal zu erkennen: tagsüber durch eine transparent schwarze Umrandung, nachts durch eine angenehme Beleuchtung. Die Trendelenburg-Funktion ist integriert und benötigt keinen Zusatzhandschalter. Alle Optionen für den Bewohner lassen sich selektiv sperren.


▼ Der optionale LCD-Handschalter zeigt die Verstellfunktionen auf einem großen beleuchteten Display. Mit seinen Pfeiltasten lässt sich die gewünschte Option mühelos auswählen und aktivieren. Die Pflegekraft kann kurzfristig alle gesperrten Funktionen öffnen und das Bett nach Bedarf verstellen.

▼ Wurde bei der Ausstattung ein Out-of-Bed-System gewählt, wird die Bettausstattung durch einen weiteren Handschalter erweitert. Der Out-of-Bed Handschalter dient der Aktivierung des Systems. Über ihn ist auch die Meldezeit und weitere Funktionen wie Lichtautomatik einstellbar.

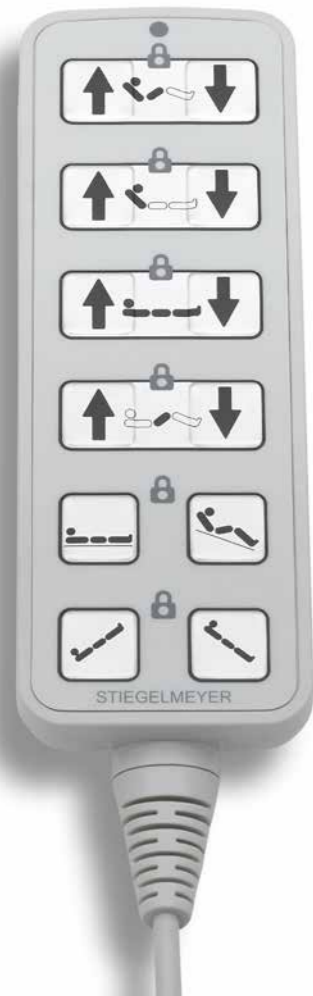



▲ Auch bei Nacht sind die beleuchteten Tasten gut zu erkennen.



▲ Alle Verstellfunktionen lassen sich an einem Magneten im Bügelgriff einzeln sperren und entsperren.

ENTSCHEIDEND BESSER
Beleuchteter Handschalter HB400


- 6 Tastenreihen mit intuitiven Symbolen
- Kopf- und Fußtieflage integriert
- Tasten durch Umrandung leicht erkennbar
- Beleuchtung bei Nacht
- Sperrzustand jeder Funktion per LED angezeigt
- Entsperrung per Magnet am Bett – keine losen Teile

ENTSCHEIDEND BESSER


Das Out-of-Bed-System

Das optionale Out-of-Bed-System unterstützt die Arbeit der Pflegekräfte besonders bei Nacht. Es meldet z. B., wenn ein Bewohner nach einem Toilettengang nicht ins Bett zurückkehrt.

- Benachrichtigung der Pflegekraft nach einem voreingestellten Zeitintervall (Auswahl per Handschalter)
- Signal an Hausrufanlage
- Lichtautomatik mit Leseleuchte und Unterbettlicht
- hochmoderne Sensorik vermeidet Fehlalarme

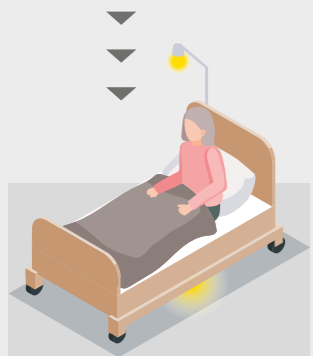

Bereits beim Aufrichten aktiviert der Bewohner die Lichtautomatik.

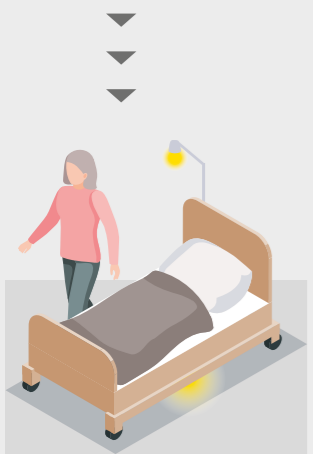

Erst das Verlassen des Bettes löst nach dem festgelegten Intervall die Benachrichtigung aus.



Bereits das Aufrichten im Bett aktiviert die Lichtautomatik. Dadurch ist der Bewohner bei Nacht in seinem Zimmer gut orientiert.



Visualisierung im Pflegezimmer.



Visualisierung im Flur.



Ein visueller und akustischer Hinweis im Pflegezimmer wird aktiviert.



Wartungsfreundlich durch 24-Volt-System

Hohe Sicherheit, Kostenoptimierung und ein Betrieb mit wenig Aufwand: Das optionale 24-Volt-System ist für alle Venta-Betten mit elektrischem Antrieb eine attraktive Wahl.

Direkt an der Steckdose erfolgt die Spannungsumwandlung auf 24 Volt. Keine spannungsführende 230-Volt-Komponente befindet sich mehr in der Nähe des Pflegebedürftigen, der dadurch eine erhöhte Sicherheit genießt.


Kosten und Aufwand spart die deutliche Reduktion der Ableitstrommessungen. Diese müssen mit dem 24-Volt-System statt jährlich nur noch alle 10 Jahre stattfinden.

Ableitstrommessung nur alle 10 Jahre



▲ Ein Netzstecker-Trafo stellt gleich an der Steckdose eine Schutzkleinspannung her. Der optionale Wandabstandshalter am Bett schützt Steckdosen, Wände und Inventar.

ENTSCHEIDEND BESSER
Starke Vorteile

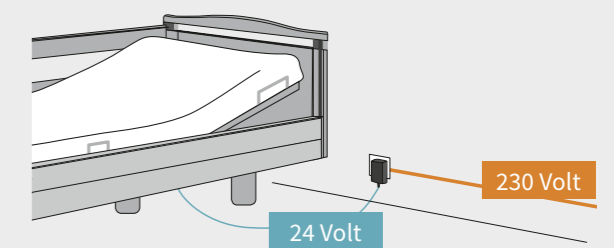

- Schutzkleinspannung ab Trafo an der Steckdose
- keine 230-Volt-Komponenten am Bett
- optional erhältlicher Akku macht das Pflegebett im Notfall unabhängig vom Stromnetz
- Ableitstrommessung nur alle 10 Jahre
- hohe Sicherheit für Bewohner



Zubehör

So wird das Venta zum Wunschbett

Optionale Polster und Bezüge an den Bettseiten schützen den Bewohner, erleichtern den Ein- und Ausstieg und vermitteln durch ihre angenehm weiche Haptik ein wohltuendes Gefühl von Geborgenheit.

Eine Umhüllung der Seitensicherung verhindert, dass unruhige Bewohner sich an den Holmen stoßen oder zwischen ihnen durchgreifen. Der Schaumlederschutzbezug verkleidet die Seitensicherung vollständig von innen und außen. Es stehen passende Längen für die kopfseitige und die voll ausgezogene Seitensicherung zur Auswahl. Die aufsteckbaren Schutzpolster verkleiden die Innenseite der Seitensicherung mit 20 mm starkem Formschaum. Der Bewohner genießt dadurch maximalen Schutz. Die Polster lassen sich mit Klettverschlüssen sicher befestigen. Sie sind für den kopfseitigen und den fußseitigen Teil der Seitensicherung wählbar.

Um dem Bewohner den Ein- und Ausstieg zu erleichtern, lassen sich Füllpolster in unterschiedlichen Formen auf den freien Teil der Bettseite stecken. Sie vergrößern die Sitzfläche des Bettes.



▲ Der Schaumlederbezug besteht aus hochwertigem desinfizierbarem Kunstleder und Schaumstoff.



▲ Das Füllpolster erleichtert den Ein- und Ausstieg.



▲ Die hohe Variante des Füllpolsters schont zusätzlich die Seitenblende.



▲ Das Schutzpolster lässt sich einfach von innen auf die Seitensicherung stecken.



Mit Original-Zubehör von Stiegemeyer lässt sich das Venta noch genauer an individuelle Bedürfnisse anpassen. Praktische Details wie Wandabweisrollen und Wandabstandshalter schützen das Bett und die Zimmereinrichtung vor Kollisionsschäden. Unsere Leselampen spenden gemütliches Licht bei nur sehr geringer Wärmeentwicklung. So wird jedes Venta zu einem maßgeschneiderten Wunschbett.

◀ Die elegante Leselampe Sira spendet angenehmes Licht.



▲ Die Leseleuchte Sola spendet angenehmes Licht bei geringer Wärmeentwicklung.



▲ Der Aufrichter erleichtert eine bequeme Positionierung im Bett.




▲ Der Wandabstandshalter mit Teller ist ideal für Leichtbauwände.

ENTSCHEIDEND BESSER

Der Abstandshalter

- Wandabstandshalter vermeiden Kollisionsschäden mit Inventar und Steckdosen beim Manövrieren des Bettes

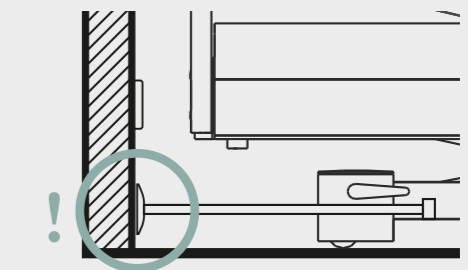

- viele verschiedene Modelle zur Auswahl
- Puffer fängt Stoßenergie auf
- optionaler Teller verteilt Druck noch gleichmäßiger – ideal für Leichtbauwände
- passende Maße für Ihr Bett

Ausstattungen und Optionen

Modellvariante	Venta – Standard	Venta – Variante movo	Venta – Variante forto
Maße und Gewichte			
Außenmaße (abhängig vom Holzbau)	bei Liegeflächenbreite 90 cm ca. 104 × 211 cm	bei Liegeflächenbreite 90 cm ca. 104 × 211 cm	bei Liegeflächenbreite 100 cm ca. 114 × 211 cm
Liegefläche (Matratzenmaß)	90 (87) oder 100 (97) x 200 cm	90 (87) oder 100 (97) x 200 cm	100 (97) x 200 cm
Liegeflächenaufteilung (RL/Sitzteil/OL/UL)	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm
Längenausgleich der Rückenlehne	ca. 10 cm	ca. 10 cm	ca. 10 cm
Sichere Arbeitslast	225 kg	225 kg	260 kg
Unterfahrbarkeit	ca. 15 cm	ca. 15 cm	ca. 18 cm
Gesamtgewicht	ca. 140 kg	ca. 140 kg	ca. 150 kg
Antriebe			
Vollmotorisch	✓	✓	✓
Vollmotorische OpenBus-Technik	✓	✓	✓
24-Volt-Antriebskonzept mit externem Trafo	0	0	0
Elektronische Komponenten			
Beleuchteter Standardhandschalter inkl. Trendelenburg-Funktion (HB400)	✓	✓	✓
LCD-Handscharter inkl. Trendelenburg-Funktion	0	0	0
Out-of-Bed-System Smart	0	0	0
Seitensicherungssysteme			
schwenkbare Seitensicherung	✓	✓	✓
schwenkbare Seitensicherung inkl. horizontalem Teleskop	0	0	0
Lückenschluss	0	0	0
Seitensicherungsschutzhöhe	42 cm	42 cm	42 cm
Liegeflächen			
Liegefläche mit anthropometrischem Optimalmaß (85/15/49/60 cm)	✓	✓	✓
Hygiene-Liegefläche (Polypropylen, herausnehmbar)	✓	✓	✓
Komfort-Liegefläche (nicht bei Liegefläche 100 cm)	0	0	-
Liegeflächenbreite 100 cm*	0	0	✓
Liegefläche 4-geteilt	✓	✓	✓
Liegefläche in Fußtieflage schwenkbar	✓	✓	✓
Liegefläche in Kopftieflage schwenkbar	✓	✓	✓
Rollen			
Doppellaufrulle	✓ Ø 50 mm	✓ Ø 100 mm	✓ Ø 125 mm
2x2-Rollenfeststellung	✓	-	-
4-Rollen-Zentralfeststellung	0	✓	✓
Wandabweissysteme			
Wandabweissrolle horizontal wirkend	0	0	0
Universalrolle horizontal und vertikal wirkend	0	0	0
Wandabstandshalter am Untergestell	0	0	0
Verstellbereiche			
Höhenverstellung	ca. 25 – 80 cm	ca. 28 – 83 cm	ca. 31 – 85 cm
Rückenlehnenverstellung bis 70°	✓	✓	✓
Oberschenkellehnenverstellung bis 40°	✓	✓	✓
Fußtieflage (bis 12°)	✓	✓	✓
Kopftieflage (bis 12°)	✓	✓	✓

Modellvariante	Venta – Standard	Venta – Variante movo	Venta – Variante forto
Sonstiges			
Lifterunterfahrbar	✓	✓	✓
Aufnahmehülsen kopfseitig	✓	✓	✓
Bettverlängerung (20 cm)	✓ integriert	✓ integriert	✓ integriert
Holzbauten zur Auswahl	✓	✓	✓
Holzdekore zur Auswahl	✓	✓	✓
Autokonturverstellung	✓	✓	✓
Zusatzausstattung			
Softcover	0	0	0
integrierte Bettverlängerung mit teleskopierbaren Sicherungsholmen und Seitenblende	0	0	0
Bettzeugablage	0	0	0
Aufnahmehülsen fußseitig	0	0	0
Unterbettlicht	0	0	0
integrierter Leuchtenanschluss	0	0	0
integrierter Akku	0	0	0

ENTSCHEIDEND BESSER Venta-Serie – Sicherheitsstandards

- EN 14971
Risikoanalyse für Medizinprodukte
- EN 60601-1
Sicherheit für medizinisch elektrische Geräte
- EN 60601-1-1
Elektromagnetische Verträglichkeit
- DIN EN 60601-2-52
Medizinische elektrische Geräte



✓ = Standardausstattung
0 = optional erhältlich
- = nicht lieferbar



Technischer Service

Unsere Leistungen – individuell nach Ihren Anforderungen

Die hochwertigen Krankenhaus- und Pflegebetten der Stiegmeyer-Gruppe werden von einem ebenso erstklassigen Service begleitet. Unser Leistungs-Portfolio umfasst die Kernaufgaben Prüfung, Instandsetzung, Schulung und Beratung.

Dabei richten wir uns ganz nach den Wünschen und Anforderungen Ihres Hauses. Egal, wie Sie uns kontaktieren möchten, jeder Weg steht Ihnen offen. Persönliche Ansprechpartner am Telefon unterstützen Sie bei Ersatzteilbestellungen und umfassendem technischem Support. Über 50 Mitarbeiter im Technischen Außendienst kümmern sich vor Ort bei den Kunden um Prüfungen und Instandsetzungen.

Unser Service unterstützt alle Stiegmeyer-Produkte bis 15 Jahre nach dem Kauf mit Ersatzteilen. Stiegmeyer betreibt in Herford ein hochmodernes Servicezentrum mit 3.000 Quadratmetern Lagerfläche. In diesem automatisierten Lager befinden sich durchschnittlich 7.500 Artikel, die in der Regel innerhalb kurzer Zeit verschickt werden können. Sie können diese Artikel auch bequem online in unserem Service-Portal bestellen:

<https://service.stiegmeyer.com>



+49 5221 185 777
Mo-Do von 8:00 bis 16:30 Uhr
Fr von 8:00 bis 14:00 Uhr



service@stiegmeyer.com

Ersatzteile

In unserem Service-Portal können Kunden jederzeit Ersatzteile bestellen. Persönliche Favoritenlisten sowie Einsicht in alle wichtigen Dokumente und die Verfolgung der Lieferungen per Track & Trace sorgen für Komfort und Transparenz. Das Bettenmanagement im Haus lässt sich vorausschauend planen.

Bettenprüfung

Die Bettenprüfung kann eine Inspektion oder eine Wartung sein. In der Inspektion beurteilen wir den technischen Ist-Zustand des Bettes. Daraus lassen sich für jedes einzelne Bett die passenden Maßnahmen ableiten. Zusätzlich zu diesen Leistungen umfasst die Wartung vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen – zum Beispiel das Justieren der Bremse. Die Wartung ist die Bewahrung des Soll-Zustandes. Inspektion und Wartung folgen immer länderspezifischen Vorgaben und beinhalten einen Servicebericht, den Sie auch online abrufen können.

Schnelle Reparatur des Bettes

Als Hersteller garantieren wir Ihnen die Nachlieferung von Original-Ersatzteilen innerhalb kürzester Zeit. Schäden an Ihren Betten beheben unsere Mitarbeiter schnell, kompetent und zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Besondere Instandsetzungen, Umbauten oder Komplettrestaurierungen werden in unserem Servicezentrum in Herford vorgenommen.

STIEGMEYERGROUP



Solutions for people who care

Die Stiegmeyer-Gruppe ist Deutschlands führender Hersteller von medizinischen Betten für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Pflege zuhause. Mit modernen Nachttischen, Möbeln und digitalen Assistenzsystemen ist sie zugleich ein innovativer Anbieter ganzheitlicher Lösungen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt erfolgreich Angebote für die internationalen Märkte in mehr als 100 Ländern.

Unsere Stärken:

- Produktentwicklung an unserem Hauptsitz Herford in Deutschland – Produktion in vier modernen Werken in Deutschland und Polen
- Fabrik in China für den chinesischen Markt
- Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in zahlreichen Ländern
- erstklassiger Service mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung
- Schulungen und Prozessoptimierung für unsere Kunden
- nachhaltiges Handeln mit hohem gesellschaftlichem Engagement

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel
- Service

Unsere Werte

- Erfahren
- Menschlich
- Verlässlich
- Lösungsorientiert
- Aufgeschlossen
- Selbstbewusst

1.000
MITARBEITER
WELTWEIT

11
STANDORTE
in Deutschland, Polen,
den Niederlanden, Belgien,
Frankreich, Finnland,
Südafrika und China

Maßgeschneiderte
ANGEBOTE
für alle
MÄRKTE

MEHR ALS

100.000 produzierte
Betten
pro Jahr

Internationale
ZERTIFI-
ZIERUNG

BIS ZU

15 JAHRE
Ersatzteillieferungen

VERTRIEB
in über
100 Ländern

DEUTSCHE
INGENIEURSKUNST

Unsere Marken





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com