



Łóżeczko dla niemowląt Jovie

Radość życia na oddziale położniczym
i w pokoju rodzinnym

**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.**



„Przez dwa dni cieszyliśmy się spokojnymi chwilami tylko we trójkę – nasze dziecko, mój mąż i ja. To był magiczny i bardzo relaksujący czas. W pokoju rodzinnym mieliśmy poczucie doskonałej opieki i byliśmy zachwyceni komfortem i atmosferą typową raczej dla hotelu.”

Pokój rodzinny

Przyjemna atmosfera dla nowych rodziców

Pokój rodzinny na oddziale położniczym jest idealnym miejscem wypoczynku dla rodziców podczas ich pierwszego pobytu z dzieckiem. Zapewnia miejsce, w którym rodzina znajdzie spokój i prywatność. Zaoferuj swoim pacjentom dopasowany, wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie do spędzenia pierwszych chwil z nowonarodzonym dzieckiem!



Wszystko od jednego dostawcy:

- elektrycznie regulowane podwójne łóżko z pasującymi szafkami przyłóżkowymi
- nowoczesne łóżeczko dla niemowląt zgodne z normami
- komoda z przewijakiem
- stoły, krzesła, fotele

Spis treści

Pokój rodzinny	4	Szczegóły praktyczne	12
• Wspólne, bezpieczne początki	4	• Akcesoria	12
Łóżeczko dla niemowląt	6	• Zgodne z normami łóżeczko dla niemowląt do stosowania na oddziałach położniczych	13
• Szczęśliwe pierwsze dni dla matki i dziecka	6	Inne zgodne z normami łóżka pediatryczne	13
• Korzyści dla matki	6	• Cuddle	13
• Korzyści dla personelu medycznego: prosta obsługa	7	• Seta pro junior	13
• Optymalne warunki dla bliskiego kontaktu między matką a noworodkiem	8	Wersje wyposażenia i dane techniczne	14
Dobre samopoczucie w pokoju rodzinnym	10	• Sprawdzone i bezpieczne materiały	14
• Indywidualne wyposażenie z jednego źródła	10	• Szczyt górny i dolny w przyjemnych kolorach	14
• Łóżko podwójne Libra partner i szafka przyłóżkowa Combino	10	Grupa Stieglmeyer	15
• Stoły i krzesła w stylu bistro	10		
• Szafy i komody: życie jak w hotelu	11		
• Fotel i wózki transportowe	11		



Pokoje rodzinne stanowią rozszerzenie koncepcji rooming-in i obejmują również drugiego rodzica. W miarę możliwości starsze rodzeństwo również powinno mieć możliwość spędzenia pierwszych chwil razem z niemowlęciem. Badania potwierdzają pozytywny wpływ, jaki system rooming-in wywiera na tworzenie więzi matki z dzieckiem i na karmienie piersią.

Jaafar, Lee, & Ho, 2012; Lvoff, Lvoff, & Klaus, 2000



Jovie

Nowoczesne łóżeczko dla niemowląt

- Odpowiednie dla niemowląt o wzroście do 60 cm i wadze do 12 kg
- Bezpieczne obciążenie robocze 20 kg
- Kąt przechyłu anty-Trendelenburga ok. 13°
- Wysokość ochronna barierki bocznych ok. 27,5–28 cm

Pokój rodzinny

Wspólne, bezpieczne początki

Szafki przyłóżkowe

Komoda z przewijakiem

Szafy



Łóżko podwójne
Libra partner

Łóżeczko dla
niemowląt Jovie

Stoły, krzesła,
fotele



Znaczenie okresu poporodowego jest ważne dla relacji matki z dzieckiem. Cała uwaga powinna być skupiona na dziecku, karmieniu, opiece i pielęgnacji. W tym czasie dobre samopoczucie rodziców jest wzmacniane poprzez więź rodzinną. Zalecane działanie: rozszerzenie oferty pokoi rodzinnych.

Federalne Ministerstwo Zdrowia (2017): „Narodowy cel zdrowotny – zdrowie od momentu narodzin”

◀ Typowe pokoje rodzinne wyposażone są w podwójne łóżko, wygodny fotel do karmienia piersią dla matki, stół, przewijak i dużo miejsca do przechowywania. Bardziej przypominają one pokój hotelowy niż szpitalny.



Ból, strach, oczekiwanie i tży szczęścia – praca na oddziale położniczym zawsze wiąże się z dużymi emocjami. Nowoczesne łóżeczka szpitalne zapewniają spokój i niezawodność w codziennej pracy personelu medycznego.

NASZA OFERTA

- Nowoczesne łóżeczka dla niemowląt o wysokiej jakości i łatwości obsługi
- Zgodne z aktualną normą dla łóżek pediatrycznych
- Wspiera koncepcje rooming-in i więź matka-dziecko, ponieważ niemowlę może być zawsze blisko matki
- Praca bezpieczna dla pleców dzięki regulacji wysokości

Jovie

Szczęśliwe pierwsze dni dla matki i dziecka

Nasze łóżeczko Jovie wspiera etap nawiązywania relacji matka-dziecko bezpośrednio po urodzeniu. Specjaliści od rozwoju zakładają, że matka i dziecko są w tym czasie szczególnie wrażliwi a intensywny kontakt fizyczny ma trwały wpływ na relacje między nimi. Łóżeczko Jovie można otworzyć z obu stron, w zależności od jego położenia. Tworzy to połączenie między łóżeczkiem a podstawą leża łóżka mamy.



▲ Aby opuścić barierkę boczną, można odblokować ją lekkim ruchem ręki.

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ Zalety

- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki sprawdzonej zgodności z normą EN 50637
- Ergonomiczna praca dzięki dużemu zakresowi regulacji wysokości
- Przechylenie do pozycji anti-Trendelenburga, np. dla niemowląt z refluksom
- Łatwe czyszczenie
- Łatwa wymiana przezroczystych paneli bocznych
- Łóżeczko dla niemowląt może być przysunięte bezpośrednio do łóżka matki i umożliwia swobodny dostęp do dziecka

Korzyści dla matki



▲ Łóżeczko Jovie zapewnia noworodkowi bezpieczeństwo, ale także umożliwia fizyczny kontakt z matką w dowolnym momencie.



▲ Jovie można dokładnie dopasować do każdej wysokości łóżka – zawsze równo z powierzchnią leża łóżka matki.

Korzyści dla personelu medycznego: prosta obsługa



▲ Personel medyczny może płynnie regulować wysokość łóżeczka za pomocą dźwigni umieszczonej przy uchwycie szczytu. Cichy system podparcia ze sprężyną gazową nie obudzi niemowlęcia.



▲ Dzięki dobrym właściwościom jezdnym personel może przemieścić łóżko Jovie w dowolne miejsce szybko i bez wysiłku.



▲ Jeśli niemowlę cierpi na refluks w pierwszych dniach życia, pozycja z opuszczonymi nogami do ok. 13° może szybko przynieść ulgę. Pozycję tę również można cicho ustawić za pomocą systemu ze sprężyną gazową.



▲ Spokojna jazda dla dziecka: nowoczesne podwójne kółka z cichym biegiem chronią małego pasażera przed wstrząsami. 4 oddzielne hamulce zapewniają stabilność łóżka Jovie.



▲ Bezpieczna higiena jest kluczowa dla niemowlęcia. Płaska, pozbawiona zagłębień konstrukcja Jovie sprawia, że ręczne czyszczenie jest znacznie łatwiejsze.

Lekko uniesiona pozycja górnej części ciała, np. poprzez ułożenie niemowlęcia w pozycji anti-Trendelenburga po karmieniu piersią, może działać wspomagająco na objawy refluksu.



Wielu rodziców, pierwsze dni z nowo narodzonym dzieckiem postrzega jako bajkę. Wsparcie naszych elektrycznie regulowanych łóżeczek dla niemowląt i łóżek dla dorosłych sprawi, że ten wspaniały czas będzie jeszcze bardziej niezapomniany.

NASZA OFERTA

- Łóżeczko dla niemowląt z regulacją wysokości, które można dostosować do wysokości łóżka matki
- Bezpieczne łóżeczko dla noworodka, które spełnia normy i jest testowane na obecność substancji szkodliwych
- Łóżeczko dla niemowląt można bezpośrednio dosunąć do łóżka matki
- Możliwość zmiany pieluchy w łóżeczku dziecięcym

Optymalne warunki dla bliskiego kontaktu między matką a noworodkiem

Noworodek daje rodzicom tak wielką radość, że często nie mogą oderwać od niego oczu. Nawet gdy niemowlę śpi, przezroczyste panele boczne umożliwiają stały kontakt wzrokowy. Matka leżąca w sąsiednim łóżku zawsze ma swoje dziecko na oku i może budować z nim jeszcze bliższą relację.

Jeśli mama chce wziąć dziecko na ręce w pozycji stojącej lub leżącej, odciąży ją w tym duży, bezstopniowy zakres regulacji wysokości. Szczególnie po cesarskim cięciu kobiety nie powinny podnosić ciężarów. Łóżeczko Jovie pozwala matce przyjąć bezpieczną dla pleców.



- ▲ W pokoju rodzinnym rodzina może wspólnie spędzić pierwsze godziny po porodzie. Ze swojego łóżka matka może łatwo dotknąć dziecka lub wziąć je do siebie, np. aby nakarmić je piersią lub przytulić.




„Niemowlęta rozróżniają kolory! Nawet bezpośrednio po urodzeniu”

wyjaśnia dr Anna Franklin, naukowiec z Surrey Baby Lab, która przeprowadziła badania z użyciem kolorów wśród ponad 250 noworodków. Rezultaty były zdumiewające: noworodki mają już nawet swój ulubiony kolor - czerwony! Naukowcy z Baby Lab podejrzewają, że niemowlęta znają ten kolor już od czasów ciąży i dlatego szczególnie go lubią. W brzuchu matki światło przenika przez ukrwioną ścianę brzucha jak przez ciemnoczerwoną zastonę.



- ▲ Czerwony jest jednym z kolorów dostępnych dla łóżeczka Jovie. Jasne kolory pomagają niemowlętom w wieku od 0 do 4 miesięcy rozwijać zdolności wzrokowe.
- ◀ Jeśli w pokoju pacjenta nie ma dostępnego przewijaka, matka może z łatwością zmienić pieluski dziecka w łóżeczku Jovie.

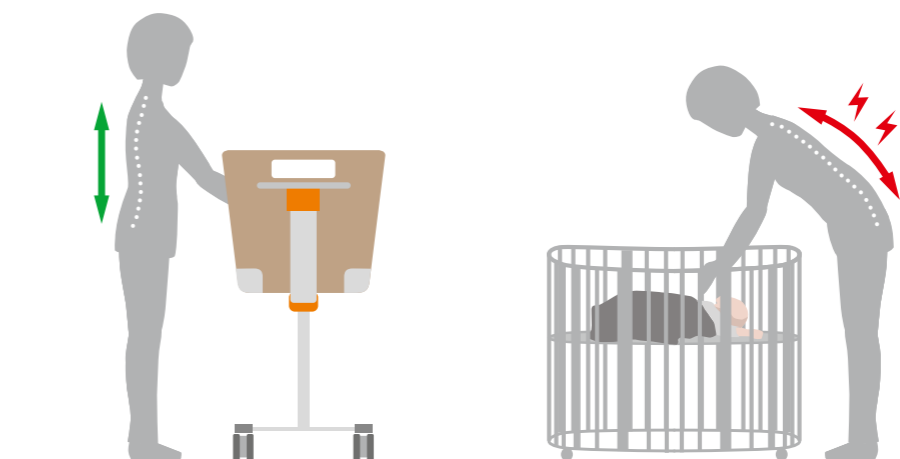

- ▲ Duży zakres regulacji wysokości wspomaga ergonomiczną opiekę nad niemowlęciem.

- ▲ Konwencjonalne łóżeczka dla niemowląt nie mają ergonomicznej regulacji wysokości i mogą obciążać plecy rodziców i personelu medycznego.

Dobre samopoczucie w pokoju rodzinnym

Indywidualne wyposażenie z jednego źródła

Pokój rodzinny dla rodziców i ich nowo narodzonego dziecka powinien wyglądać równie przytulnie i zachęcająco jak ich własny dom. U nas znajdziesz łóżka i meble, które idealnie się uzupełniają i spełniają najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wsparcia.

Łóżko podwójne Libra partner i szafka przyłóżkowa Combino



Rodzice dziecka znajdą spokojny sen i relaksujący wypoczynek w regulowanym elektrycznie podwójnym łóżku Libra partner. Wygodna pozycja siedząca sprzyja spędzaniu czasu z dzieckiem. Na życzenie do łóżka dostępne są tapicerki i ochronne barierki boczne o przyjemnym, domowym wyglądzie.

Dzięki dużej ilości miejsca do przechowywania, szafka przyłóżkowa Combino jest idealnym uzupełnieniem. W ofercie Stiegmeyer do wyboru jest wiele alternatywnych opcji szafek przyłóżkowych do sektora szpitali i domów opieki.



▲ Łóżko podwójne Libra partner o regulowanej wysokości oraz przestronna szafka przyłóżkowa Combino zapewniają niezapomniany komfort w pokoju rodzinnym.

Stoły i krzesła w stylu bistro



Gdy młodzi rodzice zechcą zjeść posiłek lub wypić kawę, idealnym rozwiązaniem będą nasze wygodne krzesła i stoły, które zapewniają przytulną atmosferę jak w ulubionym bistro. Szeroki wybór dekorów i tapicerek komponuje się z każdą koncepcją kolorystyczną.

◀ Stabilny stół kolumnowy idealnie pasuje do naszych krzeseł dostępnych w wielu kolorach i kształtach.

Szafy i komody: życie jak w hotelu



▲ System szaf dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Miejsce do przechowywania ubrań, lodówka na napoje, schowki na walizki i torby – to wszystko oferują nasze szafy i komody. Dzięki temu wyposażeniu młoda rodzina czuje się jak w dobrym hotelu.

W razie potrzeby meble można zawiesić na ścianie, co ułatwi dokładne umycie podłogi. Ciche, wytłumione zamykanie drzwi od mebli nie zakłóca snu niemowlęcia.



Fotele

Jeśli młoda rodzina i jej goście chcieliby usiąść razem i komfortowo spędzić czas, z pewnością docenią zalety naszych foteli. Linia Luna z przytulnymi panelami bocznymi (uszami) oraz polerowanymi drewnianymi podłokietnikami idealnie pasuje do eleganckiego salonu.

Jeśli mama potrzebuje szczególnego wsparcia po porodzie, z pomocą przyjdą fotele na kołach z serii Camado i Ravello, które bez problemu wprowadzą pacjenta do gabinetu zabiegowego lub łazienki.




▲ Fotel z serii Luna zachęca klasyczną elegancją i przytulnością w pokoju rodzinnym.



Jovie

Szczegóły praktyczne

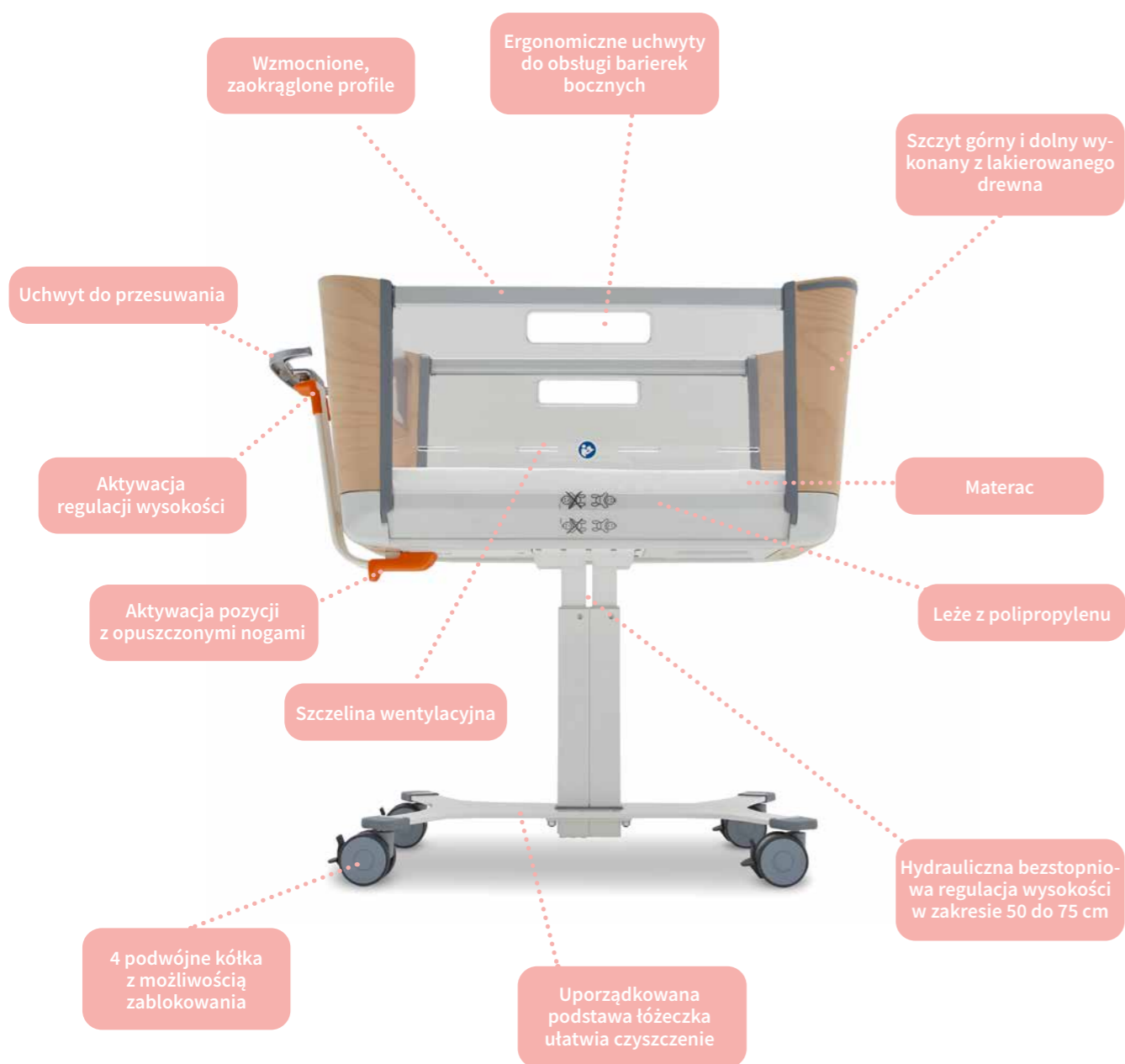

Akcesoria



▲ Kosz.



▲ Materac.

Jovie posiada w standardzie dwa dodatkowe elementy wyposażenia. Wygodny materac z pianki poliuretanowej o grubości 5 cm pozwala dziecku na spokojny sen. Do wewnętrznej strony szczytu dolnego można przymocować wyjmowany kosz. W ten sposób ważne przybory są zawsze pod ręką. Kosz wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego można łatwo i dokładnie wyczyścić.

Zgodne z normami łóżeczko dla niemowląt do stosowania na oddziałach położniczych

Zgodność ze standardami bezpieczeństwa i najlepsza możliwa ochrona pacjentów są zawsze najwyższym priorytetem firmy Stiegemeyer. Dotyczy to szczególnie niemowląt, dzieci i nastolatków, które wymagają dużej uwagi i wsparcia w szpitalu. Starannie dobraliśmy, przetestowaliśmy i certyfikowaliśmy nasze łóżka pediatryczne zgodnie z normą EN 50637 dotyczącą łóżek medycznych

nych dla dzieci. Starsze, dotychczas używane łóżka pediatryczne aktualnie objęte są ochroną prawną, jednak nie ma gwarancji, że ochrona ta będzie utrzymana w przyszłości. Nowa norma zawiera w niektórych obszarach konstrukcyjnych tak znaczące obostrzenia, że zaleca się dostosowanie do niej przyszłych projektów.

Ważne treści nowej normy:

- Dla łóżeczek dla niemowląt wymagane są jednorodne, zamknięte barierki boczne, niedopuszczalne są kraty z prętów
- W przypadku zamkniętych części bocznych wysokość ochronna powinna wynosić co najmniej 27,5 cm
- Brak dostępnych otworów o głębokości ≥ 10 mm i średnicy od 5 do 12 mm
- Odstępy między częściami ruchomymi w obszarze leża muszą być zawsze mniejsze niż 3 mm lub większe niż 25 mm
- Odległości pomiędzy barierką boczną a materacem muszą być obliczone w taki sposób, aby uniknąć zakleszczenia części ciała
- Krawędzie nie mogą powodować uszkodzeń ciała, brak ostrych krawędzi
- Barierki boczne, części boczne i szczyty są sprawdzane pod względem wytrzymałości poprzez testy uderzeniowe

Inne zgodne z normami łóżka pediatryczne



Cuddle

Nasze łóżeczko dziecięce Cuddle daje poczucie bezpieczeństwa i szczęścia. Jest przeznaczone dla dzieci o wzroście do 125 cm. Dzięki jasnym kolorom i fantazyjnej konstrukcji przypomina mały zamek do zabawy, w którym każde dziecko uwielbia przebywać. Wysokie barierki boczne z przezroczystego poliwęglanu lub aluminiowych słupków zapewniają bezpieczną ochronę, a ich płaskie powierzchnie uniemożliwiają niespokojnym pacjentom podciąganie się.



Seta pro junior

Łóżko Seta pro junior pozwala poczuć się jak w domu, a przy tym sprzyja szybkiemu powrotowi do zdrowia. Leże o wymiarach 78 x 180 cm zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla dzieci i młodzieży oraz jest łatwe do manewrowania nawet w małych pomieszczeniach. Pełna automatyzacja funkcji obsługi łóżka Seta pro junior gwarantuje równorzędny poziom komfortu jak model Seta pro. W przypadku, gdy pacjenci mają ograniczoną możliwość poruszania się, standardowe barierki boczne na całej długości leża minimalizują ryzyko urazu spowodowane upadkiem, a ich swobodna obsługa ułatwia pracę personelu medycznego.

Wersje wyposażenia i dane techniczne

Wyposażenie	Dane techniczne
Barierki boczne Przezroczyste panele boczne PETG	Wymiary i masy Wymiary zewnętrzne (dł. × sz.) 95 × 46 cm Wysokość łóżka po zewnętrznej stronie 85,6 - 110,6 cm, Bezpieczne obciążenie robocze 20 kg Waga pacjenta 12 kg Wysokość ochronna bocznego panelu 28 cm Masa własna łóżka 27,3 kg Masa całkowita łóżka 27,8 kg
Szczyty Sklejka bukowa, lakierowana	Zakresy regulacji Kąt przechyłu anty-Trendelenburga ok. 13° Wysokość leża 50 - 75 cm
Kolor Biały	Wymiary materaca Wymiary (dł. × sz. × wys.) 74 × 35,5 × 5 cm Objętość 40 kg/m ² Twardość pianki 4,1 kPa
Odkazanie, stopień ochrony Czyszczenie ręczne, IPX4	
Leża Tworzywo sztuczne PP	
Koła Koło podwójne Ø 75 mm	
Kolory i materiały Kolor podstawy: biały Materiał podstawy: stal	

Sprawdzone i bezpieczne materiały

Wszystkie materiały są biozgodne oraz konsekwentnie testowane na obecność substancji szkodliwych. Nasz materac posiada znak „Textiles Vertrauen” zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100.



Szczyty w miłych i przyjaznych kolorach

Dzięki atrakcyjnym opcjom kolorystycznym i nowoczesnemu wzornictwu, łóżeczko Jovie staje się również wizualnym autem każdego oddziału szpitalnego.



▲ Przytulny design: drewno bukowe, bezbarwny lakier



▲ Neutralny design: szary lakier



▲ Kolorowy design: czerwony lakier

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Grupa Stieglmeyer jest światowym producentem łóżek medycznych dla szpitali, domów opieki i opieki domowej. Dzięki nowoczesnym szafkom przyłóżkowym, meblom i cyfrowym systemom wsparcia jest również dostawcą kompleksowych rozwiązań. Rodzinna firma z powodzeniem rozwija oferty na rynki międzynarodowe w ponad 100 krajach.

Nasze mocne strony:

- rozwój produktu w naszej centrali Herford w Niemczech – produkcja w czterech nowoczesnych fabrykach w Niemczech i Polsce,
- jedna fabryka w Chinach na rynek azjatycki,
- filie i partnerzy handlowi w wielu krajach,
- najwyższej klasy serwis z niezawodnym zaopatrzeniem w części zamienne,
- szkolenia i optymalizacja procesów dla naszych klientów,
- zrównoważone działanie z silnym zaangażowaniem społecznym.

1.100 PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE	11 LOKALIZACJI w Niemczech, Polsce, Holandii, Belgii, Francji, Finlandii, RPA i Chinach	OFERTY dostosowane do wszystkich RYNKÓW
PONAD 125.000 produkowanych łóżek rocznie	Międzynarodowe CERTYFIKATY	
15 LAT dostępności części zamiennych	DYSTRYBUCJA do ponad 100 krajów	NIEMIECKI PROJEKT INŻYNIERYJNY

Nasze specjalizacje

- Szpitalne
- Domy opieki
- Opieka domowa
- Komfortowe łóżka
- Meble funkcyjne
- Serwis

Nasze wartości

- Doświadczenie
- Człowieczeństwo
- Niezawodność
- Dążenie do celu
- Otwartość
- Poczucie własnej wartości

Nasze marki





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siedziba główna / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siedziba główna / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeister GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeister.com
www.burmeister.com

France

Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China

Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com

Na zdjęciach: Jovie – łóżeczko szpitalne dla noworodków

Podmiot prowadzący: Stieglmeyer Sp. z o.o.

Producent: Stieglmeyer GmbH & Co. KG