



## Seta pro

Uniwersalne łóżko szpitalne

**To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją  
używania lub etykietą.**



## Spis treści

---

6 Warianty modelu

---

10 Barierki boczne

---

11 Intuicyjna obsługa

---

12 Szczyty i kolory

---

13 Leże i przedłużenie leża

---

14 Nowe detale

---

15 Niezawodna higiena

---

16 Wyposażenie i opcje, dane techniczne

---

18 Grupa Stieglmeyer

---



## Seta pro

### Klasyczne łóżko dopasowane do ówczesnych wymagań

W wielu szpitalach Seta stanowi synonim jakości, trwałości, łatwości obsługi i wysokiego poziomu komfortu pacjenta. Teraz dokonaliśmy dalszego rozwoju tego klasycznego modelu, by lepiej dostosować go do potrzeb dnia dzisiejszego oraz nadchodzącego jutra. Nacisk został położony na zapewnienie bezpiecznej higieny, a przy tym odciążenie personelu medycznego i technicznego w ich codziennej pracy.



Łóżko Seta pro wyróżnia się udoskonalonym podwoziem o liniowej konstrukcji i płaskich powierzchniach. Jest przeznaczone do mycia ręcznego jak i do automatycznej dezynfekcji. Skrzynka sterująca i akumulator są teraz łatwo dostępne pod leżem w segmencie oparcia pleców, dzięki czemu konserwacja i przeglądy są prostsze i szybsze.

Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa było zawsze przedmiotem zainteresowań łóżek serii Seta. Solidne barierki boczne na całej długości leża pozostają jedną z zalet tego modelu. Prowadnice szynowe barierki bocznych są zintegrowane ze szczytem, dzięki czemu są szczególnie praktyczne i trwałe. Na życzenie dostępne jest również łóżko bez barierki bocznych na całej długości leża. Można je zamontować w późniejszym terminie, jeśli konieczna będzie zmiana opieki nad pacjentem. Podsumowując: łóżko Seta pro to bezpieczna inwestycja w przyszłość, która znacznie usprawni pracę jednostek szpitalnych.




**Seta pro**  
**Standard**  
Model podstawowy

- Zakres regulacji wysokości  
32 - 91 cm (zależy od kół)
- Wysoki poziom bezpieczeństwa:
  - Leże 90 x 200 cm
  - Praca w ergonomicznej pozycji
  - Łatwość w utrzymaniu czystości



**Seta pro**  
**lino**  
Wąskie łóżko

- Zakres regulacji wysokości  
32 - 91 cm (zależy od kół)
- Idealne do małych pomieszczeń:
  - Leże 87 x 200 cm
  - Wymiary zewnętrzne tylko 99,8 x 219,3 cm, bezproblemowy transport przez ościeżnice drzwi
  - Łatwe manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach i pokojach z wieloma łóżkami

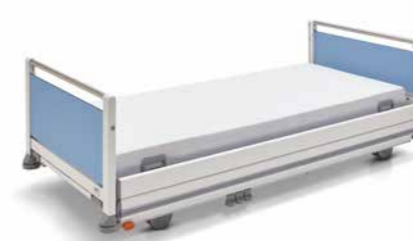


**Seta pro**  
**brevo**  
Łóżko z niską pozycją leża

- Zakres regulacji wysokości  
28 - 84 cm
- Pomaga zapobiegać upadkom:
  - Leże 90 x 200 cm
  - Niska pozycja leża zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych upadkiem z łóżka



**Seta pro**  
**brevo lino**  
Wąskie łóżko z niską pozycją leża

- Zakres regulacji wysokości  
28 - 84 cm
- - Leże 87 x 200 cm
- Połączenie wąskiego łóżka z szerokim zakresem regulacji wariantów lino i brevo

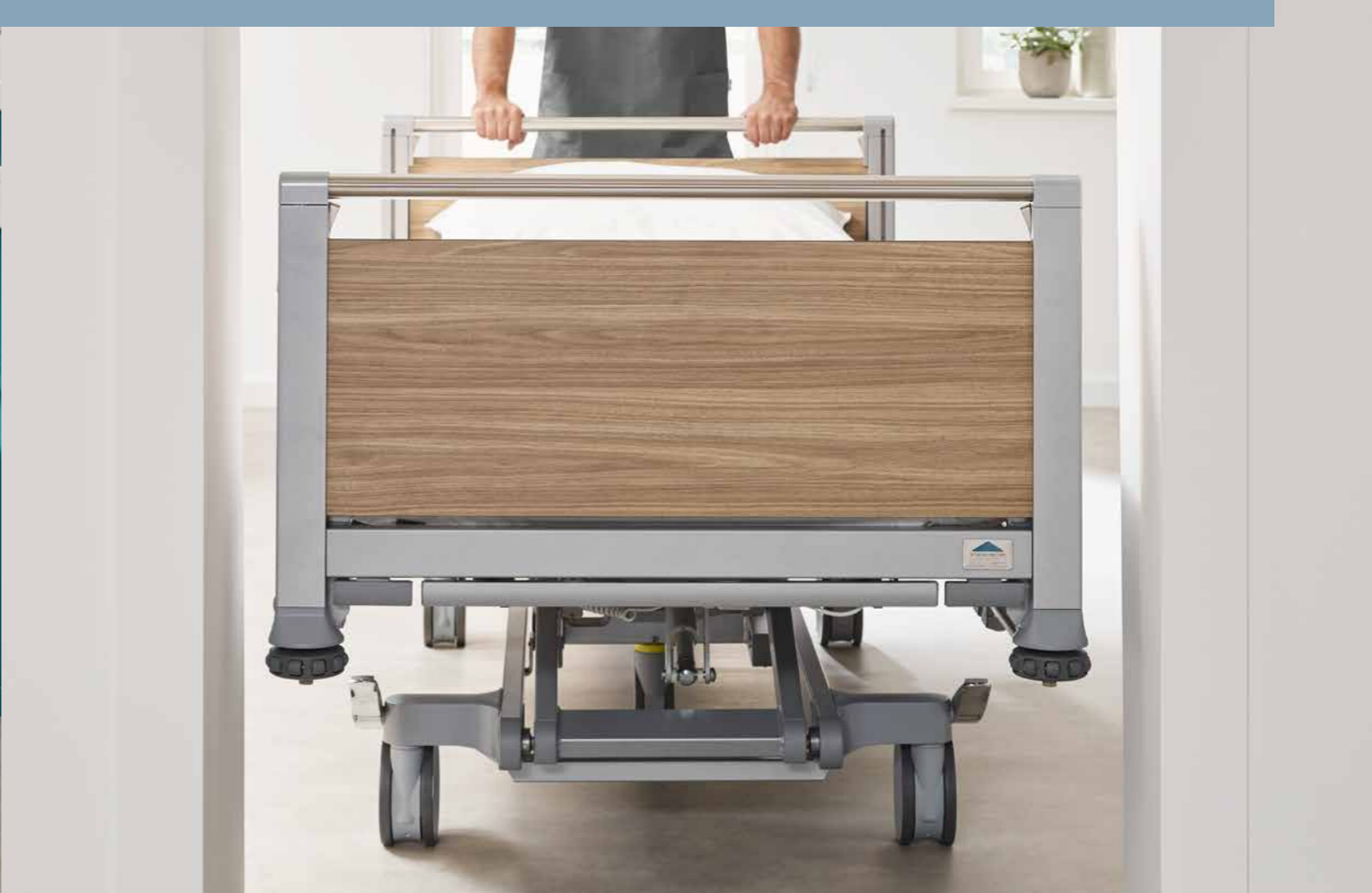


## Seta pro – Standard

### Uniwersalne łóżko szpitalne

Seta pro to solidne łóżko doskonale sprawdzające się na wielu oddziałach szpitalnych. Szeroki zakres regulacji wysokości do 91 cm pozwala nawet wysokiemu personelowi pracować w pozycji ergonomicznej. Zintegrowane barierki boczne na całej długości leża zapewniają najlepszą możliwą ochronę dla pacjentów, którzy są podatni na upadki. Seta pro to łóżko, które można dostosować do własnych potrzeb dzięki inteligentnemu, modułowemu systemowi różnych kół, leży i akcesoriów.

- Bezpieczne obciążenie robocze do 260 kg spełnia również potrzeby cięższych pacjentów
- Pozycja siedząca osiągnięta za pomocą pilota
- Klasyczny, elegancki wygląd

Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:

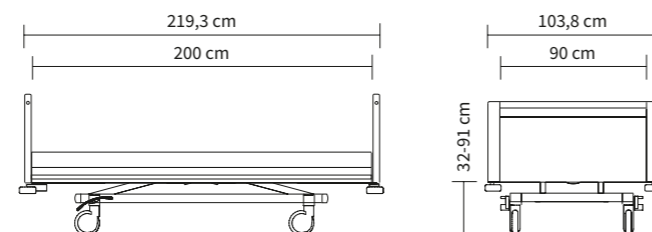



## Seta pro – wariant lino

### Wąskie łóżko

Łóżka w szpitalach często muszą być transportowane do innych pomieszczeń. Manewrowanie może stać się wyzwaniem: ciasne pokoje z wieloma łózkami lub wąskie korytarze, niewystarczająco szerokie aby mogły przejechać dwa łóżka, utrudniają pracę personelu. Węższe łóżko, które również zapewnia pacjentowi wysoki komfort, może rozwiązać wiele z tych problemów. Seta pro lino o szerokości zewnętrznej mniejszej niż 100 cm - jest idealnym wyborem.

- Wymiary zewnętrzne 99,8 x 219,3 cm
- Leże 87 x 200 cm oferuje wysoki poziom komfortu
- Różne warianty kół i opcjonalne 5. koło sprawiają, że manewrowanie łóżkiem w ciasnych pomieszczeniach jest niezwykle łatwe

Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:

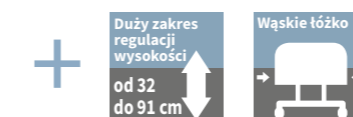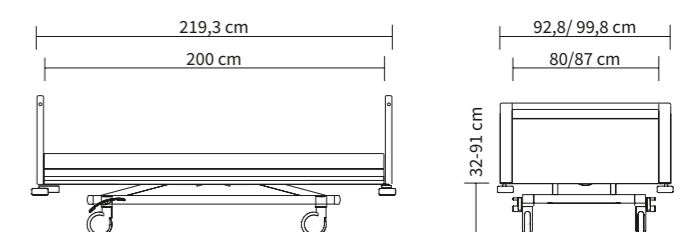




## Seta pro – wariant brevo

### Łóżko z niską pozycją leża

Model Seta pro może być obniżony do wysokości 28 cm, co minimalizuje ryzyko obrażeń jeśli pacjent wypadnie z łóżka. Tak niski poziom leża zapewnia najlepszą możliwą ochronę nawet bez użycia barierek bocznych.

- Łóżko z niską pozycją leża o dużym zakresie regulacji wysokości 28 - 84 cm
- Zawsze na optymalnej wysokości, aby zapobiegać upadkom, bezpiecznie wchodzić i wychodzić z łóżka oraz pracować w pozycji ergonomicznej

Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:

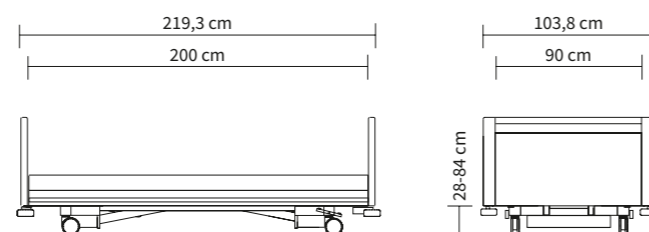


## Seta pro – wariant brevo lino

### Wąskie łóżko z niską pozycją leża

W wielu szpitalach można zaobserwować dwie tendencje: liczba pacjentów utrzymuje się na wysokim poziomie lub wzrasta, ale średnia długość pobytu spada. Tak szybkie zmiany wymagają większej elastyczności, nawet jeśli chodzi o łóżka. Wariant brevo lino jest wąskim łóżkiem o niskiej wysokości, które jest w stanie sprostać tym wymogom. Może być szybko przetransportowane w dowolne miejsce i spełnia różne potrzeby ochrony pacjentów.

- Szerokość zewnętrzna 99,8 cm w połączeniu z niską pozycją leża regulowaną w zakresie od 28 do 84 cm
- Poręczne i łatwe w manewrowaniu
- Niska pozycja leża minimalizuje skutki upadków

Wymiary zewnętrzne / zakres regulacji wysokości:

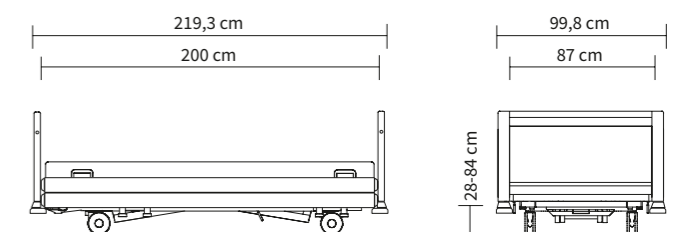



▲ Tylko Seta pro oferuje barierki boczne na całej długości leża.

## Barierki boczne

### Ochrona i stabilność we wszystkich sytuacjach

Barierki boczne na całej długości leża dostępne dla modeli Seta pro zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać maksymalną ochronę pacjentom podatnym na upadki. Imponująca jest także ich wyjątkowa stabilność i trwałość: to łóżko jest jedynym modelem, w którym szyny są bezpośrednio zintegrowane ze szczytami. Poruszają się płynnie, cicho i, w przeciwieństwie do innych systemów bezpieczeństwa, nie wymagają dodatkowej przestrzeni po bokach łóżka podczas regulacji lub opuszczania.

- Podczas korzystania z funkcji przedłużenia leża, barierki boczne rozszerzane są bez użycia narzędzi
- Barierki boczne o wysokości 41 cm pozwalają zastosować, materace przeciwoleżynowe, zmiennociśnieniowe
- Gładkie powierzchnie barierek bocznych są łatwe w utrzymaniu czystości

▼ Podczas korzystania z przedłużenia leża, szyny można wyciągnąć w celu ich przedłużenia.



▼ Pacjenci mogą mieć lepszy widok, ponieważ barierki boczne można również ustawić po przekątnej.



## Intuicyjne sterowanie

### Dostosowane do każdego użytkownika

Seta pro może być obsługiwana intuicyjnie i bezpiecznie przez personel i pacjentów. Zarówno standardowy pilot podręczny z prostymi piktogramami, jak i nowoczesny pilot podręczny LCD z 3 przyciskami i dużym czytelnym wyświetlaczem sprawdzają się w każdej, nawet stresującej sytuacji. Dodatkowe funkcje obsługi i zarządzania są dostępne w skrzynce blokującej lub opcjonalnym panelu centralnym, znajdującym się w półce na pościel.



◀ Standardowy pilot podręczny z intuicyjnymi piktogramami. Dostępny jest również z podświetlonymi przyciskami (opcja).



▲ Pilot podręczny LCD (opcja) oferuje 3 oddzielnie sterowane poziomy kontrole: dla pacjenta, personelu i serwisu.

▼ Skrzynka blokująca służy do blokowania i odblokowywania poszczególnych opcji regulacji.



▼ Panel centralny (opcja) łączy wszystkie funkcje sterowania łóżkiem.




## JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ


### EasyCare odciąża opiekunów

- Pilot z wyświetlaczem LCD zawiera 3 poziomy obsługi dla pacjentów, personelu medycznego i serwisu.
- Personel medyczny może blokować i ukrywać niektóre funkcje regulacji dla pacjentów.
- Dzięki funkcji EasyCare opcjami można zarządzać na poziomie dostępnym dla opiekunów, bez modyfikacji statusu blokady dla pacjenta. Wiąże się to z ogromną oszczędnością czasu opiekunów i dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

## Włączanie funkcji

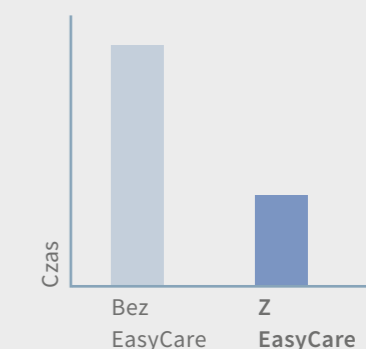

◀ Opcjonalne sterowanie nożne umożliwia łatwą regulację wysokości łóżka za pomocą stopy.

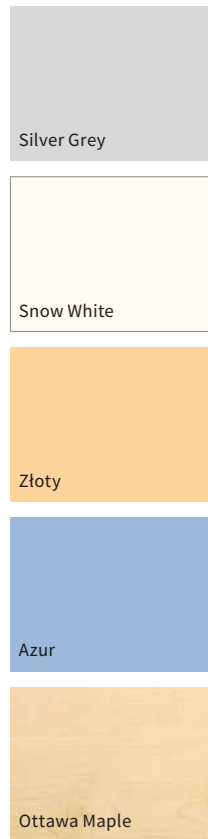

## Szczyty i kolory Stylowy i praktyczny design

▲ Szczyty „Base” idealnie pasują do każdego pomieszczenia.

Wszystkie łóżka Seta pro są standardowo wyposażone w elegancki szczyt „Base” z praktycznym uchwytem. Klienci mogą wybierać spośród szerokiej oferty kolorów i drewnianych dekorów, aby idealnie dopasować łóżko Seta pro do wystroju danego oddziału.

- Szczyty są łatwo demontowalne, co umożliwia szybki dostęp do pacjenta
- Szczyty po zdemontowaniu umożliwiają wsparcie w resuscytacji



▲ Aby zdemontować szczyt należy zdjąć jego uchwyt, który jest zamocowany za pomocą systemu zatrzaskowego.



▲ Wypełnienie szczytu można następnie wyciągnąć i wykorzystać jako pomoc w nagłych wypadkach np. w resuscytacji.

## Leże i przedłużenie leża Komfort i optymalna higiena

Model łóżka Seta pro oferuje trzy rodzaje leża, dostosowane do potrzeb każdego pacjenta. Leże higieniczne wykonane jest z lekkich paneli z polipropylenu, które można łatwo wyjąć i wyczyścić. Leże wypełnione tworzywem HPL zostało podzielone na cztery sekcje, które można na żądanie zabezpieczyć przed zdjęciem. Oba powyższe modele posiadają wycięcia, zapewniające obieg powietrza. Trzecią alternatywą jest solidna podstawa leża z metalowej kratki, która idealnie dostosowana jest do automatycznej dezynfekcji. Zintegrowane przedłużenie leża o 22,5 cm oraz wysuwane barierki boczne stanowią wyposażenie standardowe, natomiast przedłużenie segmentu podudzia i dopasowany materac - są dostępne jako wyposażenie opcjonalne.



▲ Higieniczne leże wykonane z paneli z polipropylenu.

▼ Leże wypełnione metalową kratką.



▼ Leże wypełnione tworzywem z płyty HPL.



▲ Zintegrowane przedłużenie leża można w szybki i łatwy sposób wysunąć, by zapewnić wysokim pacjentom niezbędną przestrzeń. Przedłużenie segmentu podudzia oraz dopasowany materac stanowią wyposażenie opcjonalne.



▲ Przedłużenie segmentu podudzia (opcja) przesuwa się wraz z segmentem podudzia podczas regulacji, dzięki czemu wysoki pacjent może przyjąć również pozycję uniesionych nóg.



## Nowe detale

### Zwrotność i łatwość serwisowania

Seta pro zawiera wiele innowacyjnych detali, które zostały opracowane w celu ułatwienia codziennej pracy oraz wszystkich zadań związanych z serwisowaniem. Praktyczne szczegóły odciążają personel i pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.

- Opcjonalne 5. koło zapewnia dodatkową stabilność podczas transportu pacjenta, niezależnie od tego czy personel prowadzi łóżko od strony głowy czy nóg
- Krążki odbojowe (standard) chronią łóżko przed uszkodzeniem na skutek kolizji lub podczas regulacji wysokości
- Opcjonalny pilot podręczny LCD z funkcją EasyCare umożliwia personelowi pełny dostęp do regulacji łóżka i zawiera wiele opcji wsparcia na poziomie technicznym
- Elektroniczne podzespoły łóżka znajdują się pod leżem w segmencie oparcia pleców
- Dwie tuleje od strony głowy na wieszak kroplówki oraz wysięgnik z uchwytem do ręki
- Dodatkowe dwie tuleje od strony nóg na wieszak kroplówki.

▼ Łatwo dostępne elektroniczne podzespoły łóżka.




▼ Pilot podręczny LCD z poziomem technicznym do łatwej analizy błędów.



▼ Stożkowe krążki odbojowe zabezpieczają przed kolizją.



#### JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ Zalety 5. koła

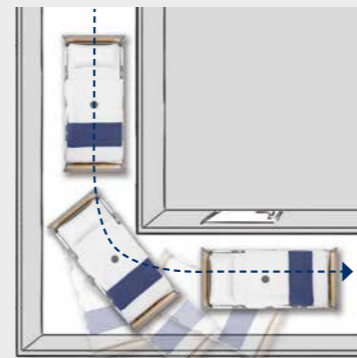

W przypadku szybkiego przejazdu przez zakręt na pacjenta mogą oddziaływać duże siły odśrodkowe. 5-te koło, pełniące rolę kółka kierującego, zapewnia jeszcze efektywniejsze pozostawienie łóżka Seta pro na torze jazdy i zapobiega odjeżdżaniu łóżka na bok.

## Niezawodna higiena

### Idealne do ręcznej i automatycznej dezynfekcji



◀ Wszystkie elementy konstrukcyjne łóżka są łatwo dostępne, co zapewnia precyzyjne czyszczenie.

**10 x więcej czyszczenia niż standardowe wymagania**



◀ Zakryte kable w serii Seta pro tworzą gładkie powierzchnie.

Doskonałe właściwości higieniczne serii Seta zostały jeszcze bardziej udoskonalone w Seta pro. Duże, płaskie powierzchnie i zakryte elektroniczne podzespoły znacznie ułatwiają czyszczenie ręczne i dezynfekcję. Opcjonalne warianty modeli przeznaczonych do automatycznej dezynfekcji mają jeszcze wiele innych zalet:

- Bezpieczna higiena dla skutecznej ochrony przed drobnoustrojami
- Wysoki standard IPX6W chroni elementy elektryczne przed wilgocią
- Mniejsze obciążenie personelu poprzez eliminację ręcznego czyszczenia
- W razie potrzeby, serwis Stieglmeyer oferuje współpracę w celu opracowania najlepszego możliwego rozwiązania w zakresie automatycznej dezynfekcji w danej placówce.



# Wyposażenie i opcje

Seta pro	Standard	lino	brevo	brevo lino
<b>Wysokość leża</b>				
Standardowy zakres regulacji leża (ok. 35 - 91 cm)	✓	✓	-	-
Zakres regulacji leża (ok. 28 - 84 cm)	-	-	✓	✓
<b>Szerokość leża</b>				
103,8 cm, materac 90 cm	✓	-	✓	-
99,8 cm, materac 87 cm	-	✓	-	✓
<b>Barierki boczne</b>				
Na całej długości leża	✓	✓	✓	✓
<b>Szczyty</b>				
Base	✓	✓	✓	✓
<b>Kolor ramy</b>				
Biały NCS S0500N	✓	✓	✓	✓
Argentum, zbliżony do RAL 9006	0	0	0	0
<b>Dezynfekcja, stopień ochrony</b>				
Mechaniczna dezynfekcja, IPX6	✓	✓	✓	✓
Automatyczna dezynfekcja, IPX6W	0	0	0	0
<b>Leże</b>				
Higieniczne leże z polipropylenu	✓	✓	✓	✓
Higieniczne leże z polipropylenu z otworami na system pasów	0	0	✓	0
Leże wypełnione płytą HPL z otworami na system pasów	0	0	0	0
Leże wypełnione metalową kratką (na stałe lub demontowalna)	0	0	0	0
<b>Stożkowe krążki odbojowe</b>				
Stożkowe krążki odbojowe (plastikowe)	✓	✓	✓	✓
Stożkowe krążki odbojowe (uniwersalne)	0	0	0	0
2 uniwersalne od strony głowy, 2 plastikowe od strony nóg	0	0	0	0
<b>Koła</b>				
Zintegrowane koła o średnicy 150 mm	✓	✓	-	-
Antystatyczne podwójne koła o średnicy 150 mm	0	0	-	-
Podwójne koła Linea o średnicy 150 mm	0	0	-	-
Podwójne koła Linea o średnicy 125 mm	-	-	✓	✓
<b>5. koło</b>				
Podwójne koło o średnicy 125 mm	0	0	-	-
<b>Przewodząca powłoka kół</b>				
1 koło	✓	✓	✓	✓
2 koła	0	0	0	0
4 koła	0	0	0	0
5 kół	0	0	-	-
<b>Dźwignia hamulca</b>				
2 x odlew ciśnieniowy, chromowany	✓	✓	✓	✓
2 x odlew ciśnieniowy, chromowany z kolorowym oznaczeniem	0	0	0	0
4 x odlew ciśnieniowy, z kolorowym oznaczeniem lub bez	0	0	0	0
<b>Położenie koła z blokadą kierunkową</b>				
Przód, prawy	✓	✓	✓	✓
Przód, lewy	0	0	0	0
Tył, prawy	0	0	0	0
Tył, lewy	0	0	0	0
Pośrodku łóżka	0	0	-	-

Seta pro	Standard	lino	brevo	brevo lino
<b>Elementy obsługi</b>				
Standardowy pilot podręczny <sup>1)</sup>	✓	✓	✓	✓
Standardowy pilot podręczny, podświetlany <sup>1)</sup>	0	0	0	0
Pilot podręczny LCD	0	0	0	0
Skrzynka blokująca w półce na pościel	0	0	0	0
Panel centralny w półce na pościel	0	0	0	0
Sterowanie nożne	0	0	-	-
<b>System Out-of-Bed</b>				
Tak	0	0	0	0
<b>Dodatkowe cechy</b>				
Standardowa listwa przesuwana	0	0	0	0
Półka na pościel	✓	✓	✓	✓
Przedłużenie leża	✓	✓	✓	✓
<b>Funkcje elektroniczne</b>				
Sygnał hamulca	0	0	0	0
Światło pod łóżkiem	0	0	0	0
Pilot satelita	0	0	0	0
Kąt odchylenia oparcia pleców na pilocie podręcznym LCD	0	0	0	0
<b>Bateria</b>				
Bateria ołowiowo-kwasowa	✓	✓	✓	✓
Bateria litowo-jonowa	0	0	0	0

## Dane techniczne

Seta pro	Standard	lino	brevo	brevo lino
<b>Dane podstawowe</b>				
Wymiary zewnętrzne	ok. 103,8 x 219,3 cm	ok. 99,8 x 219,3 cm	103,8 x 219,3 cm	99,8 x 219,3 cm
Wymiary leża (wymiary materaca)	ok. 90 x 200 cm	ok. 87 x 200 cm	90 x 200 cm	87 x 200 cm
Przedłużenie leża	ok. 22,5 cm <sup>2)</sup>	ok. 22,5 cm <sup>2)</sup>	ok. 22,5 cm <sup>2)</sup>	ok. 22,5 cm <sup>2)</sup>
Podział sekcji leża	ok. 83 - 15 - 33 - 54 cm	ok. 83 - 15 - 33 - 54 cm	ok. 83 - 15 - 33 - 54 cm	ok. 83 - 15 - 33 - 54 cm
Autoregresja oparcia pleców	ok. 10 cm	ok. 10 cm	ok. 10 cm	ok. 10 cm
Bezpieczne obciążenie robocze	ok. 260 kg	ok. 260 kg	ok. 260 kg	ok. 260 kg
Maksymalna waga pacjenta	ok. 220 - 250 kg	ok. 220 - 250 kg	ok. 220 - 250 kg	ok. 220 - 250 kg
Prześwit do podłogi	ok. 16,9 cm	ok. 16,9 cm	ok. 14,3 cm	ok. 14,3 cm
Prześwit do podłogi (z kołami Linea o średnicy 150 mm)	ok. 14,1 cm	ok. 14,1 cm	-	-
Waga całkowita	ok. 155 kg	ok. 155 kg	ok. 155 kg	ok. 155 kg
Wysokość zabezpieczenie bocznego	ok. 41 cm	ok. 41 cm	ok. 41 cm	ok. 41 cm
<b>Regulacje</b>				
Kąt przechyłu Trendelenburga	ok. 0 - 17°	ok. 0 - 17°	ok. 0 - 17°	ok. 0 - 17°
Kąt przechyłu anty-Trendelenburga	ok. 0 - 17°	ok. 0 - 17°	ok. 0 - 16°	ok. 0 - 16°
Zakres regulacji wysokości leża	ok. 35 - 91 cm	ok. 35 - 91 cm	ok. 28 - 84 cm	ok. 28 - 84 cm
Zakres regulacji wysokości leża (z kołami Linea o średnicy 150 mm)	ok. 32 - 88 cm	ok. 32 - 88 cm	-	-
Kąt odchylenia oparcia pleców	ok. 0 - 70°	ok. 0 - 70°	ok. 0 - 70°	ok. 0 - 70°
Kąt odchylenia oparcia uda	ok. 0 - 40°	ok. 0 - 40°	ok. 0 - 40°	ok. 0 - 40°
Uniesiona pozycja nóg	ok. 0 - 16°	ok. 0 - 16°	ok. 0 - 16°	ok. 0 - 16°

# Praktyczne akcesoria dodatkowe dla łóżka szpitalnego Seta pro

## Szafka przyłóżkowa Quado



▲ Wąska szafka przyłóżkowa Quado jest idealna do szpitalnej codzienności w pomieszczeniach, w których jest mało miejsca. Zintegrowany z nią blat boczny można w łatwy i cichy sposób złożyć, kiedy nie jest używany. Quado może być używana również jako wózek do leków, na środki czyszczące albo stolik oddziałowy. Przy przechowywaniu kilku szafek przyłóżkowych Quado można je bez problemu wsunąć jedna w drugą.

## Soreno eco



◀ Szafka przyłóżkowa Soreno eco zachęca przestronną i wszechstronną przestrzenią do przechowywania. Jest dostępna w wersji ze składanym blatem bocznym i bez blatu bocznego.

## Materac zmiennociśnieniowy



▲ Materac zmiennociśnieniowy, powietrzno-komorowy dla pacjentów obłożnie chorych zapewnia optymalną profilaktykę przeciwdrobnoustrojową.

## Materace

Firma Stiegmeyer posiada w swojej ofercie materace dopasowane do każdego zastosowania. Zapraszamy do skorzystania z nowoczesnej profilaktyki przeciwdrobnoustrojowej. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej: [www.stiegmeyer.com](http://www.stiegmeyer.com).

Zachęcamy do kontaktu!



To może być interesujące!

# STIEGMEYERGROUP



## Solutions for people who care

Grupa Stiegmeyer jest światowym producentem łóżek medycznych dla szpitali, domów opieki i opieki domowej. Dzięki nowoczesnym szafkom przyłóżkowym, meblom i cyfrowym systemom wsparcia jest również dostawcą kompleksowych rozwiązań. Rodzinna firma z powodzeniem rozwija oferty na rynki międzynarodowe w ponad 100 krajach.

### Nasze mocne strony:

- rozwój produktu w naszej centrali Herford w Niemczech – produkcja w czterech nowoczesnych fabrykach w Niemczech i Polsce,
- jedna fabryka w Chinach na rynek azjatycki,
- filie i partnerzy handlowi w wielu krajach,
- najwyższej klasy serwis z niezawodnym zaopatrzeniem w części zamienne,
- szkolenia i optymalizacja procesów dla naszych klientów,
- zrównoważone działanie z silnym zaangażowaniem społecznym.

### Nasze specjalizacje

- Szpitalne
- Domy opieki
- Opieka domowa
- Komfortowe łóżka
- Meble funkcyjne
- Serwis

### Nasze wartości

- Doświadczenie
- Człowieczeństwo
- Niezawodność**
- Dążenie do celu
- Otwartość
- Poczucie własnej wartości

1.100

PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

11

LOKALIZACJI w Niemczech, Polsce, Holandii, Belgii, Francji, Finlandii, RPA i Chinach



OFERTY dostosowane do wszystkich RYNKÓW

PONAD

125.000

produkowanych łóżek rocznie

Międzynarodowe CERTYFIKATY

15 LAT

dostępności części zamiennych

DYSTRYBUCJA do ponad 100 krajów



NIEMIECKI PROJEKT INŻYNIERYJNY

### Nasze marki





# STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



## Siedziba główna / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185-0  
Fax +49 (0) 5221 185-100  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com



## Siedziba główna / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Burmeister GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 53  
32120 Hiddenhausen  
Phone +49 (0) 5223 9769-0  
Fax +49 (0) 5223 9769-090  
info@burmeister.com  
www.burmeister.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
16 Avenue de l'Europe  
Bâtiment SXB1  
67300 Schiltigheim  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.**  
The Estuaries - Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl

*China*  
**Stieglmeyer China Co. Ltd.**  
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road  
Dongping New Town, Shunde District  
528300 Foshan  
Phone +86 757 29878710 - 0  
info@stieglmeyer.cn  
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com

**Na zdjęciach:** Seta pro – uniwersalne łóżko szpitalne

**Podmiot prowadzący:** Stieglmeyer Sp. z o.o.

**Producent:** Stieglmeyer GmbH & Co. KG