

BESLIST BETER



Evario one

Het economische ziekenhuisbed

Internationale editie

STIEGELMEYERGROUP



Evario one

Het economische bed voor dagelijks gebruik in het ziekenhuis

“Als inkoper denk ik op lange termijn en over afdelingen heen. Dit is de enige manier waarop ik optimaal in de behoeften kan voorzien en knelpunten kan voorkomen. Stieglmeyer ondersteunt mij actief in deze manier van werken. De Evario one is de juiste investering voor een langetermijnrelatie.”



Adam Smith
Inkoopmanager

Uw doorslaggevende voordelen

Om de stress en de fysieke belasting in het dagelijkse ziekenhuisleven te verminderen, moeten medische hulpmiddelen voor het grootste deel dezelfde sterke punten hebben:

- **Veiligheid**
- **Gemakkelijk te bedienen**
- **Optimale ondersteuning voor patiënten en zorgmedewerkers**

Bij de ontwikkeling van de Evario one hebben we ons op deze essentiële voordelen geconcentreerd. Het volledig motorisch verstelbare ziekenhuisbed verenigt vele nuttige functies, ontlast het personeel en ondersteunt economisch werken.

Moderne zijheksystemen en specifieke bedieningsvarianten voldoen aan een breed scala van eisen. De Evario one kan bijna overal worden ingezet.



Inhoud

Economische voordelen	4	Comfort voor de patiënten	14
Productontwikkeling	5	• Eenvoudige bedverstelling met het “bedieningspaneel light”	14
Voordelen voor de zorgverleners	6	• Ergonomische bediening van de handschakelaar	14
• Het gedeelde ¾-zijhek	6	• Verlichting onder het bed	15
• Het doorlopende ¾-zijhek	7	• Verder gemak	15
• Ergonomisch werken op heuphoogte	8	Veilige hygiëne	16
• Mobilisatie voor een sneller herstel	8	Technische service	17
• Valpreventie 's nachts	9	Accessoires	17
• Ruimte voor accessoires	9	Nuttige andere producten	18
Individuele bedieningsconcepten	10	Uitvoeringen en opties	19
• Eenvoudige bediening met het “bedieningspaneel light”	10	Technische gegevens	22
• Bediening met ergonomische handschakelaar	10	De Stieglmeyer-groep	23
• CPR en Trendelenburgpositie met ontgrendelmagneet	10		
• Hoogteverstelling met voetschakelaar	10		
• Bedieningsmodule	11		
• Snelle verstelling bij noodgevallen	11		
• Goede rij-eigenschappen, zelfs in kleine ruimtes	12		
• Eenvoudig patiënttransport	12		
• Medische opslag	13		
• Bed-en onderbeenondersteuning	13		



Variant met gedeelde zijheksen

Bescherming en mobilisatie

- **Ligvlak (matrasmaat):** 87 x 200 cm
 - Buitenbreedte minder dan 1 meter
 - Gedeelde ¾-zijheksen
 - Aan hoofdeinde omhoog gezet zijhek kan als mobilisatiesteun dienen
 - Bediening met handschakelaar, geïntegreerd bedieningspaneel of bedieningsmodule



Variant met doorlopende zijheksen

Plaatsbesparend in kleine ruimtes

- **Ligvlak (matrasmaat):** 87 x 200 cm
 - Buitenbreedte minder dan 1 meter
 - Doorlopende ¾-zijheksen
 - Bediening met de handschakelaar of bedieningsmodule
 - Opgehangen accessoires zijn altijd zichtbaar

“Bij alle investeringsbeslissingen bestaat er een economisch risico. Ik kijk dus naar de bruikbaarheid op de lange termijn en natuurlijk ook de prijs. In Duitsland ontwikkelde producten hebben wat betreft kwaliteit en duurzaamheid terecht een uitstekende reputatie.”

Henry Jones
Management

Ons aanbod

- Getest kwaliteitsbed
- Lage opvolgkosten dankzij duurzaam product
- Zorgverleners zullen een snelle en gemakkelijke bediening op prijs stellen
- De medische en technische dienst profiteren van een lage foutgevoeligheid en goede hygiënische eigenschappen
- Service na aankoop gegarandeerd

Economische voordelen dankzij een hoge kwaliteit

Stieglmeyer is de toonaangevende Duitse producent van ziekenhuisbedden en combineert sinds 1900 traditie met innovatie. Meer dan 120 jaar ervaring, nieuwe ideeën en bovengemiddelde kwaliteitsnormen kenmerken ook de economische Evario one. Dankzij zijn duurzaamheid en geringe reparatie-inspanningen bespaart hij kosten gedurende zijn gehele gebruikscyclus.

In ons ontwikkelingscentrum in Herford werden alle componenten veel intensiever getest dan de standaardvereisten, om zodoende hun duurzaamheid te bevestigen. Mogelijke schade aan het bed wordt door de intelligente constructie, bijv. door het vast geïntegreerde, valveilige bedieningspaneel, al bij voorbaat voorkomen.

LINAK  Inside
WE IMPROVE YOUR LIFE

Power from Denmark - in onze ziekenhuisbedden installeren we hoogwaardige aandrijvingen van LINAK, de toonaangevende internationale aanbieder van elektromotorische oplossingen voor bedden en meubels. Bij LINAK zijn alle producten grondig getest en voldoen aan internationale medische standaarden. Tegelijkertijd verbruiken ze weinig energie, besparen ze kosten en beschermen ze het milieu.



▲ Het optionele remsignaal voorkomt dat een ongeremd bed bij het wegrijden de stekker uit de muur trekt.



▲ De stootkegels en -rollen minimaliseren de kans op schade bij botsingen tijdens het rijden en de hoogtevastelling.

Productontwikkeling Wij testen strikter dan de norm



Belastingstest hoofd- en voeteneinde

- In het midden van het hoofdeinde wordt een klauw bevestigd die hoge druk uitoefent.
- Het bed is stevig vastgezet, zodat het niet van zijn plaats kan bewegen.
- In 100 cycli wordt het hoofdeinde steeds 30 seconden lang belast met een drukkracht van 500 newton (komt hier overeen met ca. 51 kg) en heen en weer getrokken.
- Bevestigingsbouten en andere onderdelen moeten de test zonder enige schade doorstaan.



Belastingtest wielen

- Het bed wordt belast met 1400 newton (gelijk aan ca. 143 kg) en ongeremd op de rollenbank geplaatst.
- De rollenbank simuleert een ononderbroken rijbeweging van 5 uur.
- Er mag geen schade aan wielen, de remmen of andere structurele onderdelen optreden.



Belastingstest ligvlak en aandrijvingen

- Het bed wordt belast met het gewicht van zijn veilige werklust (250 kg).
- Alle in de gebruikershandleiding vermelde verstelmogelijkheden die bepaalde eisen stellen, worden in duurtesten van 3000 cycli bewogen.
- Vervolgens moeten alle verstelmogelijkheden nog steeds werken. De aandrijving en de stevigheid van het bed mogen niet worden beïnvloed.



Belastingstest zijhekken

- Een slingergewicht van 25 kg slaat 25 keer van een afstand van 1,60 m tegen het zijhek.
- Het zijhek moet vervolgens nog steeds goed functioneren. Er mogen geen beschadigde of losgeraakte onderdelen zijn.



Belastingstest handschakelaar

- De knoppen van de handschakelaar worden in 250.000 cycli bediend.
- Dit komt overeen met een veelvoud van het aantal dat tijdens de levensduur van het bed is te verwachten - voor de vaak verplaatste rugleuning gaat men bijv. uit van ongeveer 24.000 verstellingen.
- De functionaliteit van de handschakelaar moet volledig behouden blijven.

Voordelen voor de zorgverleners

Gemakkelijk en veilig te gebruiken zijhekken



▲ Het gedeelde $\frac{3}{4}$ -zijhek is ook met één hand eenvoudig te bedienen en omlaag te zetten.



▲ Het verlagen van slechts één element in het midden van het bed is voldoende om de patiënt in staat te stellen ongehinderd in en uit te stappen.



▲ Met het ontgrendelmechanisme aan het voeteneinde kan het doorlopende $\frac{3}{4}$ -zijhek snel worden ontgrendeld en neergelaten.



▲ De dunne balken bewegen gemakkelijk en stil - en laten een vrij zicht in de kamer toe.

Het gedeelde $\frac{3}{4}$ -zijhek

Bediening met één hand in elke situatie

Een zorgverlener moet de zijhekken in het dagelijks leven snel kunnen laten zakken - ingewikkelde mechanismen of klemmende elementen zouden een enorme last zijn. Met ons gedeelde $\frac{3}{4}$ -zijhek hoeft de zorgverlener alleen het deel in het midden van het bed met één hand eenvoudig en rustig te laten zakken, en de patiënt kan opstaan. Ook het element aan het hoofdeinde kan worden neergelaten.



Bediening met één hand



geluidsarm



▲ Het gedeelde $\frac{3}{4}$ -zijhek biedt bescherming volgens de norm en beschermt een groot deel van het ligvlak. Voor onrustige patiënten is er aan het voeteneinde een opvulstuk verkrijgbaar om de opening te dichten.

Het doorlopende $\frac{3}{4}$ -zijhek

Gemakkelijk neer te laten en omhoog te zetten

De ruimte rond het ziekenhuisbed is belangrijk, vooral in kleinere kamers, omdat deze nodig is voor nachtkastjes, voor het mobiliseren van de patiënt en voor therapie sessies. Het doorlopende $\frac{3}{4}$ -zijhek van de Evario one neemt geen extra ruimte in beslag wanneer het neergelaten is. Het zwaait moeiteloos parallel aan het bed naar beneden. Dankzij de uiterst dunne balken heeft de patiënt een vrije blik in de kamer of uit het raam.



▼ Ook als het zijhek is neergelaten, blijven de opgehangen accessoires goed zichtbaar.



▲ Indien gewenst zorgt een opvulstuk aan het voeteneinde voor een aansluitende bescherming.

“Ik hou ervan mensen te helpen, het liefst in een zeer gemotiveerd team. Het Evario one-ziekenhuisbed, dat we elke dag bedienen, helpt ons hier enorm bij!”

Laila Tamin
Afdelingshoofd

Ons aanbod

- Eenvoudige, intuïtieve bediening
- Gemakkelijk te verplaatsen en bedienen, elektrisch verstelbaar
- Aanpasbaar aan patiënten en personeel van verschillende lengtes, ook geschikt voor hoog lichaamsgewicht
- Afzonderlijk aanpasbare accessoires
- Gemakkelijk te desinfecteren

Ergonomisch werken op heuphoogte




Rugaandoeningen behoren tot de ernstigste gezondheidsproblemen van werknemers in de zorg. Met zijn hoogterverstelling tot 82 cm stelt de Evario one zelfs zeer lange mensen in staat rechtop te werken op heuphoogte, wat de rug ontlast.

Spier- en skeletaandoeningen zijn verantwoordelijk voor 20% van de ziekteverzuimdagen onder verpleegkundigen.

Gezondheidsverslag 2019 van de Techniker Krankenkasse

▲ De optimale individuele werkhogte is traploos instelbaar met een van de bedieningselementen of met de voetschakelaar.

Mobilisatie voor een sneller herstel

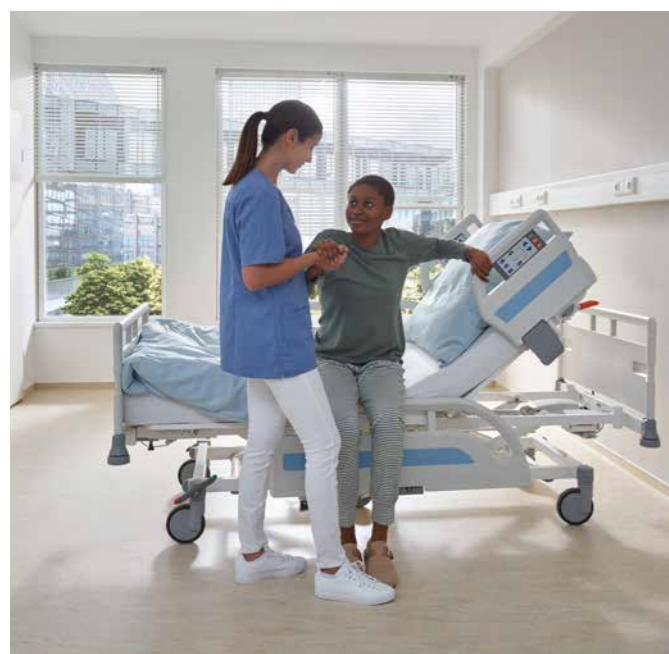

Vroegtijdige pogingen om te gaan zitten en te lopen versnellen het herstel vaak aanzienlijk. De traploze hoogterverstelling en de zijhekkens die als mobilisatiesteun dienen, bevorderen dit proces.


BESLIST BETER

Vroegtijdige mobilisatie loont voor iedereen

Zowel de patiënten als het ziekenhuis profiteren van de voordelen van een snelle mobilisatie. De patiënten hebben daarna vaak een betere kwaliteit van leven en volgens studies hebben ze aanzienlijk minder pijnstillers nodig. Het ziekenhuis bespaart bij een verkort verblijf tot 1200 euro per dag. De Evario one betaalt zichzelf dus zeer snel terug.

▲ Patiënten van verschillende lengte hebben baat bij hun eigen ergonomische opstahoogte.

Valpreventie 's nachts

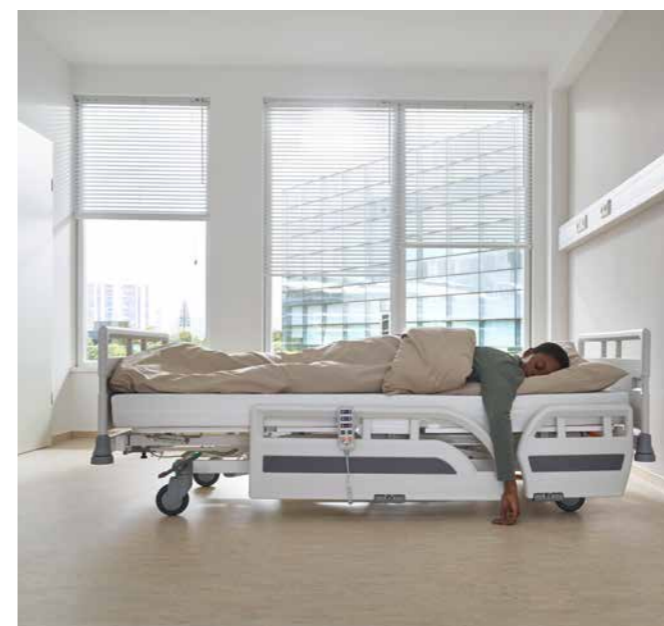

▲ De laagste stand vermindert de valsnelheid bij uit bed vallen. Het risico op letsel wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

Patiënten met lichamelijke of cognitieve beperkingen moeten 's nachts worden beschermd tegen valletsels - ook zonder vrijheidsbeperkende maatregelen. De lage positie van de Evario one van slechts 36 cm vermindert het risico bij een val aanzienlijk.



▲ Het hoofdeinde-element van het gedeelde zijhek ondersteunt als mobilisatiehulp de patiënt bij het uit bed stappen.

Ruimte voor accessoires - voor een optimale zorg



Om de patiënt de best mogelijke zorg te kunnen bieden, moeten apparatuur en accessoires voldoende ruimte hebben en op nauwkeurig bepaalde plaatsen kunnen worden bevestigd. De optionele slanke verzorgingsbeugels aan de lange zijden van de Evario one bieden grote flexibiliteit in het dagelijks gebruik. Ook de zijhekkens en het hoofd- en voeteneinde zijn ideaal voor het bevestigen van accessoires. Op maat gemaakte hulpmiddelen, zoals onze manden voor zuurstof- of urineflessen worden samengevoegd tot een optimale verzorging vanuit één bron.

◀ Optionele accessoirerails en praktische handgrepen maken moderne patiëntenzorg van alle kanten mogelijk.

Individuele bedieningsconcepten

Zorgverleners en patiënten hebben behoefte aan comfortabele en veilige bedieningsopties voor het bed. Ons “bedieningspaneel light” biedt aan de binnen- en buitenzijde aangepaste opties. De focus op de echt belangrijke functies maakt de bediening veel eenvoudiger. Als alternatief is een duidelijke handbediening met ergonomisch handige knoppen verkrijgbaar. Met behulp van een handige ontgrendelmagneet kan de zorgverlener snel de CPR- en Trendelenburg-opties ontgrendelen. Als alle handen al worden gebruikt, kan de bedhoogte ook met een voetschakelaar worden ingesteld.

Eenvoudige besturing met het “bedieningspaneel light”

Op maat gemaakte comfort- en zorgfuncties zijn beschikbaar voor zorgverleners en patiënten op de buiten- en binnenzijde van het “bedieningspaneel light”. Het paneel wordt op verzoek in de gedeelde zijhekken geïntegreerd.



Bediening met ergonomische handschakelaar



▲ De intuïtieve handschakelaar is beschikbaar voor beide types zijhekken en kan altijd handig binnen handbereik worden bevestigd.



▲ De functietoetsen met een donkerblauwe achtergrond zijn in elke situatie makkelijk te begrijpen.

CPR en Trendelenburgpositie met ongrendelmagneet



◀ De CPR-functie en shockpositie zijn geïntegreerd in de handschakelaar en worden ontgrenseld met een ontgrenselmagneet. In geval van nood kan de zorgverlener binnen enkele seconden reageren zonder de plaats van verzorging te verlaten.

▶ Als de zorgverlener zijn handen vol heeft, kan het ligvlak ook gemakkelijk met een voetschakelaar omhoog en omlaag worden gebracht. In stressvolle situaties geeft dit een aanzienlijke verlichting.

Hoogteverstelling via voetschakelaar



Bedieningsmodule

Naast het paneel- of de handschakelaar maakt een aan het voeteneinde geïntegreerde uittrekbare module een veilige bediening van het bed mogelijk. De grotere M-bedieningsmodule biedt veel gemak, terwijl de voordelige S-bedieningsmodule een praktische beperking tot de essentiële functies biedt.



M-bedieningsmodule

◀ Royaal vormgegeven knoppen zorgen voor een ontspannen werken bij gebruik van de M-bedieningsmodule. Beide bedieningsmodules zijn ondergebracht in de uittrekbare beddengoedlade en kunnen desgewenst aan het voeteneinde worden bevestigd.

S-bedieningsmodule

◀ De economische S-bedieningsmodule biedt alle belangrijke besturingsmogelijkheden in één oogopslag.

Snelle noodverstellingen

In geval van reanimatie wordt de Evario one een belangrijk hulpmiddel. De shockpositie kan onmiddellijk in werking worden gesteld met de gemakkelijk bereikbare noodhendel aan het hoofdeinde of met de bedieningselementen. Snel verwijderbare hoofd- en voetenborden maken een vrije toegang tot de patiënt mogelijk.



◀ De oranje noodknoppen op het buitenste “bedieningspaneel light” stellen de zorgverlener in staat snel te handelen zonder de patiënt uit het oog te verliezen.

▶ De CPR-positie kan nog sneller mechanisch worden ingesteld met de noodhendel onder het ligvlak.



◀ Voor een betere toegang tot de patiënt kunnen het hoofd- en voeteneinde zonder gereedschap worden ontgrenseld en verwijderd.

Goede rijeigenschappen, zelfs in kleine ruimtes



Met zijn ruimtebesparende afmetingen is de economische Evario one zeer geschikt voor gebruik in kamers met meerdere bedden. Nauwkeurige manoeuvreerbaarheid is hier belangrijk om het personeel te ontlasten en botsingen te vermijden. Met zijn moderne wielen kan het bed uitstekend worden gemanoeuvreed. Het optionele 5^{de} wiel maakt het gemakkelijker om in krappe bochten te rijden.




Het optionele remsignaal waarschuwt als het ongeremde bed nog op het stopcontact is aangesloten. Dit voorkomt kabel- en muurschade bij het wegrijden.



BESLIST BETER

Voordelen van het 5^{de} wiel

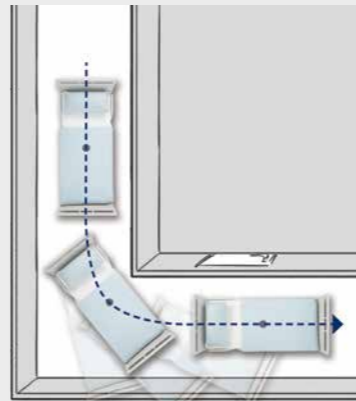

Als het bed met een patiënt snel door de bocht wordt gestuurd, kunnen er hoge centrifugale krachten optreden. Het vijfde wiel voorkomt dat het bed naar de zijkant loopt.

Medische opslag



Alle verstellingen van het bed bij een veilige werkbelasting van 250 kg ook in accubedrijf



◀ De Cardiac-Chair-positie ontlast het hart en versterkt de bloedsomloop.

▶ De Fowler-positie vergemakkelijkt de ademhaling en verbetert de zuurstofvoorziening.



◀ Het draaien in een anti-Trendelenburgpositie kan het slikken vergemakkelijken en aspiratie voorkomen.

▶ De Trendelenburgpositie kan de gevolgen van een shock verzachten.



Automatische stop: Na het zwenken stopt het ligvlak weer in horizontale positie, zonder dat het bed volledig naar beneden hoeft te worden gelaten.

Eenvoudig patiëntentransport

Als ideale aanvulling op de Evario one kan het lichte Quado-nacht-kastje eenvoudig aan het hoofdeinde van het bed worden gehangen en bij het verplaatsen van de patiënt meegenomen.

▼ Afhankelijk van de voorkeur kan de Quado op het hoofd- of voeteneinde worden vervoerd. Dit betekent dat er maar één zorgverlener nodig is om de patiënt te verplaatsen.



Bed- en onderbeensteunverlenging

Om grote patiënten meer ligcomfort te bieden, kan de zorgverlener heel eenvoudig de optionele bedverlenging activeren. Eerst wordt het bedframe zonder gereedschap uitgetrokken. Om het ligvlak te vergroten kan men kiezen tussen een uitklapbare onderbeensteun of een inlegbaar verlengstuk.



▲ Het verlengstuk van het bedframe kan zonder gereedschap worden ontgrendeld en uitgetrokken.



▲ Een uitklapbare metalen beugel verlengt indien gewenst de onderbeensteun.



▲ Voor het verlengen van de matras is een op maat gemaakt opvulkussen verkrijgbaar.

“De diagnose heeft me erg overstuur gemaakt, ik was wanhopig. De toewijding van het verzorgend personeel en de rustgevende interieur heeft me heel erg geholpen. Ik voelde me in het ziekenhuis goed verzorgd!”



Tara Olumide
Patiënte

Ons aanbod

- Afhankelijk van de lichaamsgrootte verstelbaar bed
- Comfortabele verstelling van het bed mogelijk via bedieningspaneel of handschakelaar
- Verlichting onder het bed zorgt voor veiligheid 's nachts
- Gedeeld zijhek kan als mobilisatiesteun worden gebruikt


Comfort voor de patiënten

Eenvoudige bedverstelling met het “bedieningspaneel light”



Patiënten kunnen het “bedieningspaneel light” altijd gemakkelijk bereiken. De eenvoudige verstelmogelijkheden zijn gemakkelijk te begrijpen, zelfs voor mensen met cognitieve stoornissen.

◀ Het “bedieningspaneel light” is altijd op ooghoogte van de patiënt.

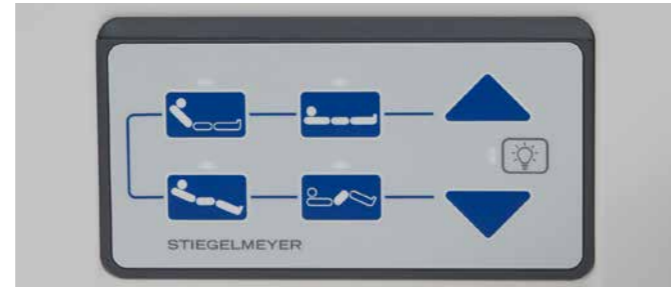

Ergonomische bediening van de handschakelaar



De ergonomische handschakelaar met zijn intuïtieve symbolen doet onmiddellijk vertrouwd aan voor elke patiënt en creëert een positief gevoel van veiligheid.



▲ Noodverstellingen kunnen alleen met een magneet worden ontgrendeld, zodat de patiënt op geen enkel moment toegang krijgt tot het verplegingsniveau.



▲ De verlichting onder het bed wijst de patiënt 's nachts de weg in de kamer.

Verlichting onder het bed

De optionele verlichting onder het bed is een groot pluspunt bij valpreventie. Het wijst patiënten 's nachts de weg zonder slapende medepatiënten te storen.

Bijna een derde van de valpartijen van patiënten in het ziekenhuis gebeurt bij een zelfstandige gang naar het toilet.

Veit Kinne en Jörg Klewe, HeilberufeScience

Verder comfort



Een goede uiterlijke verschijning verhoogt de uitstraling van elk ziekenhuis - de Evario one en het Quado-nachtkastje leveren hieraan een doorslaggevende bijdrage. Met een comfortabele zitpositie, een handige bedverlenging en doorzichtige zijhekken creëert het bed een aangename hotelsfeer. De Quado wordt dankzij de optionele USB-poorten en monitorsteunen een waar mediacentrum voor de patiënt.

◀ De zitpositie en het Quado-nachtkastje vormen een ideale combinatie voor maaltijden of ontspannen lezen.



▲ Bedverlenging:



▲ Goed zicht dankzij de open zijhekken.



Als de Quado aan het bed wordt vervoerd tijdens de verplaatsing van een patiënt, kan de patiënt(e) zijn of haar persoonlijke bezittingen meenemen zonder omslachtig opnieuw inpakken en inventariseren.

◀ De bevestigbare Quado maakt het verplaatsen van een patiënt veel gemakkelijker.

“Elke fabrikant wiens producten bewijsbare gevaren verminderen, krijgt van mij een goed cijfer bij het keuringsproces. Bij de Evario one hebben wij de hygiënische eigenschappen gecontroleerd: Na zorgvuldige ontsmetting, bleven er geen ziekteverwekkers of ziektekiemen over.”

María Abbet
Hygiëniste

Ons aanbod

- Vlak ontwerp met goede hygiënische eigenschappen
- Verborgene kabelgeleiding
- Ligvlakelementen kunnen voor reiniging worden verwijderd
- Open onderstel voor een gemakkelijke reiniging

Veilige hygiëne

Eenvoudige handmatige voorbereiding

Veilige, valideerbare hygiëne is in tijden van pandemie meer dan ooit onontbeerlijk. De Evario one maakt het handmatig reinigen gemakkelijker voor het hygiëneteam dankzij het gladde en strakke ontwerp. Het bespaart tijd, fysieke inspanning en middelen.



- ▲ Geen ontoegankelijke openingen bij het hoofd- en voeteneinde en de zijhekken.



- ▲ Vlak ligvlak met eenvoudige verwijdering van de plastic afdekking.



- ▲ Moeiteloos transport van het Quado-nachtkastje voor reiniging.



- ▲ Weggewerkte kabels.

Technische service



- ▲ De onderhoudsarme Evario one vergemakkelijkt het werk van de technische dienst



- ▲ De besturing en de accu zijn gemakkelijk bereikbaar aan het hoofdeinde van het bed.

Vanaf de levering van het bed tot het einde van zijn gebruik kunt u vertrouwen op de eersteklas-ondersteuning van ons serviceteam.

Daartoe behoort bv.

een minimumvoorraad reserveonderdelen van 15 jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop van het bed. Stiegemeyer-producten zijn daarom altijd een veilige investering in de toekomst.

Wij ondersteunen u en uw technische dienst bij alle benodigde inspecties en het onderhoud. Vooral dankzij de gemakkelijk toegankelijke bediening van het bed kunnen deze werkzaamheden moeiteloos plaatsvinden.

Uw dealer zal u graag ter plaatse adviseren over onze serviceaanbiedingen.

“Tijd is voor ons de belangrijkste component. Producten en reserveonderdelen moeten snel binnenkomen. Ik geef de voorkeur aan producten die ook gemakkelijk en snel te onderhouden en repareren zijn. Met de Evario one zijn alle onderdelen heel gemakkelijk te bereiken.”

George Schumacher
Medewerker technische dienst

Toebehoren



- ▲ Een naamplaatje maakt het makkelijker om de patiënt bij de naam te noemen. Rondom het bed kunnen standaardrails worden bevestigd.



- ▲ De urinefleshouder kan gemakkelijk worden opgehangen aan de zijhekken.



- ◀ Infusstandaards maken een precieze zorg mogelijk.



- ▲ Stabiel en veilig: de zuurstoffleshouder



- ▲ De papegaaiën met greep maken het zich positioneren in het bed gemakkelijker.

De functionaliteit van de Evario one kan eenvoudig worden uitgebreid met originele accessoires van Stiegemeyer. Op deze manier past het bed op bijna elke afdeling.

Handige andere producten

ter aanvulling van uw Evario one

Quado-nachtkastje



▲ Het slanke Quado-nachtkastje is ideaal voor dagelijks gebruik in kamers met weinig ruimte. Wanneer de bedtafel niet wordt gebruikt, kan hij gemakkelijk en geruisloos worden ingeklapt. De Quado kan ook worden gebruikt als medicijn-, schoonmaak- of afdelingswagen. Meerdere Quado's kunnen in elkaar worden geschoven voor ruimtebesparende opslag.

Soreno eco



◀ Het Soreno eco-nachtkastje overtuigt door zijn ruime, veelzijdige opbergruimte. Het is verkrijgbaar met en zonder opklapbare bedtafel.

Novacare-wisseldruksysteem



▲ Het Novacare-wisseldruksysteem vermindert het risico op decubitus.

Matrassen

Stieglmeyer biedt voor elke behoefte de juiste matras. Profiteer van moderne decubitusprofylaxe en een nauwkeurige aanpassing aan de verstellingen van het ligvlak. Zo is het Z1-model bijvoorbeeld bijzonder soepel dankzij zijn golfvorm.



Dit zou u ook kunnen interesseren!

Uitvoeringen en opties

Hoofd- en voeteneinde



Design Intercontinental

- Vervaardigd uit PP-kunststof
- Hoofd- en voeteneinde compleet verwijderbaar
- Bijzonder makkelijk te reinigen
- Beveiliging tegen per ongeluk verwijderen

Zijhekken



Doorlopend ¾-zijhek

- Beschermhoogte ca. 38 cm boven ligvlak
- Kan zonder lawaai worden neergelaten
- Vrij zicht voor de patiënten



Gedeeld ¾-zijhek

- Stille verstelling met één hand
- Beschermhoogte ca. 39 cm boven ligvlak
- Gedeeld zijhek van hoogwaardige kunststof
- Gemakkelijke, krachtondersteunde bediening met gedempte beweging
- Volledige klembescherming

Ligvlakken



Lattenbodem

- Materiaal gepoedercoate metalen lamellen
- Makkelijk te reinigen



Lattenbodem met PP-afdekking

- Materiaal gepoedercoate metalen latten met kunststof afdekkingen
- Kunststof afdekkingen gemakkelijk afneembaar voor eenvoudige reiniging
- Met uitsparingen voor fixatieriem

Wielen



Cover-wiel

- Doorsnede 125 mm
- Hoogteverstelling van het ligvlak ca. 36 – 80 cm
- Bodemvrijheid onderstel ca. 15,3 cm



Integraal wiel

- Doorsnede 150 mm
- Hoogteverstelling van het ligvlak ca. 38 – 82 cm
- Bodemvrijheid onderstel ca. 17,3 cm



5. wiel

- Doorsnede 125 mm

Rempedaal



Kunststof rempedaal

- Kunststof
- Pedaal met kleuraanduiding
- Snelle en intuïtieve bediening



Metalen beugel rem, hoofdeinde

- Metaal, poedergecoat
- Omlaag drukken om te remmen
- Om de remmen los te halen, de beugel onderaan met de voet optillen

Stootrollen



Kunststof

- Doorsnede 80 mm
- Materiaal: polyamide (PA6)
- Inclusief stootkegel

Bedieningselementen



Bedieningspaneel light

- Aan beide zijden in het gedeelde ¼-zijhek geïntegreerd
- Praktische verstelopties voor patiënten (binnenzijde), zorgverleners en technisch personeel (buitenzijde)
- Voorgeprogrammeerde bedposities
- Snel neer te laten met de CPR-functie



Handschakelaar

- Handschakelaar met vergrendelfunctie voor de zorgverlener
- Eenvoudige bediening van het bed
- Direct regelbare noodverstellingen
- Incl. zitpositie



S-bedieningsmodule

- Kan worden opgeborgen in de beddengoedlade als deze niet wordt gebruikt
- Functies kunnen afzonderlijk worden bediend en vergrendeld
- Instellen van de Trendelenburg- en CPR-positie



M-bedieningsmodule

- Weergave van de vergrendelstatus van de afzonderlijke functies, incl. transport- en behandelpositie
- Blokkering en bediening van alle losse functies
- Noodinstellingen
- Geheugenfuncties
- Weergave acculading



Voetpedaal

- Makkelijke hoogteverstelling van het bed met de voet

Elektrische uitrusting



Vloerverlichting onder het bed

- Activeerbaar via handschakelaar of bedieningspaneel
- Degelijke en niet-verblindende verlichting voor oriëntatie in het donker



Remsignaal

- Er klinkt een geluidssignaal bij niet uitgetrokken stekker en losse rem
- Bescherming tegen beschadigingen en weggrollen van het bed

Verdere uitrusting



Accessoirebeugel

- Mogelijkheid voor het plaatsen van extra apparatuur aan de zijkant van het bed



Geïntegreerde verlenging onderbeensteun

- Meer comfort bij de bedverlenging
- De onderbeensteun wordt verlengd door de beugel uit te klappen



Bedverlenging

- De geïntegreerde verlenging kan in enkele ogenblikken worden uitgetrokken
- Verlengt het ligvlak met 18 cm



Opvulstuk zijhek

- Materiaal gelaste constructie van stalen buizen
- Kan zonder gereedschap op de opschroefbare houder worden geklikt




Gradenboog

- Gemakkelijk af te lezen gradenboog
- Veilige instelling van het ligvlak voor medische positionering

Kleuren en dessins

Voor de aanpassing van de Evario one aan uw eigen inrichtingsconcept bieden wij een selectie van 6 dessins uit de Stieglmeyer-collectie aan.

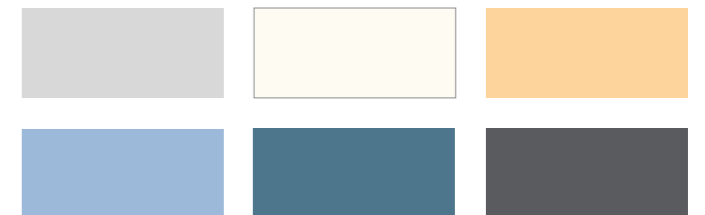

Uitrusting en technische gegevens

Uitrusting / Opties	
Zijhekk	
Doorlopend ¾-zijhek	✓
Gedeeld plastic ¾-zijhek	0
Ontwerp hoofdeinde en voeteneinde	
Intercontinental	✓
Basiskleur	
Kristalwit	✓
Ontsmetting, beschermingsklasse	
handmatige verwerking IPx4	✓
Ligvlak, 4-delig	
Metalen lattenbodem	✓
Metalen lattenbodem met PP-afdekking	0
Stootrollen	
4 kunststof, rondom	✓
Wielen	
Coverwiel Ø 125 mm	✓
Integraal wiel Ø 150 mm	0
5de wiel Ø 125 mm	0
Rempedaal	
2 x kunststof met kleuraanduiding, 2 x metaal	0
2 x kunststof met kleuraanduiding	✓
Posities vaste wielen	
Hoofdeinde rechts	✓
Hoofdeinde links	0
Voeteneinde rechts	0
Voeteneinde links	0
Bedmidden	0
Bedieningselementen	
Handschakelaar met blokkeerfunctie	✓
Geïntegreerd bedieningspaneel light	0
Geïntegreerd bedieningspaneel light + handschakelaar met blokkeerfunctie	0
Bedieningsmodule S in de beddengoedlade	0
Bedieningsmodule M in de beddengoedlade	0
Voetpedaal voor de hoogteverstelling	0
Extra voorzieningen	
Elk 2 openingen voor infuusstaander aan hoofd- en voeteneinde	✓
5de wiel	0
Beddengoedlade	0
Onderbeensteunverlenging	0
Geïntegreerde bedverlenging	0
Gradenboog	0
Accessoirerails aan de zijkant	0
Houder voor oprichter	
2 hulzen voor oprichter met ronde buis aan hoofdeinde	✓
Elektronische uitrusting	
Vloerverlichting onder het bed	0
Remsignaal	0
Accu	
Loodzuuraccu	0

Technische gegevens	
Afmetingen en gewichten	
Buitenmaten	99,7 x 214 cm
Ligvlak (matrasmaat)	87/90 x 200 cm
Bedverlenging	18 cm
Ligvlakopdeling	76 - 21 - 32 - 52 cm
Lengteaanpassing van de rugsteun	4 cm
Veilige werklust	250 kg
Maximaal gewicht patiënt	ca. 240 kg
Bodemvrijheid onderstel	15,3 - 17,3 cm
Leeggewicht	ca. 130 kg
Beschermhoogte doorlopend ¾-zijhek	38 cm
Beschermhoogte gedeeld ¾-zijhek	39 cm
Verstelbereiken	
Kanteling in Trendelenburg-positie	15,5°
Kanteling in anti-Trendelenburg-positie	15,5°
Ligvlakhoogte (coverwiel Ø 125 mm)	ca. 36 - 80 cm
Ligvlakhoogte (integraal wiel Ø 150 mm)	ca. 38 - 82 cm
Hoek rugsteun	70°
Hoek bovenbeensteun	32°
Hoek gestrekte hoge beenpositie	11°

✓ = Standaard 0 = Optioneel verkrijgbaar

technische en optische uitvoering verschillen van de andere Evario-modellen



Behouder van waarden

Vormgever van de toekomst

STIEGELMEYERGROUP

Behouder van waarden

Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in Herford en is nog steeds een familiebedrijf. Respect en verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, medewerkers en partners vormen de basis van ons dagelijks werk. Op basis van deze waarden en onze jarenlange ervaring bieden wij onze klanten over de hele wereld hoogwaardige producten, oplossingen en diensten voor de eisen van zorg en gezondheid.

Vormgever van de toekomst

Om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle veranderingen in de zorg- en gezondheidsbranche, ontwikkelen wij onze producten allemaal zelf. Innovaties en visies op de zorg voor de toekomst zijn het doel van ons werk. Wij staan altijd in contact met onze klanten om hen te ondersteunen bij hun dagelijkse taken. Het omzetten van de trends van morgen naar het heden, is voor ons een succesvolle traditie.

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfortbedden

Projectmeubilair

Service



De Stiegmeyer-groep is uw internationale partner voor ziekenhuizen en zorginstellingen en met het merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij ondersteunen onze klanten met praktische producten, oplossingen en diensten, die wij voortdurend verder ontwikkelen.

- Opgericht in 1900 en nog steeds in familiebezit
- Meer dan 1100 medewerkers wereldwijd
- Productie van alle kernproducten in onze eigen fabrieken
- Productontwikkeling en productie in Duitsland
- Service, training en procesoptimalisatie bij de klant op locatie
- Internationale certificering en export naar meer dan 60 landen
- Verkoopmaatschappijen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, Polen en Zuid-Afrika

Onze merken

STIEGELMEYER

BURMEIER



STIEGELMEYERGROUP

Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany

Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42

32051 Herford

Phone +49 (0) 5221 185 - 0

Fax +49 (0) 5221 185 - 252

info@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.com

France

Stieglmeyer SAS

16 Avenue de l'Europe

Bâtiment SXB1

67300 Schiltigheim

Phone +33 (0) 4 7238 - 5336

contact@stieglmeyer.fr

www.stieglmeyer.fr

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd

The Estuaries · Century City

Cape Town, 7441

Phone +27 (0) 21 555 - 1415

Fax +27 (0) 21 555 - 0639

info.southafrica@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV

Peppelenbos 7

6662 WB Elst

Phone +31 (0) 345 581 - 881

info@stieglmeyer.nl

www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Phone +358 (0) 3 7536 - 320

Fax +358 (0) 3 7536 - 330

stieglmeyer@stieglmeyer.fi

www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.

86-212 Stolno

Grubno 63

Phone +48 56 6771 - 400

Fax +48 56 6771 - 410

info.stolno@stieglmeyer.pl

www.stieglmeyer.pl



Vind uw plaatselijke partner op onze website:

Find your local partner at our website:

stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com