



Regia



Das individuelle Pflegebett
mit vielen Optionen

Regia – das Niedrigbett für Schutz, Komfort und Wohnlichkeit


Wenn pflegebedürftige Menschen zuhause leben, wird ihr Bett oft zum Mittelpunkt des Alltags. Schlafen, Mahlzeiten, Fernsehen, Gespräche – vieles findet im Pflegebett statt, wenn der Gesundheitszustand oder die Tagesform das Aufstehen erschweren. Daher sollte das Bett durch Komfort und Wohnlichkeit eine Atmosphäre von Geborgenheit schaffen, die Mobilität des Bewohners fördern und die pflegenden Angehörigen entlasten. Unser Regia mit dem innovativen Easy-Switch-System erfüllt diese Anforderungen bestmöglich.

Das Regia richtet sich an Kunden, die ein Pflegebett mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und moderner technischer Unterstützung wünschen. Als Niedrigbett mit einem großen Höhenverstellbereich fördert es die Sturzprophylaxe und ermöglicht zugleich

eine rückschonende Pflege. Die teleskopierbare geteilte Seitensicherung verbindet Schutz und Freiheit in optimaler Balance. Mithilfe des Easy-Switch-Systems lässt sie sich zudem sekundenschnell an- und abklicken. Dadurch erfüllt das Bett wechselnde Bedürfnisse und kann leicht an neue Situationen angepasst werden. Mit dem Doppelbett genießen Paare wieder harmonische Stunden zu zweit.

Das Regia bietet auf Wunsch festgepolsterte Häupter und Seitenblenden. Hochwertige Stoffe oder Kunstleder und eine große Auswahl eleganter Holzdekore verwandeln das Bett in ein wohnliches Designerstück, das jedem Geschmack entspricht.

Titelseite: Regia mit Häupterkombination Primus/Primus-Low im Dekor Kirsche Havanna.

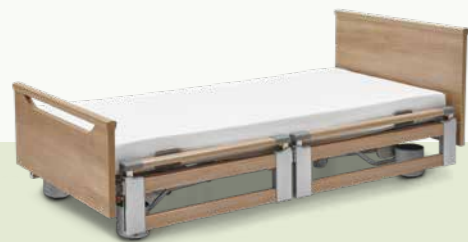

• **großer Höhenverstellbereich:**
26 – 80 cm

• **hohe sichere Arbeitslast:**
225 kg

• **individuell anpassbar:**
- Liegeflächenbreite 90 oder 100 cm
- teleskopierbare geteilte Seitensicherung für flexiblen Schutz
- Seitensicherung, Häupter und Blenden mit Easy Switch leicht und werkzeuglos montierbar



Wohnliche Stoffe

Kopf- und Fußteile sind auf Wunsch mit wohnlichen Stoffen gepolstert. Wo keine Elemente der geteilten Seitensicherung konfiguriert sind, lassen sich zudem Blenden in Holz-, Stoff- oder Lederoptik anbringen. So passt das Bett zu jedem Wohnstil.



Elegantes Kunstleder

Wird das Regia rundum mit elegantem Kunstleder verkleidet, sieht es nicht mehr wie ein Pflegebett aus. Dennoch genießen die Nutzer alle Vorteile der elektrischen Verstellbarkeit. Seitensicherungen oder Elemente in einer anderen Optik können jederzeit nachgerüstet werden. So verändert sich das Bett mit Ihren Ansprüchen.



Doppelbett Regia Variante partner

• **flexibles Seniorenbett für Paare:**
- Lehnen der Liegeflächen individuell verstellbar
- bequeme Sitzposition
- Betthälften lassen sich leicht trennen und wieder zusammenfügen
- attraktive Optik

Inhalt

2 Einführung

4 Das Regia

5 Das Doppelbett

7 Seitensicherungen

8 Das Easy-Switch-System

10 Höhenverstellung

11 Komfort-Funktionen

12 Stoffe, Dekore und Häupter

15 Matratzen

16 Zubehör

18 Ausstattungen und Optionen

19 Die Stiegemeyer-Gruppe



Das elegante Niedrigbett Regia passt sich allen Komfort- und Schutzbedürfnissen an.

Regia


Ein Bett für hohe individuelle Ansprüche

Ein Pflegebett mit viel Komfort und Sicherheit, das die **Mobilität** der Bewohner erhält, die Pflegenden entlastet und viele wohnliche Gestaltungsoptionen bietet – so lässt sich unser Regia beschreiben. Mit diesem Modell erhalten sowohl Privatkunden als auch anspruchsvolle Seniorenresidenzen ein Bett, das sich flexibel an wechselnde Anforderungen anpasst.

Als **Niedrigbett** mit einem großen Höhenverstellbereich von 26 bis 80 cm und optional geteilten Seitensicherungen schützt das Regia Bewohner vor Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen. Damit folgt es der Philosophie des **Werdenfuser Weges**, die Freiheit pflegebedürftiger Menschen nicht einzuschränken.



Außenmaße/Höhenverstellbereich:

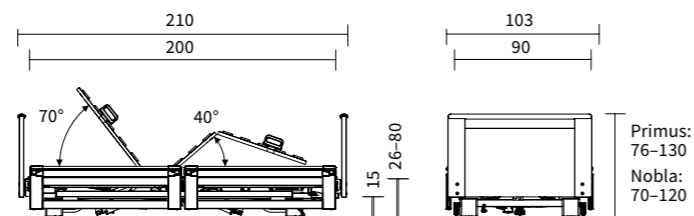

Produktbesonderheiten:



Elegante Polsterung oder wohnliches Holzdekor, Seitenblenden oder Seitensicherungen – beim Regia als Doppelbett haben Paare die Wahl.

Partnerbett

Das Doppelbett für einen erfüllten Alltag

Wachsende Unsicherheit und Pflegebedürftigkeit im Alter stellen Paare vor viele Herausforderungen. Das betrifft auch die Frage nach dem **gemeinsamen Bett**. Oft zieht ein Partner in ein Pflegebett um, während der andere allein im Ehebett zurückbleibt. Die Vertrautheit und Intimität der Beziehung leiden darunter. Als Partnerbett bietet unser Regia in diesem Fall eine ideale Lösung.


Das Partnerbett vereint die **pflegerischen Stärken** und den Komfort des Einzelbettes mit speziell auf Paare zugeschnittenen **Sicherheitsfunktionen**. Zugleich lassen sich die beiden Hälften mühelos trennen und wieder zusammenfügen, wenn die Pflege am Bett dies erfordert oder die Partner eine Zeitlang in getrennten Räumen schlafen möchten.

Starke Vorteile

- großer Höhenverstellbereich von 26 - 80 cm
- 2 Liegeflächen à 90 x 200 cm
- sichere Arbeitslast 225 kg pro Liegefläche
- Rücken- und Beinlehnen der Liegeflächen individuell verstellbar
- Höhenverstellung und Fußtieflage des Bettkorpus immer synchron, sodass keine Klemmgefahr für die Bewohner besteht
- Umbauten und Seitensicherung flexibel anpassbar mit dem Easy-Switch-System



Außenmaße/Höhenverstellbereich:

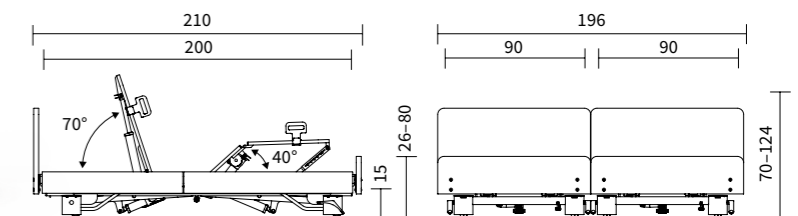

Produktbesonderheiten:





▲ Die mühelose Trennung der Betthälften erleichtert die Pflege am Bett ebenso wie die Reinigung des Raumes.

Komfort und Sicherheit für Paare

Das Partnerbett bietet seinen beiden Nutzern individuellen Komfort, schützt sie zugleich und entlastet die Pflegenden. Die Rücken- und Beinlehnen der beiden Liegeflächen lassen sich **einzel**n verstellen, sodass z. B. ein Partner noch lesen kann, während der andere bereits schläft. Dazu verfügt jede Betthälfte über einen **eigenen Handschalter**.

Der **Bettkorpus** hingegen bewegt sich bei der großen Höhenverstellung von 26 bis 80 cm und der Schwenkung in die Fußtieflage immer **synchron**. So werden Freiräume zwischen den Liegeflächen vermieden, in denen sich die Bewohner einklemmen könnten. Optionale geteilte Seitensicherungen, die sich jederzeit nachrüsten lassen, sorgen für maßgeschneiderte Sicherheit.



▲ Standardmäßig verfügt jede Betthälfte über einen eigenen Handschalter.



▲ Der Bettkorpus bewegt sich immer synchron, die Liegeflächen lassen sich hingegen einzeln verstellen. So entsteht z. B. eine bequeme Sitzposition.

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Die Sitzposition

Elektrisch verstellbare Doppelbetten sind oft nur nebeneinander stehende Einzelbetten mit geringer Funktionalität. Unser Regia in der Variante partner überzeugt hingegen besonders mit seiner Schwenkbarkeit in eine bequeme Sitzposition. Diese unterstützt die Atmung, erleichtert Mahlzeiten im Bett und fördert die Teilhabe am Alltag auf Augenhöhe.



▲ Die kopfseitige Anstellung auf der zweiten Stufe bietet eine ideale Balance aus Freiheit und normgerechtem Schutz.



▲ Auf der ersten Stufe ist die TSG eine Orientierungshilfe und ermöglicht kopfseitig angestellt das selbstständige Ein- und Aussteigen.



▲ Die diagonale Anstellung der Holme gibt ein gutes Gefühl von Sicherheit.



▲ Sturzgefährdete Bewohner werden durch die vollständige Anstellung sicher geschützt.

Moderne Seitensicherungen

Die **teleskopierbare geteilte Seitensicherung (TSG)** des Regia lässt sich **einfach und ohne Aufwand nach oben ziehen**. Wird nur die kopfseitige Hälfte angestellt, bleibt dem Pflegebedürftigen ausreichend Raum zum Ein- und Ausstieg. Auf Wunsch können Sie das Bett nur mit kopfseitigen Seitensicherungen ausstatten – mit 110 cm Länge bieten die Elemente **normgerechten Schutz**.

Die TSG lässt sich in 2 Stufen nach oben ausziehen. Auf der ersten Stufe bietet sie dem Bewohner Orientierung und bleibt optisch so dezent, dass der Blick ungehindert in den Raum wandern kann. Die zweite Stufe sorgt für vollen Schutz. Für ein gutes Gefühl von Halt und Sicherheit ist auch eine diagonale Anstellung der Holme hilfreich. Alle Elemente der TSG lassen sich ebenso wie die Seitenblenden und Häupter mit wenigen Handgriffen anbringen und abnehmen – das innovative **Easy-Switch-System** macht es möglich. Das Regia passt sich dadurch jedem Bedürfnis an und fördert die Mobilität der Pflegebedürftigen.

Für stark sturzgefährdete Bewohner und den Einsatz hoher Antidekubitus-Matratzen empfiehlt sich der Einsatz der optionalen **durchgehenden Seitensicherung (DSG)**. Auch sie lässt sich mühelos anbringen und abnehmen – mit dem **Easy-Click-System**.



▲ Die optionale durchgehende Seitensicherung (DSG) lässt sich mithilfe des Easy-Click-Systems sekundenschnell anbringen.



▲ Mit der durchgehenden Seitensicherung genießen sturzgefährdete Bewohner maximalen Schutz (Abbildung ähnlich).



Das patentierte System für anpassbare Pflegebetten mit normgerechter Sicherheit

Wählen Sie das Regia mit der teleskopierbaren geteilten Seitensicherung oder ohne Seitensicherung und kommen Sie in den Genuss unseres flexiblen Systems Easy Switch. Das Prinzip von Easy Switch ist so einfach wie überzeugend: Die Elemente der Seitensicherung, die Bettenhäupter sowie die Seitenblenden lassen sich **ohne Werkzeug** anbringen und abnehmen. Dazu dienen einfach bedienbare Verschlüsse, die sicher einrasten und vom Bewohner nicht versehentlich betätigt werden können. Häupter aus der Nobla-Serie und Blenden sind auf Wunsch mit **attraktiven Stoff- oder Kunstlederpolsterungen** lieferbar.

Durch das Easy-Switch-System lässt sich das Regia im Lauf der Nutzung sehr einfach mit Seitensicherungen oder einer neuen Optik nachrüsten und **an Ihre Bedürfnisse anpassen**. Dadurch wird es zu einem Bett, das sich mit Ihnen entwickelt und Sie in jeder Lebensphase unterstützt. Die abnehmbaren Seitensicherungen ermöglichen zudem einen schnellen Umbau, immer angepasst an die jeweilige Pflegesituation. Zusätzlich erleichtern sie den Aufbau des Bettes erheblich.

Modular aufgebaut und werkzeuglos montierbar


Kopfteile nach Wunsch sekundenschnell austauschen

- wohnliche Designvarianten, mit oder ohne Griffleisten
- attraktive Holzdekore, Stoffe und Kunstleder wählbar
- Bettenhäupter und Seitenblenden frei nach Ihren Wünschen kombinierbar

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Mit Easy Switch mehr Flexibilität und Sicherheit

Betten mit Easy Switch erfüllen wechselnde Schutzbedürfnisse der Bewohner und lassen sich optisch an jeden Geschmack anpassen. Die flexible Seitensicherung ermöglicht einen normkonformen Schutz, ohne die Mobilität des Pflegebedürftigen einzuschränken.

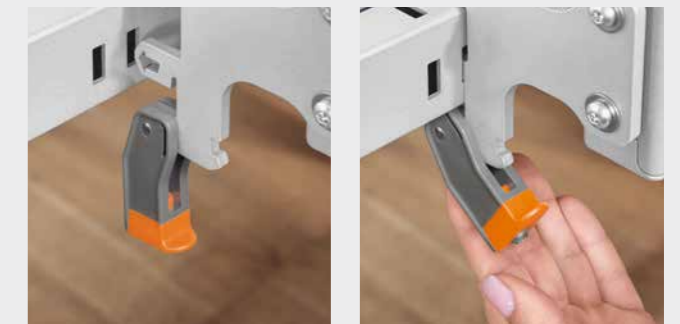


▲ Alle Easy-Switch-Elemente werden in den Bettrahmen gesteckt und mit leicht bedienbaren Verschlüssen befestigt.

▲ Drücken Sie den Verschluss einfach nach oben.



▲ Der Verschluss rastet sicher ein – das Element ist befestigt.

▲ Um die Befestigung wieder zu lösen, ziehen Sie die orange Sicherung nach vorn und drücken Sie den Verschluss nach unten.

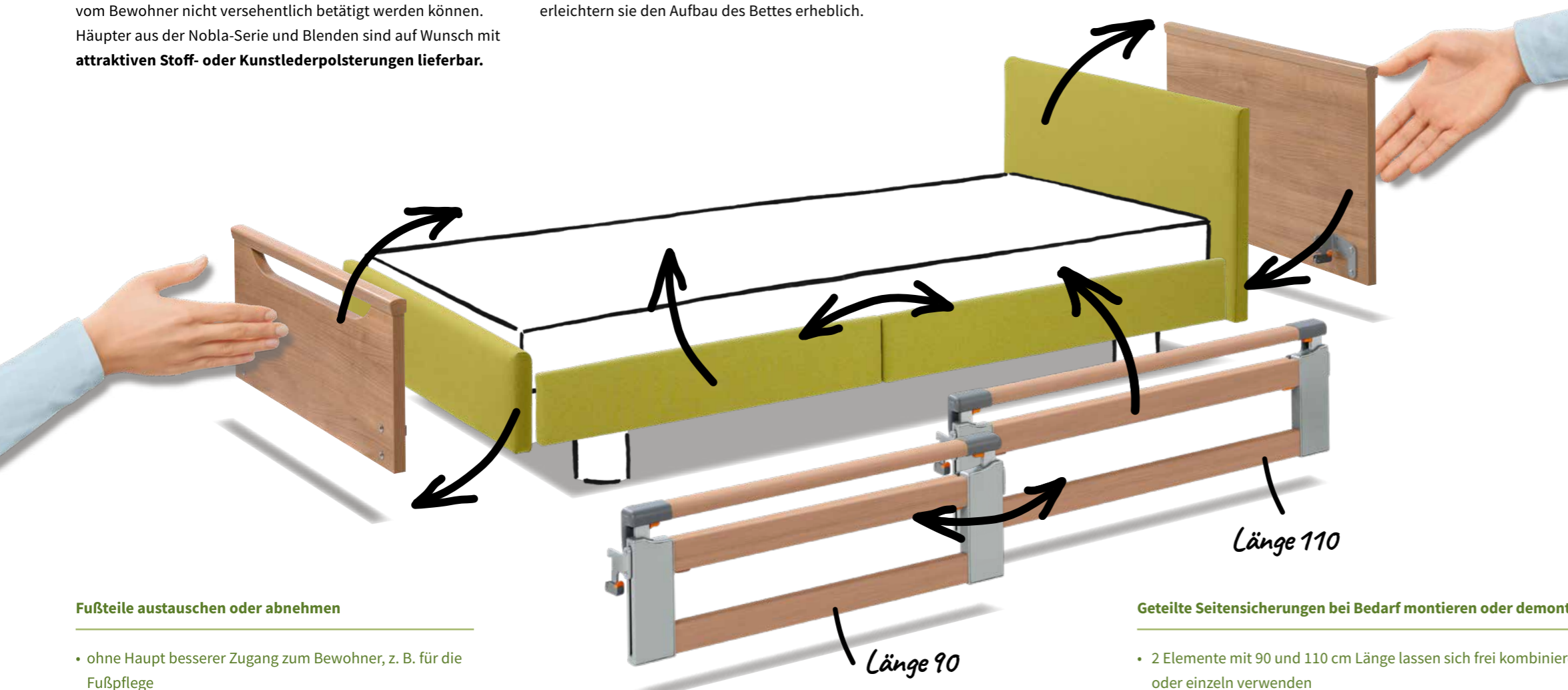

Fußteile austauschen oder abnehmen

- ohne Haupt besserer Zugang zum Bewohner, z. B. für die Fußpflege
- hohe Fußteile für Gefühl von Geborgenheit oder niedrige Fußteile für freie Sicht wählbar
- attraktive Holzdekore, Stoffe und Kunstleder zur Wahl

Geteilte Seitensicherungen bei Bedarf montieren oder demontieren

- 2 Elemente mit 90 und 110 cm Länge lassen sich frei kombinieren oder einzeln verwenden
- 110 cm kopfseitig bieten normgerechten Seitensicherungsschutz
- 90 cm kopfseitig geben ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung und lassen viel Platz für den Ein- und Ausstieg

! Seitensicherungen frei kombinierbar: 110/90 oder 90/110





Die tiefste Position von nur 26 cm schützt vor Sturzverletzungen.

Immer auf der richtigen Höhe



▲ Der automatische Zwischenstopp bei ca. 40 cm ist für viele Menschen die optimale Ein- und Ausstiegshöhe.



▲ Die ergonomische Pflegehöhe von bis zu 80 cm schont den Rücken der Angehörigen.

Niedrigbetten leisten in der Pflege einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Sturzverletzungen. Aus einer Position dicht über dem Boden besteht für den Bewohner nur ein geringes Risiko, selbst wenn die Seitensicherung nicht angestellt ist. Der automatische Rückenlehnenrückzug sorgt für ein angenehmes Gefühl während der Verstellung der Liegefläche, reduziert Scherkräfte und vergrößert die Sitzfläche, wenn sich das Bett in der Sesselposition befindet.

Mit seinem **großen Höhenverstellbereich** von 26 bis 80 cm wird das Regia allen Anforderungen in der Pflege gerecht. Die tiefste Position bietet dem Bewohner im Bett optimalen Schutz. Mit dem Handschalter lässt sich das Bett einfach und intuitiv verstellen. Dank seiner **3-Stopp-Funktion** hält es automatisch bei einer mittleren Position von ca. 40 cm – der idealen Höhe für einen bequemen Ein- und Ausstieg. In der oberen Position von bis zu 80 cm bietet das Regia den Pflegenden die Möglichkeit, **ergonomisch auf Hüfthöhe** zu arbeiten.

Starke Vorteile

- großer Höhenverstellbereich von 26 – 80 cm
- stufenlose Verstellung mit leicht bedienbarem Handschalter
- Niedrigbett ermöglicht Sturzprophylaxe ohne freiheitsentziehende Maßnahmen
- ergonomische Pflegehöhe schont den Rücken des Pflegepersonals und der Angehörigen und erhält ihre Gesundheit
- optimale Ein- und Ausstiegshöhe fördert die Mobilität des Bewohners



In der Sitzposition können Pflegebedürftige auf Augenhöhe am Alltag teilhaben.

Komfort

Mit neuer Lebensfreude den Alltag genießen

Das Regia bietet durch seine flexiblen Verstellmöglichkeiten viele Optionen, um den Bewohnern wieder ein Leben auf Augenhöhe zu ermöglichen. Das Bett lässt sich mithilfe des Handschalters in eine **Fußtieflage** von bis zu 15° bringen. Kombiniert mit der bis zu 70° verstellbaren Rückenlehne nimmt es dadurch eine komfortable **Sitzposition** ein. Pflegebedürftige Menschen können sich ohne Anstrengung aufrichten. Einem lebhaften Gespräch oder einem gemütlichen Fernsehabend steht nichts mehr im Weg. Auch das Essen ist in der sitzenden Position wesentlich angenehmer. Zugleich sinkt das Risiko von Aspirationen.

Die Unterschenkellehne lässt sich mithilfe des Handschalters in die Waagerechte bringen, wenn aus gesundheitlichen Gründen eine **Beinhochlage** gewünscht wird.

Starke Vorteile

- Fußtieflage bis zu 15°
- optionale Trendelenburg-Position für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen
- elektrisch einstellbare Beinhochlage
- gute Fahr- und Manöviereigenschaften
- sicherer Stand durch serienmäßige 4-Rollen-Zentralfeststellung



Dekore¹⁾



▲ Kirsche Havanna



▲ Lindberg Eiche




▲ Buche Natur



▲ Königsahorn

Stoffe und Kunstleder

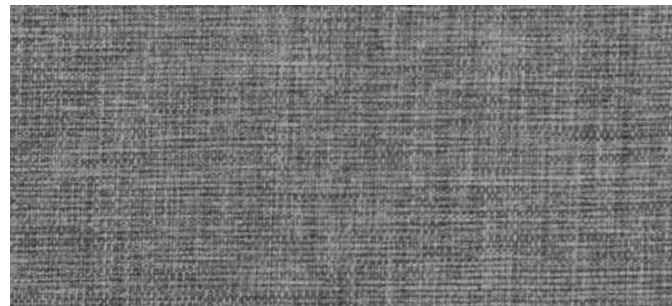

▲ Stoff: Grau Tiba 8111



▲ Stoff: Hellgrün Tiba 6210



▲ Kunstleder: Weiß 1-1142-197

¹⁾ Regia Variante partner: Buche Natur und Kirsche Havanna

Häupter²⁾

Primus

- nur Holzdekor




Prinzino

- nur Holzdekor
- längere Lieferzeit



Nobla

- Holzdekor oder gepolstert
- längere Lieferzeit

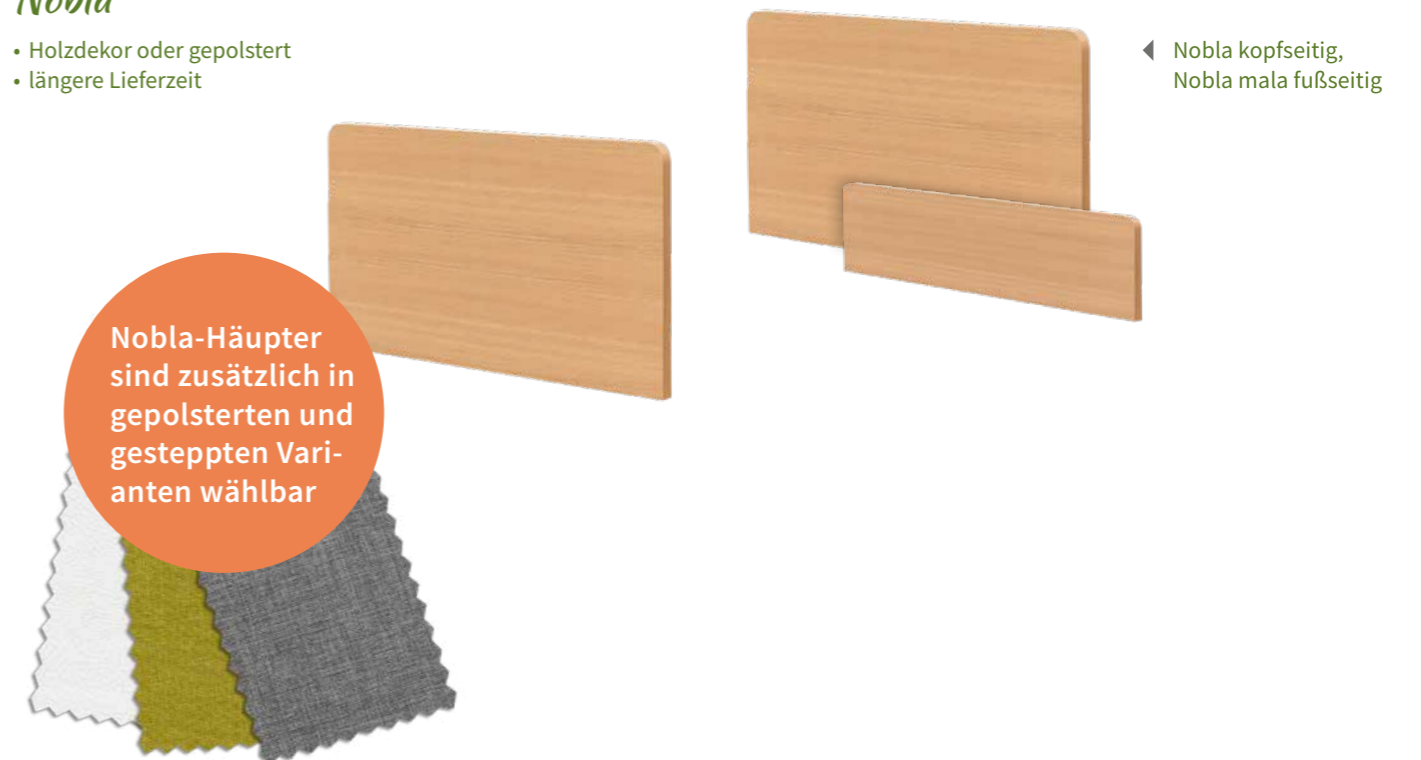

²⁾ Regia Variante partner: nur mit den Kombinationen Nobla oder Nobla mala, Holzdekor oder gepolstert



Stilvoll und elegant – das Regia überzeugt durch sein zeitloses Design gepaart mit einzigartigen technischen Vorzügen.



Die Premium-Matratze Sky-fit (hier ohne Bezug) passt sich der Liegefläche des Regia genau an.

- Erhältlich für
Liegeflächenmaße:
- Sky-fit**
90 x 200 cm
100 x 200 cm
 - Comfort-fit**
90 x 200 cm
100 x 200 cm
 - Basic-fit**
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Matratzen

Gesunden Schlaf genießen

Gönnen Sie sich oder Ihren Angehörigen noch mehr Komfort, indem Sie zu Ihrem Regia auch eine Matratze von Burmeier auswählen. Unsere Pflegebettmatratzen bewegen sich bei Verstellungen der Rücken- und Oberschenkellehnen genau mit, sodass gesundheitsfördernde Liegepositionen ihre volle Wirkung entfalten.



▲ Modell Sky-fit mit hochwertiger Skytherm®-Auflage.

Sky-fit – das Premium-Modell

- hochwertige 2-Schicht-Matratze mit 2 cm Sky-therm®-Auflage und 12 cm Kaltschaum-Basis
- Einschnitte in der Basis sorgen für optimale Anpassung an die Liegefläche
- Randzonenverstärkung für bequemes Sitzen auf der Bettseite
- abnehmbarer Wendeb Bezug, eine Seite Polyurethan (PU), andere Seite Polyester und Viskose, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), 2,5 kPa (Auflage), Raumgewicht 50 kg/m³ (Basis), 40 kg/m³ (Auflage)



▲ Modell Comfort-fit mit Randzonenverstärkung.

Comfort-fit – die Mittelklasse

- die komfortable Matratze mit einem Kern aus elastischem Polyurethan-Kaltschaum (14 cm)
- Einschnitte in der Basis sorgen für optimale Anpassung an die Liegefläche
- Randzonenverstärkung schützt vor Herausrollen
- abnehmbarer Wendeb Bezug, eine Seite Polyurethan (PU), andere Seite Polyester und Viskose, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), Raumgewicht 40 kg/m³



▲ Modell Basic-fit.

Basic-fit – das Einsteigermodell

- Einschichtmatratze aus angenehmem Polyurethan (12 cm)
- weißer abnehmbarer PU-Bezug, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 4,5 kPa, Raumgewicht 40 kg/m³



▲ Die **Leselampe** ist zum Einstecken in die Aufrichterhülse oder zum Anbringen am Aufrichter wählbar.



▲ Das **Unterbettlicht** dient nachts der besseren Orientierung und schafft zusätzliche Sicherheit.



▲ Die **Bettverlängerung** um ca. 20 cm wird einfach in den Bettrahmen gesteckt. Passende Polsterteile zur Verlängerung der Matratze sind ebenfalls erhältlich.



▲ Die **Komfort-Liegefläche** besteht aus 50 freischwingenden Federelementen.

Praktisches Zubehör

Mit Original-Zubehör von Burmeier verwandelt sich Ihr Regia in ein maßgeschneidertes Wunschbett und bietet noch mehr Komfort und Schutz. So empfiehlt sich etwa für sehr große Bewohner die **Bettverlängerung** um ca. 20 cm. Sie wird einfach fußseitig in den Bettrahmen eingesteckt. Bei Betten mit geteilter Seitensicherung decken auf Wunsch **zwei 110 cm lange Elemente** die verlängerte Liegefläche ab.

Zubehöre wie der **Schaumlederbezug** für die Seitensicherung oder das **Unterbettlicht** für eine bessere Orientierung bei Nacht erhöhen die Sicherheit des Bewohners erheblich. Die **Komfort-Liegefläche** mit ihren frei schwingenden Elementen, der **flexible Geberhalter für den Handschalter** oder die **Bettzeugablage** sorgen für mehr Komfort und Entlastung im Alltag.



▶ Mit dem biegsamen **Geberhalter** befindet sich der Handschalter immer an der passenden Position.



▲ Die **Bettzeugablage** ist beim Bettenmachen sehr praktisch.



▲ **Schaumlederbezüge** schützen vor Stößen gegen die Seitensicherung.



▲ Mit dem **Verlängerungskabel** von 1,40 m lässt sich der Handschalter im ganzen Raum nutzen.



▲ **Wandabweisrollen** schützen Bett und Zimmereinrichtung während des Fahrens und der Höhenverstellung.

Ausstattungen und Optionen

Ausführung	Regia	Regia Variante partner
Liegefläche 90 x 200 cm	✓	-
Liegefläche 100 x 200 cm	0	-
Liegefläche 2 x 90 x 200 cm	-	✓
Höhenverstellung	26 - 80 cm	26 - 80 cm
sichere Arbeitslast	225 kg	2 x 225 kg
4-geteilte Metall-Liegefläche mit Rückenlehnenrückzug	✓	✓
elektrische Anhebung der Unterschenkellehne (21 cm)	✓	✓
Fußtieflage (15°)	✓	✓
4-Rollen-Zentralfeststellung	✓	✓
Linak-24-Volt-Antriebssystem	✓	✓
Kopf- und Fußteil Primus (nur Holzdekor)	0	-
Kopfteil Primus und Fußteil Primus-Low (nur Holzdekor, nicht mit durchgehender Seitensicherung DSG erhältlich)	0	-
Kopf- und Fußteil Prinzino (nur Holzdekor)	0	-
Kopf- und Fußteil Nobla (Holzdekor oder gepolstert, nicht mit DSG erhältlich)	0	0
Kopfteil Nobla und Fußteil Nobla mala (Holzdekor oder gepolstert, nicht mit DSG erhältlich)	0	0
Dekore Kirsche Havanna, Lindberg Eiche, Buche Natur, Königsahorn	0	Buche Natur, Kirsche Havanna
Teleskopierbare Seitensicherung (TSG) mit Easy Switch	0	0
- 2 Elemente 110/90 cm, ergänzende Seitenblenden bei Bedarf enthalten	0	0
- 2 Elemente 110/110 cm, ergänzende Seitenblenden bei Bedarf enthalten	0	0
- 2 Elemente 90/90 cm, ergänzende Seitenblenden bei Bedarf enthalten	0	0
- keine Seitensicherung, 4 Seitenblenden	0	0
- Seitenblenden gepolstert	0	0
durchgehende Seitensicherung (DSG) mit Easy Click beidseitig	0	-
durchgehende Seitensicherung (DSG) mit Easy Click einseitig, mit TSG/Seitenblenden kombiniert	0	-
Bettverlängerung (ca. 20 cm)	0	0 (nur beidseitig)
Aufrichter mit Triangelgriff	0	0
Unterbettbeleuchtung	0	0
Notabsenkung Batterie	0	0
Schaumlederbezug (erhältlich für TSG und DSG)	0	0 (nur TSG, nur beidseitig)
Leseleuchte	0	0
Bettzeugablage	0	-
Wandabweisrollen (2 Stück/4 Stück wahlweise)	0	-
Komfort-Liegefläche	0	0
Flexibler Geberhalter für Handschalter	0	-
Handschalter-Verlängerungskabel (1,40 m)	0	-
Trendelenburg-Handschalter (nur für Pflegeeinrichtungen)	0	-

✓ = Standardausstattung
0 = optional erhältlich



Ganz einfach
Code scannen
und Ihr Regia
konfigurieren!

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Die Stieglmeyer-Gruppe ist Deutschlands führender Hersteller von medizinischen Betten für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Pflege zuhause. Mit modernen Nachttischen, Möbeln und digitalen Assistenzsystemen ist sie zugleich ein innovativer Anbieter ganzheitlicher Lösungen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt erfolgreich Angebote für die internationalen Märkte in mehr als 100 Ländern.

Unsere Stärken:

- Produktentwicklung an unserem Hauptsitz Herford in Deutschland – Produktion in vier modernen Werken in Deutschland und Polen
- Fabrik in China für den chinesischen Markt
- Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in zahlreichen Ländern
- erstklassiger Service mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung
- Schulungen und Prozessoptimierung für unsere Kunden
- nachhaltiges Handeln mit hohem gesellschaftlichem Engagement

1.000
MITARBEITER
WELTWEIT

11
STANDORTE
in Deutschland, Polen,
den Niederlanden, Belgien,
Frankreich, Finnland,
Südafrika und China

Maßgeschneiderte
ANGEBOTE
für alle
MÄRKTE

MEHR ALS
100.000
produzierte
Betten
pro Jahr

Internationale
ZERTIFI-
ZIERUNG

BIS ZU
15 JAHRE
Ersatzteillieferungen

VERTRIEB
in über
100
Ländern

DEUTSCHE
INGENIEURSKUNST

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel
- Service

Unsere Werte

- Erfahren
- Menschlich
- Verlässlich
- Lösungsorientiert
- Aufgeschlossen
- Selbstbewusst

Unsere Marken





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stiegelmeier GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stiegelmeier.com
www.stiegelmeier.com

France
Stiegelmeier SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stiegelmeier.fr
www.stiegelmeier.fr

South Africa
Stiegelmeier Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeier.com
www.stiegelmeier.co.za

Nederland / Netherlands
Stiegelmeier BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeier.nl
www.stiegelmeier.nl

Suomi / Finland
Stiegelmeier Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stiegelmeier@stiegelmeier.fi
www.stiegelmeier.fi

Polska / Poland
Stiegelmeier Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeier.pl
www.stiegelmeier.pl

China
Stiegelmeier China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stiegelmeier.cn
www.stiegelmeier.cn



stiegelmeier-group.com