

Nueva Versión
Ambulatoria y
Estacionaria



Evario one

La cama de hospital modular

Evario one

La cama económica para el día a día en el hospital

«Como responsable de compras, planifico a largo plazo y pensando en los diferentes departamentos. Únicamente así puedo cubrir las necesidades de forma óptima y adelantarme a los momentos de escasez. Stieglmeyer me apoya de forma activa en esta manera de trabajar. La cama Evario one es la inversión perfecta para una relación a largo plazo».



Adam Smith
Director de compras


Las ventajas decisivas para usted

Para aliviar el estrés y el esfuerzo físico durante el trabajo diario en el hospital, los productos sanitarios deben presentar, en su mayoría, los mismos puntos fuertes:

- **Asistencia directa durante las tareas de cuidado**
- **Facilidad de manejo**
- **Seguridad**
- **Confort para los pacientes**


Al desarrollar la Evario one nos hemos centrado en estas ventajas fundamentales. La cama de hospital regulable eléctricamente reúne numerosas funciones útiles, descarga al personal y brinda asistencia en diferentes procesos.

Los sistemas de protección lateral según las necesidades y las variantes de manejo individuales satisfacen los más diversos requisitos. La Evario one puede emplearse de modo prácticamente universal.

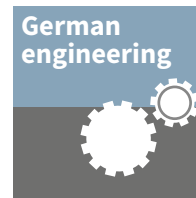

Ciclo del cuidado

Camas para todas las necesidades en el hospital

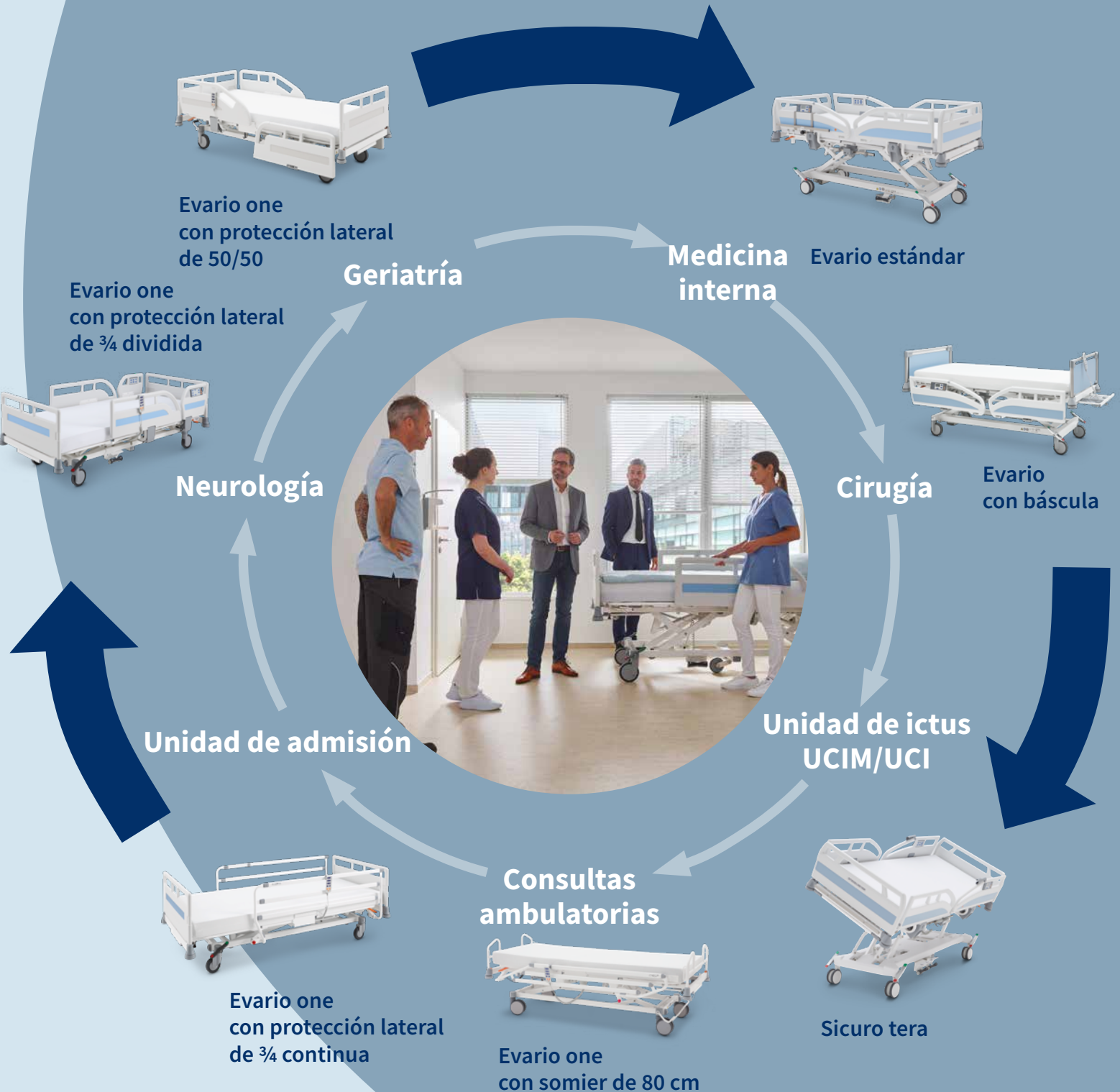



Variante con protección lateral de 50/50

Protección integral

- Somier (medida del colchón): 87 x 200 cm
- Menos de 1 metro de anchura exterior
- Protección lateral de 50/50 dividida
- La protección lateral elevada ofrece una protección integral
- Control con mando manual, panel de mando integrado o módulo de mando



Variante con protección lateral de ¾ dividida

Protección y movilización

- Somier (medida del colchón): 87 x 200 cm
- Menos de 1 metro de anchura exterior
- Protección lateral de ¾ dividida
- La protección lateral elevada en el cabecero puede utilizarse como apoyo para la movilización
- Control con mando manual, panel de mando integrado o módulo de mando



Variante con protección lateral de ¾ continua

De estructura compacta para habitaciones pequeñas

- Somier (medida del colchón): 87 x 200 cm
- Menos de 1 metro de anchura exterior
- La protección lateral de ¾ continua se baja paralela a la cama y no necesita espacio adicional
- Control con mando manual o módulo de mando
- Los accesorios enganchados están siempre a la vista

Índice


Ventajas económicas	6	Confort para los pacientes	18
Desarrollo del producto	7	• Regulación sencilla de la cama con el panel de mando integrado	18
Conceptos de protección lateral	8	• Manejo ergonómico del mando manual	18
• La protección lateral de 50/50 dividida	8	• Luz bajo la cama	19
• La protección lateral de $\frac{3}{4}$ dividida	10	• Cabecero fijo	19
• La protección lateral de $\frac{3}{4}$ continua	11		
Movilización para una recuperación más rápida	12	Cama angosta diseñadas para espacios limitados	20
Conceptos de manejo individuales	14	La cama perfecta para centros de salud u hospitales de día	22
• Control sencillo con el panel de mando integrado	14	Higiene segura	24
• Manejo con el mando manual ergonómico	14	Servicio técnico	25
• CPR y posición baja de la cabeza con imán de desbloqueo	14	Accesorios	25
• Regulación de la altura con pedal	14	Otros productos útiles	26
• Módulos de mando	15	Equipamientos y opciones	27
• Regulación rápida de emergencia	15	Datos técnicos	30
• Excelente maniobrabilidad incluso en estancias pequeñas	16	El Grupo Stiegemeyer	31
• Siempre a la altura correcta	16		
• Posicionamientos individuales	17		
• Prolongación de la cama y del plano de los gemelos	17		



Variante con cabecero fijo

Regulación de la altura segura

- **Somier (medida del colchón):**
87 x 200 cm
 - Menos de 1 metro de anchura exterior
 - Sin colisiones con el mobiliario durante el ajuste de la altura
 - Uso seguro de los accesorios (base del trapecio, soporte de gotero) conservando la total movilidad del somier

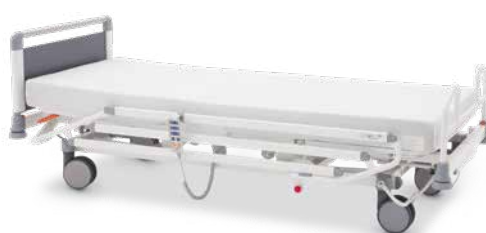

Evario one con somier de 80 cm

Versátil en espacio reducido

- **Regulación de la altura:**
36 a 80 cm (con rueda de 125 mm)
- **Perfecta para espacios limitados:**
 - Somier de 80 x 200 cm
 - Medidas exteriores de solo 89,5 x 214 cm para atravesar fácilmente marcos de puerta estrechos
 - Capacidad de maniobra precisa en estancias pequeñas o habitaciones compartidas
 - Con cabeceros y piecero Como o asas para empujar
 - Con o sin protección lateral

«Todas las decisiones de inversión suponen un riesgo económico. Por ese motivo, tengo en cuenta la utilidad a largo plazo y, obviamente, también el precio. Los productos desarrollados en Alemania gozan, con razón, de una excelente reputación en lo que respecta a la calidad y la durabilidad».



Henry Jones
Gerente

Nuestra oferta

- Cama de calidad probada
- Costes sucesivos mínimos gracias a la durabilidad del producto
- El personal responsable de los cuidados valorará la manipulación rápida y sencilla
- Los técnicos sanitarios e internos se beneficiarán de la incidencia de errores reducida y de unas características higiénicas excelentes
- Servicio garantizado tras la adquisición

Ventajas económicas por su gran calidad

Stieglmeyer es el fabricante alemán más importante de camas de hospital que desde 1900 aúna tradición e innovación. Más de 120 años de experiencia, nuevas ideas y unos estándares de calidad superiores a la media son aspectos que caracterizan también a la cama económica Evario one. Gracias a su durabilidad y al trabajo mínimo de reparación necesario, esta cama permite ahorrar costes durante toda su vida útil.

A fin de confirmar su resistencia, todos los componentes se han probado en nuestro centro de desarrollo de Herford, Alemania, aplicando requisitos mucho más estrictos que los exigidos por la normativa. Los posibles daños en la cama se evitan ya de antemano gracias su diseño inteligente, p. ej., por medio del panel de mando integrado de forma fija y a prueba de caídas.

LINAK® 
WE IMPROVE YOUR LIFE

Interno

Potencia originaria de Dinamarca: equipamos a nuestras camas de hospital con accionamientos de alta calidad de LINAK, el proveedor líder internacional de soluciones a motor eléctricas para camas y muebles. LINAK somete a todos los productos a exhaustivos ensayos conforme a las normas sanitarias internacionales. Al mismo tiempo, estos accionamientos tienen un consumo energético bajo, ahorran costes y protegen el medioambiente.



- ▲ La señal de frenado opcional avisa de una cama sin frenar cuyo enchufe de red aún está enchufado.



- ▲ El diseño exclusivo del cono y de las ruedas antichoque minimiza el riesgo de daños durante el desplazamiento y la regulación de la altura de la cama.



- ▲ El cabecero fijo no se desplaza durante la regulación de la altura, de modo que se evitan colisiones con el mobiliario.

Desarrollo del producto

Nuestros ensayos superan los requisitos normativos



Prueba de carga del cabecero y del piecero

- En el centro del cabecero se fija una garra que ejerce una presión elevada.
- La cama está fijada firmemente de modo que no puede eludirla.
- La cama se carga durante 100 ciclos de 30 segundos con una presión de 500 newtons (lo que corresponde en este caso a aprox. 51 kg) y se mueve de un lado a otro.
- Los pernos de fijación y otros componentes deben resistir la prueba sin sufrir daño alguno.



Prueba de carga de las ruedas

- La cama se carga con 1 400 newtons (lo que equivale a aprox. 143 kg) y se coloca sin frenar sobre el banco de pruebas de ruedas.
- El banco de pruebas simula un desplazamiento sin pausa de 5 horas.
- Las ruedas, los frenos y el resto de componentes de la estructura no deben sufrir daño alguno.



Prueba de carga del somier y de los accionamientos

- La cama se carga con un peso equivalente a su carga de trabajo segura (250 kg).
- Todas las regulaciones indicadas en las instrucciones de uso y que suponen determinados requisitos se ejecutan en pruebas continuas de 3 000 ciclos.
- A continuación, debe ser posible continuar realizando todas las regulaciones. Los accionamientos y la resistencia de la cama no deben verse afectados.



Prueba de carga de las protecciones laterales

- Un péndulo de 25 kg impacta contra la protección lateral 25 veces desde una distancia de 1,60 m.
- Seguidamente, la protección lateral debe funcionar sin impedimentos. Ninguna de las piezas debe sufrir daños ni aflojarse.



Prueba de carga del mando manual

- Las teclas del mando manual se accionan 250 000 veces.
- Esto equivale a un número mayor al esperado durante la vida útil de la cama ya que, en el caso de un respaldo que se mueve con frecuencia, p. ej., se presuponen aproximadamente 24 000 activaciones.
- El mando manual debe preservar su plena funcionalidad.

«Me encanta ayudar a las personas, sobre todo en un equipo altamente motivado. ¡La cama de hospital Evario one, que manejamos cada día, nos es de gran ayuda para ello!».



Laila Tamin
Jefa de unidad

Nuestra oferta

- Manejo fácil e intuitivo
- Excelente maniobrabilidad
- Capacidad de adaptación a la diferente altura de los pacientes y del personal
- Accesorios adaptables individualmente
- Fácil de desinfectar

Conceptos de protección lateral para todas las necesidades

Tres variantes disponibles con ventajas específicas



▲ La protección lateral de 50/50 dividida ofrece protección a lo largo de toda la cama.



▲ La Evario one con protección lateral de 50/50 es perfecta para ámbitos especiales como los cuidados intensivos.

Opción 1: la protección lateral de 50/50 dividida


Al seleccionar la protección lateral adecuada, son muchos los factores determinantes: la protección, la movilización, la facilidad de manejo o el tipo de habitación. Con las tres variantes para la Evario one encontrará una solución a la medida de sus necesidades.

La protección lateral de 50/50 dividida procura una protección óptima en toda la longitud del somier. Los elementos del cabecero se mueven también al regular el respaldo para preservar la protección en cualquier posición.

Los medidores de ángulos de serie en la protección lateral, el respaldo opcional apto para radiología y el pedal para la regulación de la altura amplían las posibilidades de uso de la Evario one en el entorno clínico a ámbitos como los cuidados intermedios o los cuidados intensivos.



- ▲ La forma de los elementos del cabecero y del piecero aporta protección contra atrapamiento en cualquier posición.

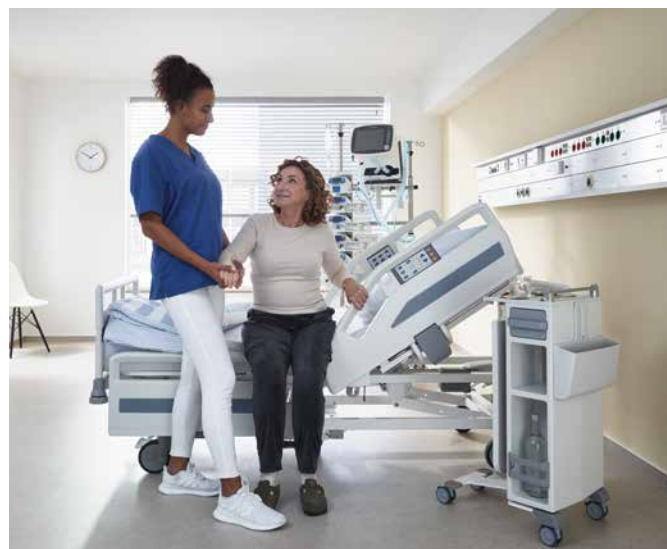

- ▲ La protección lateral dividida y las barandillas circundantes favorecen la movilización autónoma del paciente y descargan al personal responsable de los cuidados.

Ejemplo: geriatría



- ▲ El mecanismo de activación sencillo permite bajar con rapidez la protección lateral del piecero para dejar espacio suficiente para una movilización orientada al paciente.

Para pacientes mayores, la movilización es fundamental. La Evario one con protección lateral de 50/50 brinda asistencia durante este proceso. La protección lateral dividida ofrece protección y espacio libre al salir de la cama. Las grandes barandillas pueden utilizarse como apoyo específico al levantarse y sentarse, así como al estar de pie junto a la cama.

Además, es posible ajustar la altura óptima para cada paciente al levantarse o durante el traslado seguro a una silla de ruedas o una silla sanitaria para WC.

En 2030, 1 de cada 6 personas tendrá más de 60 años.

El aumento de la edad conlleva lo siguiente:

- un mayor riesgo de enfermedad y
- un mayor riesgo de enfermedades crónicas
- la probabilidad de úlceras de decúbito en pacientes mayores de 65 años es del 5 al 15 %.

Fuentes bibliográficas (internacionales y nacionales):
<https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Exec-Summary.pdf>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6290523/>



- ▲ La regulación progresiva de la altura permite encontrar siempre una altura ergonómicamente óptima para levantarse.

Opción 2: la protección lateral de $\frac{3}{4}$ dividida



▲ El elemento corto de la protección lateral del cabecero facilita el acceso al paciente y permite una vista despejada en el lugar de asistencia.

La protección lateral de $\frac{3}{4}$ dividida puede apoyar adecuadamente las necesidades especiales en las diferentes fases de la movilización. El espacio adicional disponible al salir de la cama procura seguridad, confianza y confort.



Manejo con una sola mano



Silenciosa



Ejemplo: neurología

- Si un paciente sufre una hemiplejía como consecuencia, p. ej., de un ictus, durante la movilización necesita mucho espacio para salir de la cama.
- La protección lateral de $\frac{3}{4}$ dividida puede apoyar ergonómicamente el proceso de movilización.

Opción 3: la protección lateral de $\frac{3}{4}$ continua



- ▲ El mecanismo de activación del piecero permite desbloquear, levantar y bajar silenciosamente y con rapidez la protección lateral de $\frac{3}{4}$ continua.

El espacio alrededor de la cama de hospital es valioso, en particular en habitaciones pequeñas. La protección lateral de $\frac{3}{4}$ continua de la Evario one no precisa de espacio adicional al bajarse. Esta protección bascula hacia abajo en paralelo a la cama.

De modo opcional, una pieza de relleno en el piecero ► puede procurar una protección completa.

- ▼ Incluso con la protección lateral bajada pueden verse perfectamente los accesorios enganchados.



Ejemplo: unidad de admisión

- Las camas para la unidad de admisión deben permitir trabajar de un modo económico en un espacio limitado.
- La Evario one con protección lateral de $\frac{3}{4}$ continua satisface estos requisitos y ofrece en todo momento una buena vista del paciente y de los accesorios sanitarios.

La movilización es beneficiosa

Una movilización temprana del paciente es beneficiosa, según confirman conceptos novedosos.* La regulación progresiva de la altura de la Evario one y el concepto de protección lateral de apoyo pueden favorecer una movilización pasiva, asistida y activa en todas las fases de forma individual y orientada al paciente.

La movilización temprana beneficia a todos

Tanto los pacientes como el hospital se benefician de las ventajas de una movilización temprana. Con frecuencia, los pacientes gozan después de una calidad de vida mejor y, según los estudios, precisan de una cantidad notablemente menor de analgésicos.

Fuentes bibliográficas:

<https://www.esicm.org/article-review-early-mobilisation-think-delirium/>

<https://medintensiva.org/es-early-mobilization-why-what-for-articulo-resumen-S0210569116302431>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202008/>

Concepto ERAS*

Comenzar cuanto antes:
3 horas después de la cirugía observando parámetros clínicos
Indicación de la fuente - ERAS

Evaluación

Respiración

FR 12-18/min
SpO2 ≥ 90 mmHg

Sistema cardiovascular

FC >50 <140/min
PAM >55 <140/mmHg
PA sist. >90 <200/mmHg

Conciencia

Somnoliento
Despierto
Con capacidad de reacción
Orientado en el tiempo y el lugar

Dolores

Escala de 1-10

Herida quirúrgica

Pérdida de sangre/cantidad de secreciones

Valoración de las fases

Fase 1:



Valoración individual según el ámbito quirúrgico

Nueva valoración 1.º día posoper.

- Decúbito supino – posicionamiento correcto sobre el somier
- Posible elevación del tronco con tope de 30° y autocontorno
- Posible cambio de posición cada 2 horas (pasivo/asistido) si permitido (ámbito quirúrgico)
- Movimiento pasivo/asistido/activo de todas las extremidades (prolongación de la cama)
- Posición de Trendelenburg inversa
- Posible posición de silla cardíaca
- Posible asiento en el borde de la cama (erguir por el lateral) 5 min/de pie delante de la cama 2 min

Seguridad y estabilidad en la fase 1 – continuar con la fase 2

* Fuente: <https://erassociety.org/>
ERAS = Enhanced-Recovery-After-Surgery / concepto multidisciplinar para la mejora de los resultados quirúrgicos

Fase 2:



Fase 3:



Fase 4:



co (p. ej., diferencias entre una cirugía de cadera, una cirugía de estómago o una fractura de brazo)

Valoración – superada

- Decúbito supino – posicionamiento correcto sobre el somier
- Posible elevación del tronco con tope de 30° y autocontorno
- Cambio de posición autónoma – posiciones tumbada y sentada correctas
- Movimiento asistido/activo de todas las extremidades (prolongación de la cama)
- Posible posición de silla cardíaca
- Posible asiento en el borde de la cama (erguir por el lateral) 15 min/de pie delante de la cama 2 min/caminar (distancia corta, p. ej., aseo)

Seguridad y estabilidad en la fase 2 – continuar con la fase 3

Valoración – superada

- Decúbito supino – posicionamiento correcto sobre el somier
- Posible elevación del tronco con tope de 30° y autocontorno
- Cambio de posición autónoma – posiciones tumbada y sentada correctas
- De pie delante de la cama/caminar (distancia más larga, p. ej., pasillo de la unidad)

Seguridad y estabilidad en la fase 3 – continuar con la fase 4

Valoración – superada

- Decúbito supino – posicionamiento correcto sobre el somier
- Posible elevación del tronco con tope de 30° y autocontorno
- Cambio de posición autónoma – posiciones tumbada y sentada correctas
- Al menos 2-3 horas fuera de la cama/ distancia más larga/escaleras

Conceptos de manejo individuales

El hecho de centrarse en las funciones de la cama realmente importantes no solo facilita enormemente el manejo, sino que ofrece una seguridad y un confort añadidos en el lugar de asistencia también en situaciones críticas. El panel de mando integrado en la protección lateral superior permite al personal responsable de

los cuidados acceder más rápido y de modo intuitivo a las funciones de la cama. Como alternativa, hay disponible un mando manual con los mismos símbolos y asignación colores. El pedal opcional para regular la altura de la cama complementa las posibilidades para el personal responsable de los cuidados.

Control sencillo con el panel de mando integrado



- ◀ De forma opcional, el panel está integrado en el elemento del cabecero de las dos variantes de protección lateral dividida.

Manejo con el mando manual ergonómico



- ▲ El mando manual está disponible para todos los modelos de protecciones laterales.



- ▲ Las teclas de función con fondo azul oscuro pueden reconocerse fácilmente gracias al contraste de colores.

Regulación de la altura con pedal



- ◀ El somier también puede desplazarse cómodamente en altura por medio de un pedal opcional.

Módulos de mando

Además del panel y del mando manual, un módulo extraíble e integrado en el piecero permite un control seguro de la cama. El módulo de mando M brinda un gran confort, mientras que el módulo de mando S está reducido de forma práctica a las

funciones esenciales. Ambos módulos de mando están alojados en la bandeja para ropa de cama extraíble y, si se desea, pueden fijarse al piecero.



Módulo de mando M

- ◀ Las teclas dispuestas generosamente del módulo de mando M permiten trabajar relajadamente.



Módulo de mando S

- ◀ El módulo de mando S ofrece todas las opciones de control importantes a primera vista.

Regulación rápida de emergencia

La posición de shock puede activarse con la palanca CPR situada en una posición visible y fácilmente accesible en la cabecera. Los cabeceros de desmontaje rápido garantizan el acceso libre

al paciente. Para una visibilidad óptima, las funciones de emergencia y los bloqueos están identificados en color naranja.



- ◀ Las teclas de emergencia naranjas en el panel de mando integrado.

La palanca CPR permite una bajada guiada. ▶




- ◀ Para poder acceder mejor al paciente, el cabecero y el piecero pueden desbloquearse y retirarse sin herramientas.

Excelente maniobrabilidad incluso en estancias pequeñas



Gracias a sus dimensiones compactas, la Evario one es perfecta para su uso en habitaciones compartidas. Aquí es fundamental contar con una maniobrabilidad precisa para descargar al personal y evitar colisiones. Las modernas ruedas y un chasis corto permiten maniobrar la cama sin problema. Una 5.ª rueda opcional puede además facilitar el desplazamiento en curvas cerradas.

Ventajas de la 5.ª rueda

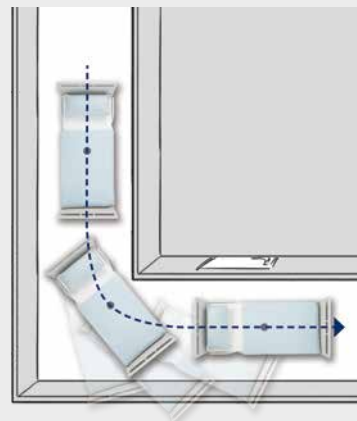

Al realizar un giro con un paciente en la cama, la 5.ª rueda mantiene la Evario one segura en su trayecto.

Siempre a la altura correcta

La altura de trabajo óptima individual puede ajustarse progresivamente con uno de los elementos de mando o con el pedal.



Posicionamientos individuales



Todas las regulaciones de la cama con una carga de trabajo segura de 250 kg también en funcionamiento con batería



◀ La posición de silla cardíaca descarga el corazón y potencia la circulación.

La posición de Fowler facilita la respiración y mejora el abastecimiento de oxígeno. ▶



◀ La basculación a la posición de inclinación de los pies puede prevenir aspiraciones.

La posición de Trendelenburg sirve, entre otras cosas, como medida de emergencia en caso de shock. ▶



Parada automática: el somier se para después de bascularse de nuevo en una posición horizontal sin necesidad de bajar por completo la cama.

Prolongación de la cama y del plano de los gemelos



Para ofrecer a pacientes altos un mayor confort de uso, el personal responsable de los cuidados puede activar muy fácilmente la prolongación opcional de la cama. En primer lugar se extrae el marco de la cama sin necesidad de herramientas. Para prolongar el somier puede elegirse un plano de los gemelos abatible.



▲ La prolongación del marco de la cama puede desbloquearse y extraerse sin herramientas.



▲ En la prolongación abatible del plano de los gemelos puede insertarse el acolchado de prolongación.



▲ Para prolongar el colchón ofrecemos una pieza acolchada a medida.

«El diagnóstico me afectó mucho, y estaba desesperada. La implicación del personal responsable de los cuidados y el ambiente interior tan agradable me ayudaron mucho. Siento que en la clínica estoy bien atendida».



Tara Olumide
Paciente

Nuestra oferta

- Cama ajustable según la altura del paciente
- Posibilidad de regular la cama cómodamente con panel de mando o mando manual
- La luz bajo la cama procura seguridad por la noche
- Protección lateral dividida como apoyo individual para la movilización


Confort para los pacientes

Prolongación sencilla de la cama



Los pacientes pueden alcanzar sin problema el panel de mando integrado. Las opciones de regulación están representadas de forma fácilmente comprensible.

- ◀ El panel de mando integrado está a la altura de los ojos del paciente.

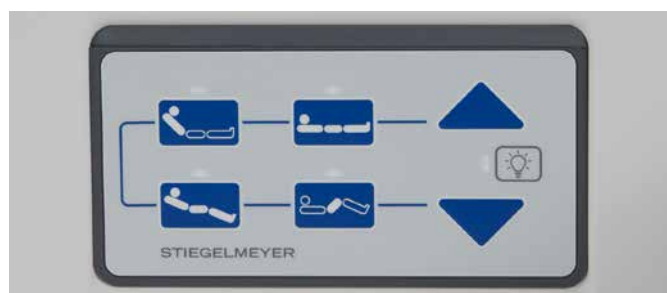

Manejo ergonómico del mando manual



Cualquier paciente se familiariza de inmediato con el mando manual ergonómico provisto de símbolos intuitivos, lo que genera una sensación positiva de seguridad.



- ▲ De ser necesario, el personal responsable de los cuidados puede bloquear y desbloquear de forma selectiva funciones de la cama por medio de un imán.



▲ Luz bajo la cama para una mejor orientación de noche.

Luz bajo la cama

La luz bajo la cama opcional señala al paciente el camino por la noche sin molestar a otros pacientes dormidos.

Casi un tercio de las caídas de pacientes en el hospital se producen al ir al baño solos.

Fuente bibliográfica:
https://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta255_bericht_de.pdf

Kinne, V., Klewer, J. Sturzereignisse in einem Universitätsklinikum. HBSscience 7, 40–46 (2016). <https://doi.org/10.1007/s16024-015-0256-1>

Cabecero fijo para una regulación de la altura segura

A menudo, en las habitaciones pequeñas las camas están situadas con el cabecero muy cerca de la pared. Por consiguiente, durante la regulación de la altura pueden producirse roces o daños en las instalaciones técnicas. El cabecero fijo opcional elimina este riesgo. La base del trapecio montada en el cabecero tampoco se desplaza al ajustar la altura.



▲ Las barras de suministro y los cuadros están protegidos contra colisiones.



▲ La base del trapecio opcional se mantiene siempre fija en su posición.



Nueva

Cama angosta diseñadas para espacios limitados

Gracias a su anchura reducida, la nueva Evario one es perfecta para habitaciones pequeñas. Durante el transporte suelen surgir inconvenientes cuando los pasillos son demasiado estrechos para una cama tradicional o incluso cuando resulta necesario trasladar dos camas juntas, y también cuando los marcos de las puertas son muy angostos. Nuestra nueva cama Evario one Angosta es Ideal para tener acceso en ascensores tradicionales con acceso limitado.

Las ventajas

- Las medidas del somier de 80 x 200 cm ofrecen al paciente un confort lo suficientemente elevado
- Anchura exterior de solo 89,5 cm
- Buena capacidad de maniobra en trayectos largos o espacios estrechos
- La protección lateral de $\frac{3}{4}$ continua ofrece seguridad
- Opcionalmente sin protección lateral o con riel DIN
- Prolongación de la cama integrada, comodidad para pacientes altos



Evario one con somier angosto




Eficiencia y seguridad exactamente donde son imprescindibles, p. ej., para el uso flexible en consultas ambulatorias.

Aquí, cada centímetro es fundamental para aprovechar el espacio, al igual que cada manija para facilitar el transporte. La cama ofrece una regulación eléctrica progresiva de la altura mediante un práctico control y un somier robusto e higiénico, opcionalmente también con soporte para casetes de rayos X. Es una cama óptima para exploraciones rápidas, traslados o descansos.



◀ Maniobrabilidad óptima en pasillos estrechos.

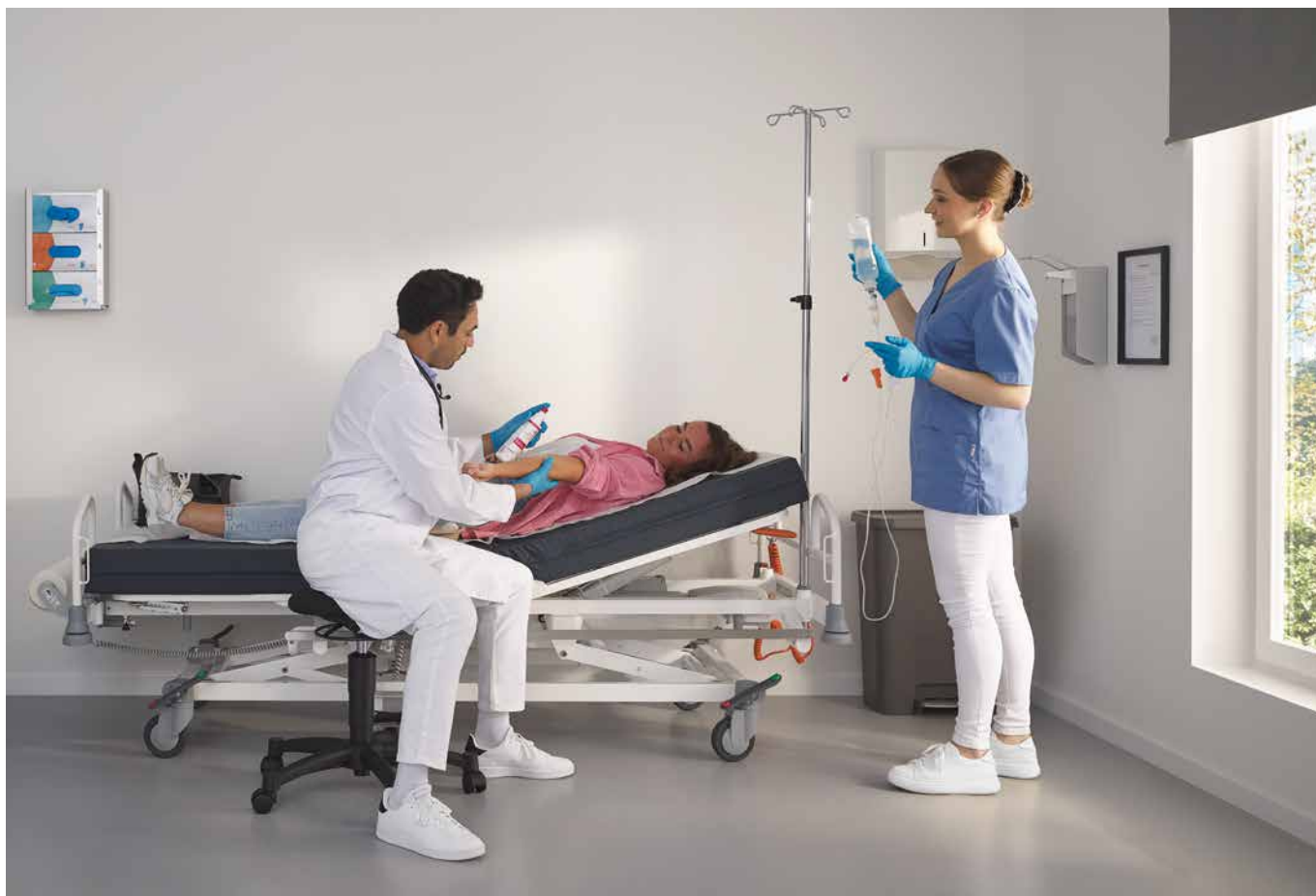

La cama perfecta para centros de salud u hospitales de atención solo durante el día.

Desarrollada específicamente para los requisitos de los ámbitos de atención ambulatoria, la Evario one angosta ofrece una funcionalidad máxima en un espacio mínimo.



Ya se utilice en salas de exploraciones o en el hospital de día, la Evario one angosta convence con:


- un manejo rápido
- funciones de regulación eléctricas
- posicionamiento seguro de los pacientes
- materiales higiénicos
- tecnología de mantenimiento reducido
- prácticos accesorios (portarrollos de papel)
- dispositivo de transporte independiente para el transporte vertical, p. ej., en ascensores estrechos

«Como especialista médico en un centro de salud, considero imprescindible contar con un proceso de tratamiento eficiente y fluido y una adaptación flexible a diferentes requisitos terapéuticos».

Dr. Ali Deeb
Especialista médico

Nuestra oferta

- Anchura exterior inferior a 90 cm
- Posibilidad de colocación de accesorios
- La altura del somier, el respaldo y el plano de los muslos pueden regularse eléctricamente de forma progresiva
- Es posible seleccionar opcionalmente un pedal para la regulación de la altura

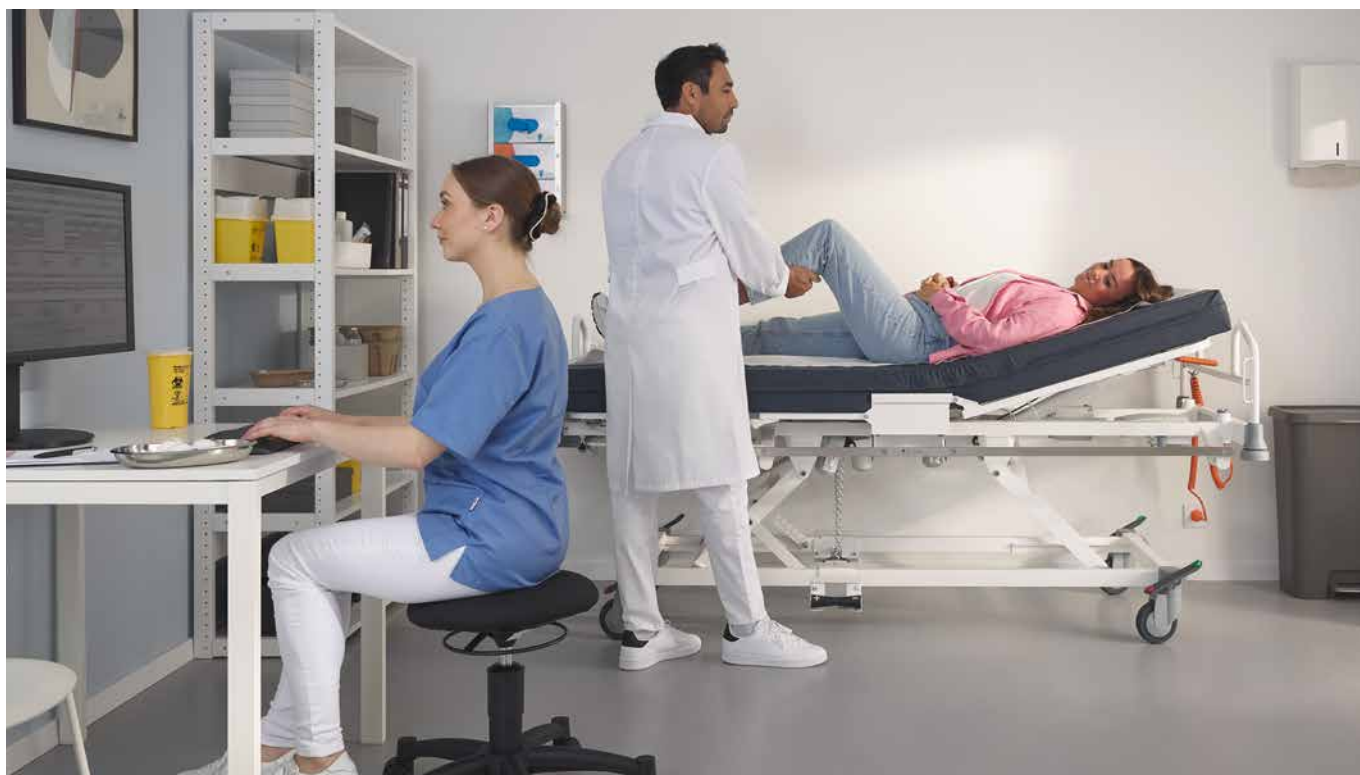

Si no se necesitan protecciones laterales, la cama puede configurarse con rieles DIN en ambos lados longitudinales del somier. Esto convierte a la cama en un acompañante óptimo para la diálisis, la oncología u otros ámbitos terapéuticos.



▲ Capacidad de regulación eléctrica progresiva.

▲ La cama puede configurarse opcionalmente con rieles DIN para colocar accesorios como, p. ej., un soporte para reposabrazos

«A todo fabricante, cuyos productos reduzcan manifiestamente los riesgos, le doy una buena nota en el proceso de valoración de muestras.»

Maria Abbet
Técnica en higiene

Nuestra oferta

- Diseño plano con buenas características higiénicas
- Tendido de cables oculto
- Elementos del somier desmontables para el acondicionamiento
- Bastidor compacto para una limpieza sencilla

Higiene segura

Acondicionamiento manual sencillo

Una higiene segura y validable es más imprescindible que nunca. La Evario one facilita al equipo de higiene el acondicionamiento

manual gracias a su diseño con pocos huecos. Esto ahorra tiempo y reduce el esfuerzo físico y los recursos de personal necesarios.



▲ Sin huecos inaccesibles en el cabecero ni en las protecciones laterales.



▲ Somier liso con desmontaje sencillo de la cubierta de plástico.



▲ Transporte sin esfuerzo de la mesita de noche Quado junto con la cama para el acondicionamiento.



▲ Unidades de control protegidas.

Servicio técnico



▲ El sistema de control y la batería están ubicados muy accesibles en el cabecero de la cama.

Desde la entrega de la cama hasta el final de su vida útil, usted puede confiar en la asistencia de primera clase de nuestro equipo de servicio. Aquí se incluye,

p. ej., un abastecimiento durante

al menos 15 años de piezas de repuesto a partir de la adquisición de la cama. Por ello, los productos Stiegmeyer son siempre una inversión segura en el futuro.

Le asistimos a usted y a sus técnicos internos en todas las inspecciones y mantenimientos necesarios. Estas tareas pueden realizarse sin esfuerzo gracias, en particular, al acceso sencillo al sistema de control de la cama.


Su distribuidor estará encantado de asesorarle sobre nuestras ofertas de servicio in situ.

«Para nosotros, el tiempo es el componente más importante. Debemos recibir los productos y las piezas de repuesto con rapidez. Prefiero los productos que puedan mantenerse y repararse de forma rápida y sencilla. En la Evario one, todos los componentes están perfectamente accesibles».



George Schumacher
Técnico interno

Espacio para numerosos accesorios

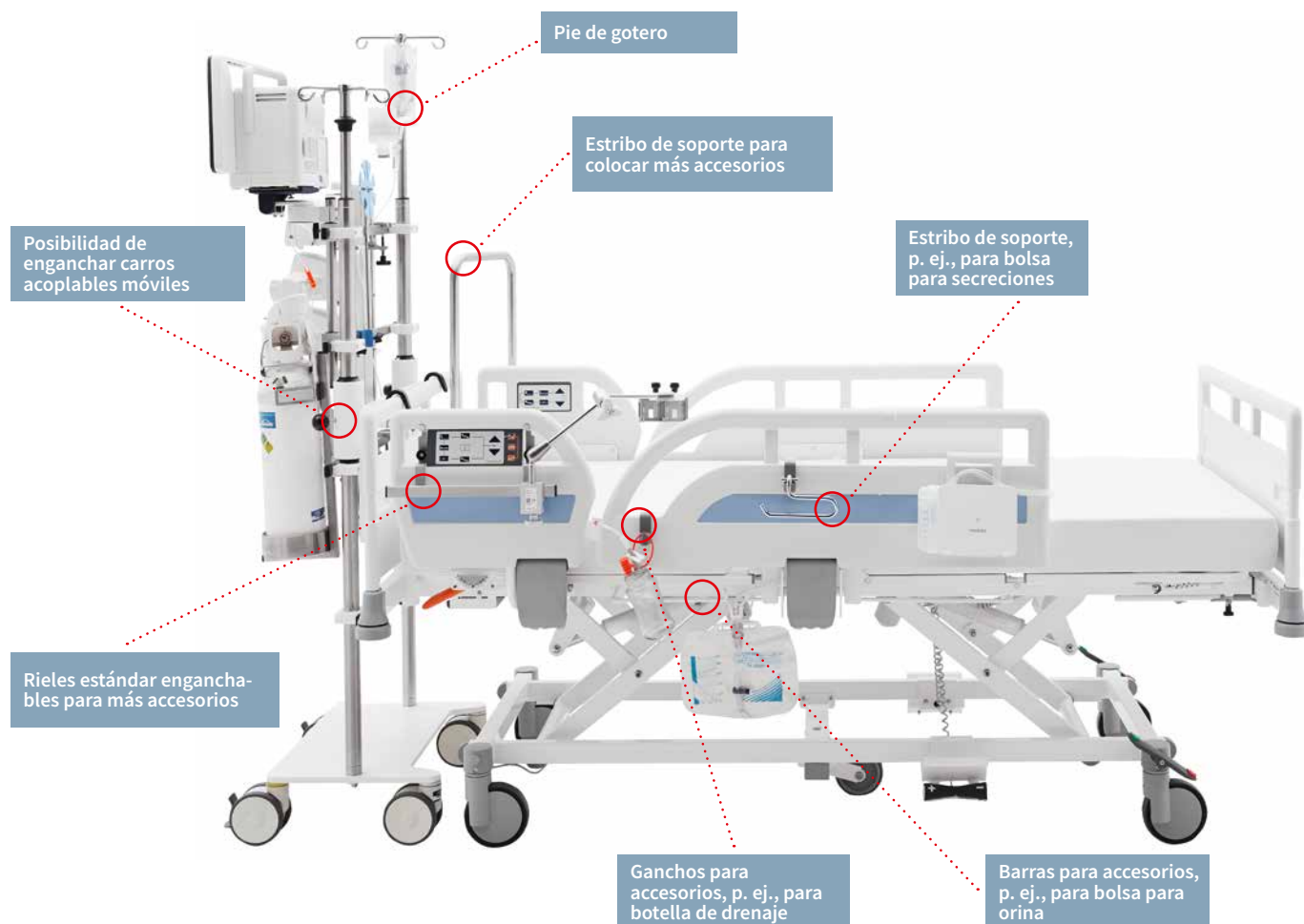

Otros productos útiles para complementar su Evario one

¡Esto también le podría interesar!

Mesita de noche Quado



- ▲ La mesita de noche estrecha Quado es perfecta para el día a día en el hospital en habitaciones con poco espacio. Cuando no se está utilizando su mesita de cama, esta puede plegarse de forma fácil y silenciosa. La Quado también puede utilizarse, como alternativa, a modo de carro para medicamentos, de limpieza o de unidad. Es posible encajar entre sí varias Quados para almacenarlas en un espacio reducido.

Camas para la unidad de cuidados intensivos Evario y Sicuro tera



- ◀ Para los exigentes requisitos de las unidades de cuidados intensivos, Stieglmeyer ofrece camas con un equipamiento altamente funcional, p. ej., con basculación lateral o báscula.

Sistema de carga variable Novacare



- ▲ El sistema de carga variable Novacare protege al paciente contra cargas por presión puntuales y reduce el riesgo de decúbito.

Cuna Jovie



- ▲ La nueva cuna conforme a la normativa Jovie promueve la fase de apego directamente tras el parto. El cesto de la Jovie puede abrirse por ambos laterales según la posición.

Equipamiento y opciones

Cabecero y piecero



Diseño Intercontinental

- Fabricados en plástico PP
- Especialmente fáciles de limpiar
- Cabecero y piecero completamente extraíbles con protección contra una extracción imprevista



Diseño Como

- Con perfiles de aluminio lacado
- Cabecero y piecero completamente extraíbles
- Protección contra una extracción imprevista
- Decoraciones conforme a la colección Stieglmeyer-Resopal



Asas para empujar

- Pueden montarse en el cabecero y el piecero
- También en combinación con diseño Como
- Acero, pulverizado en blanco cristal
- Completamente extraíbles con protección contra una extracción involuntaria
- Para una posición de agarre cómoda durante el transporte



Cabecero fijo

- Cabecero fijado al chasis, conserva su posición durante la regulación de la altura del somier
- Protección contra colisiones con el mobiliario
- Cabecero y piecero completamente extraíbles con protección contra una extracción imprevista

Protecciones laterales



Protección lateral de 3/4 continua

- Altura de protección: aprox. 38 cm sobre el somier
- Bajada silenciosa
- Vista despejada para el paciente



Protección lateral de 3/4 dividida

- Bajada silenciosa con activación con una sola mano
- Altura de protección: aprox. 39 cm sobre el somier
- Protección lateral dividida de plástico altamente resistente



Protección lateral 50/50

- Altura de protección: aprox. 40 cm sobre el somier
- Protección lateral dividida de plástico altamente resistente
- Bajada silenciosa con activación con una sola mano
- Indicador de ángulo en la protección lateral

Somieres




Somier de lamas

- Lamas metálicas con recubrimiento en polvo
- Fácil de limpiar



Somier de lamas con cubierta de PP

- Lamas metálicas con recubrimiento en polvo y cubiertas de plástico
- Cubiertas de plástico desmontables fácilmente para una limpieza sencilla
- Con entalladuras para sistemas de correas

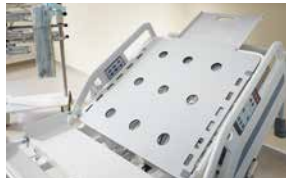

Respaldo apto para radiología

- Respaldo de plástico sólido (HPL), apto para radiología
- Resto del somier de lamas
- Incluye soporte para casetes
- El paciente se puede someter a exámenes radiológicos sin salir de la cama

Ruedas



Rueda con cubierta

- Diámetro de 125 mm
- Rango de ajuste de la altura del somier aprox. 36-80 cm
- Altura del bastidor sobre el suelo aprox. 15,3 cm



Rueda integral

- Diámetro de 150 mm
- Rango de ajuste de la altura del somier aprox. 38-82 cm
- Altura del bastidor sobre el suelo aprox. 17,3 cm



5.ª rueda

- Diámetro de 125 mm

Estribo de frenado



Estribo de frenado de plástico

- Plástico
- Superficie de pisada identificada en color
- Manejo rápido e intuitivo



Freno de arco metálico, en el cabecero

- De metal recubierto en polvo
- Con protección lateral dividida $\frac{3}{4}$

Pestaña de frenado continua, en el piecero



De metal recubierto en polvo

- Pisar para frenar
- Para liberar el freno, levantar el arco desde abajo con el pie

Ruedas antichoque



Plástico

- Diámetro de 80 mm
- Material: poliamida (PA6)
- Incluye cono antichoque

Elementos de mando



Panel de mando light

- Integrado en ambos lados de la cama en la protección lateral dividida
- Prácticas opciones de ajuste para pacientes (lado interior) y personal responsable de los cuidados y técnico (lado exterior)
- Posiciones de la cama preconfiguradas
- Activación rápida de posiciones de emergencia



Mando manual

- Mando manual con función de bloqueo para el personal responsable de los cuidados
- Manejo sencillo de la cama
- Regulaciones de emergencia de activación directa



Módulo de mando S

- Posibilidad de manejar y bloquear las funciones por separado
- Ajuste de la posición de Trendelenburg y CPR
- Puede almacenarse en la bandeja para ropa de cama cuando no se utilice



Módulo de mando M

- Bloqueo, manejo e indicación de todas las funciones adicionales incl. ajustes de emergencia, posición de transporte y de tratamiento
- Funciones de memoria
- Indicación del nivel de carga de la batería



Pedal

- Ajuste sencillo de la altura de la cama con el pie

Equipamiento electrónico



Iluminación de la parte inferior de la cama

- Activable mediante mando manual o panel de mando integrado
- Luz discreta no deslumbrante para orientarse en la oscuridad



Señal de frenado

- Emisión de una señal acústica si no se ha desconectado de la red y se suelta el freno
- Protección frente a daños y desplazamientos imprevistos de la cama

Otros equipamientos



Barras para accesorios

- Permite colocar dispositivos adicionales en ambos lados de la cama, ahorrando espacio



Prolongación integrada para el plano de gemelos

- Mayor comodidad en la prolongación de la cama
- Al desplegar el estribo se prolonga el plano de los gemelos



Pieza de relleno de protección lateral

- Construcción soldada de tubos de acero
- Puede engancharse sin herramientas



Medidor de ángulos

- Medidor de ángulos de fácil lectura en protección lateral de $\frac{3}{4}$
- Ajuste seguro del somier para posicionamientos especiales

Colores y acabados

Para adaptar la Evario one al concepto individual de su institución, ofrecemos una selección de 12 acabados de la colección Stiegmeyer Resopal.

Silver Grey
0160-60

Snow White
9417-60

Gold
0446-60

Azur
0744-60

Ottawa Maple*
4209-60

Eternal Cherry*
4325-60

Global Beech*
4306-60

Noce Praliné*
4452-60

Valley Oak*
4166-60

Noce Lyon*
4232-60

Baltic Sea
D475-60

Storm
10542-60

* sólo para los picos superior e inferior de Como

Equipamientos y datos técnicos

Equipamientos/opciones	Ancho de 90 cm	Ancho de 80 cm
Protecciones laterales		
Protección lateral de ¾ continua	✓	O
Protección lateral de 50/50 dividida con indicador de ángulo integrado	O	–
Protección lateral de ¾ de plástico dividida	O	–
Sin protección lateral	–	✓
Sin protección lateral con riel DIN	–	O
Dieño del cabecero y piecero		
Intercontinental	✓	–
Como	O	✓
Cabecero fijo, no puede moverse	O	–
Asas para empujar	–	O
Color básico		
Blanco cristal	✓	✓
Descontaminación, grado de protección		
Acondicionamiento manual IPX4	✓	✓
Somier de 4 divisiones		
Somier de lamas metálicas	✓	✓
Somier de lamas metálicas con cubierta de PP	O	O
Respaldo apto para radiología	O	O
Ruedas antichoque		
4 de plástico, giratorias	✓	✓
Laufrollen		
Rueda doble de Ø 150 mm	O	O
Rueda con cubierta de Ø 125 mm	✓	✓
Rueda integral de Ø 150 mm	O	O
5.ª rueda de Ø 125 mm	O	O
Revestimiento de rueda conductor (no en la 5.ª rueda)		
1 rueda	O	O
Estribo de frenado		
Pestaña de frenado en el piecero	O	O
Palanca de freno, cabeza	O	O
2 uds. de plástico con distintivo en color, 2 uds. metálicas o plástico	O	O
2 uds. de plástico con distintivo en color	✓	✓
Posición de la rueda de guía		
Cabecero derecha	✓	✓
Cabecero izquierda	O	O
Piecero derecha	O	O
Piecero izquierda	O	O
Centro de la cama	O	O
Elementos de mando		
Mando manual con función de bloqueo	✓	✓
Panel de mando light integrado	O	–
Panel de mando light integrado + mando manual con función de bloqueo	O	–
Módulo de mando S en la bandeja para ropa de cama	O	O
Módulo de mando M en la bandeja para ropa de cama	O	O
Pedal para la regulación de la altura	O	O

Ausstattungen / Optionen	90-cm-Breite	80-cm-Breite
Otros equipamientos		
2 alojamientos para pies de gotero respectivamente en el cabecero y en el piecero	✓	✓
5.ª rueda	O	O
Bandeja para ropa de cama	O	O
Prolongación del plano de los gemelos	O	O
Prolongación de la cama integrada	O	O
Medidor de ángulos	O	O
Rieles de accesorios o estandar	O	O
Alojamiento para la base de trapecio		
2 casquillos para base de trapecio de tubo redondo en el cabecero	✓	✓
Alojamiento exterior para la base de trapecio	O	–
Equipamiento electrónico		
Iluminación de la parte inferior de la cama	O	O
Señal de frenado	O	O
Batería		
Batería de gel de plomo	O	O

Todas las medidas son aproximadas.

Datos técnicos	Ancho de 90 cm	Ancho de 80 cm
Medidas y pesos		
Medidas exteriores	99,7 x 214 cm	89,5 x 214 cm
Medidas exteriores (con cabecero fijo)	99,7 x 219 cm	–
Somier (medida del colchón)	87/90 x 200 cm	80 x 200 cm
Prolongación de la cama	29 cm	29 cm
División del somier	76 – 21 – 32 – 52 cm	76 – 21 – 32 – 52 cm
Compensación de longitud del respaldo	4 cm	4 cm
Carga de trabajo segura	250 kg	250 kg
Peso máximo del paciente	240 kg	240 kg
Altura sobre el suelo del bastidor	15,3 - 17,3 cm	15,3 - 17,3 cm
Peso en vacío	130 kg	130 kg
Altura de la protección lateral de ¾ continua	38 cm	38 cm
Altura de la protección lateral de ¾ dividida	39 cm	–
Altura de protección de la protección lateral de 50/50 dividida	40 cm	–
Rangos de ajuste		
Basculación de Posición baja de la cabeza	15,5°	15,5°
Basculación de Posición de inclinación de los pies	15,5°	15,5°
Altura del somier (rueda con cubierta de Ø 125 mm)	36 - 80 cm	36 - 80 cm
Altura del somier (rueda integral de Ø 150 mm)	38 - 82 cm	38 - 82 cm
Ángulo del respaldo	70°	70°
Ángulo del plano de los muslos	32°	32°
Ángulo posición estirada con piernas elevadas	11°	11°

✓ = Estándar O = Disponible opcionalmente

La ejecución técnica y visual difiere de otros modelos Evario



STIEGELMEYERGROUP



FOR PEOPLE WHO CARE

Pensamos en soluciones integrales para personas en el ámbito de la salud y los cuidados, en todo el mundo.

1 000

EMPLEADOS
EN TODO EL
MUNDO

11

DELEGACIONES

en Alemania, Polonia,
Países Bajos, Bélgica,
Francia, Finlandia,
Sudáfrica y China



OFERTAS
a medida para todos los
MERCADOS

CERTIFICACIÓN
internacional



INGENIERÍA
ALEMANA



MÁS DE

100 000

camas
fabricadas
al año

15 AÑOS

de suministro de
piezas de repuesto

DISTRIBUCIÓN
en más de

100

países

Nuestras especialidades

Hospital

Residencia de cuidados

Asistencia domiciliaria

Camas confort

Mobiliario profesional

Servicio técnico

Nuestras marcas



STIEGELMEYER



BURMEIER



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Sede central / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Sede central / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com