

NOWOŚĆ:
Aparto
Rodzina modu-
łowych szafek
przyłóżkowych

Szafki przyłóżkowe

Domowy komfort i wsparcie

**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.**

Szafki przyłóżkowe firmy Stieglmeyer

Idealne połączenie funkcjonalności, bezpieczeństwa i stylu

Szafka przyłóżkowa to prawdopodobnie najważniejszy mebel w pokoju podopiecznego. To w nim pacjenci przechowują swoje rzeczy osobiste i przedmioty codziennego użytku, by mieć do nich łatwy dostęp. Szafka pozwala zachować niezależność, jest wsparciem podczas czytania czy też odbierania e-maili. Opiekunowie używają jej do przechowywania sprzętu, co sprawia, że wykonywanie codziennych czynności jest łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Idealna szafka przyłóżkowa łączy w sobie przydatne funkcje, bezpieczeństwo i styl. Powinna dawać odrobinę przytulności i harmonijnie komponować się z pokojem. Szafki przyłóżkowe Stieglmeyer spełniają te wszystkie wymagania, aby sprostać wszelkim zadaniom codziennej pielęgnacji.

Spis treści

Przegląd modeli	4	Pleto – stylowy towarzysz	21
Aparto – nowa definicja szafki przyłóżkowej	6	Quado – mobilny towarzysz	22
Aparto brevo – elastyczna, niska szafka przyłóżkowa	10	Uchwyty i decory	23
Combino – wszechstronna szafka przyłóżkowa	16	Aksesoria	24
Estrado – uniwersalna szafka przyłóżkowa	18	Grupa Stieglmeyer	25
Alcamo – przytulna, niska szafka przyłóżkowa	19	Wyposażenie i opcje	26
Conturo – solidna szafka przyłóżkowa	20		



Przegląd modeli



06 Aparto

Rodzina modułowych szafek przyłóżkowych

- Liczne warianty wyposażenia dla różnych potrzeb
- Innowacyjne rozwiązanie blatu bocznego
- Łatwa w obsłudze, wspiera pracę personelu

10 Aparto brevo

Niska szafka przyłóżkowa, która zapewnia dużą elastyczność

- Idealny towarzysz dla łóżka na poziomie podłogi
- Pełna funkcjonalność i elastyczność przy niskich wysokościach
- Możliwość regulacji wysokości blatu bocznego



16 Combino

Wszechstronna szafka przyłóżkowa

- Nowoczesna szafka przyłóżkowa z zaokrąglonymi metalowymi profilami narożnymi
- Różnej wielkości szuflady
- Błat boczny może być przymocowany po obu stronach szafki



18 Estrado

Uniwersalna szafka przyłóżkowa

- Miejsce do przechowywania w korpusie dostępne z obu stron
- Duża powierzchnia blatu górnego
- Uchylny blat boczny



19 Alcamo

Przytulna szafka przyłóżkowa

- Zaokrąglone profile narożne w kolorze drewna
- Dostępna z obu stron
- Regulacja blatu bocznego wspomagana siłownikiem gazowym



20 Conturo

Solidna szafka przyłóżkowa

- Dostępna z obu stron
- Kółka 360° ułatwiają manewrowanie
- Opcjonalna lodówka



21 Plecto

Stylowy towarzysz

- Błat w 2 wariantach: jednoczęściowy lub dzielony z możliwością regulacji nachylenia
- Duży zakres regulacji wysokości
- Stabilna konstrukcja ramy C pasująca pod łóżka



22 Quadro

Mobilny towarzysz

- Oszczędzająca miejsce szafka przyłóżkowa z dużą ilością miejsca do przechowywania
- Optymalne właściwości higieniczne
- Łatwa manewrowość

Aparto – rodzina modułowych szafek przyłóżkowych

Nasza rodzina szafek przyłóżkowych Aparto koncentruje się na wymaganiach zarówno podopiecznych, jak i opiekunów. Opracowaliśmy tę nową gamę w ścisłej współpracy z profesjonalistami z sektora opieki. Szafki przyłóżkowe Aparto łączą nowoczesne trendy pielęgnacyjne z domową atmosferą. Odkryj ich silne zalety:

Żadnych kompromisów:

Od bardzo niskich łóżek po indywidualne wysokości dopasowanych do opieki szafek przyłóżkowych Aparto, które są zawsze idealnym towarzyszem. Oferują podopiecznym bezpieczną dostępność przedmiotów codziennego użytku i wsparcie dla personelu opiekuńczego.

Elastyczność:

Jeśli model Aparto jest wyposażony w zintegrowany blat boczny, jego korpus można obrócić w kilka sekund. Dzięki temu szafka przyłóżkowa może być używana po obu stronach łóżka i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb i okoliczności w pokoju.

Indywidualność:

Szuflady, wysuwany blat, blat boczny z regulacją wysokości, atrakcyjne dekory drewna – rodzina szafek modułowych z rodziny Aparto spełni każde życzenie.

Doskonałość:

Skorzystaj z wielu szczegółów, które ułatwią Ci codzienną rutynową pracę. Oszczędzaj czas i energię dzięki praktycznym rozwiązaniom obsługi za pomocą jednej ręki, a tym samym zwiększ niezależność podopiecznych.



Aparto – nowa definicja szafek przyłóżkowych

Ekonomiczny wybór:
Uniwersalne zastosowanie,
po obu stronach szafki



180°

Dobrze przemyślane:
Wypadnięcie przedmiotów
jest zminimalizowane dzięki
bocznym krawędziom.



Początek
nowej linii projektowania:
Nowoczesna, wysokiej jakości
przytulność i urok – wkrótce
dostępne również kolejne
wersje modelu



**Łatwy do
czyszczenia:**
Idealna do walki
z drobnoustrojami



Nieograniczona elastyczność:

- 2 wysokości
- 12 dekorów
- 7 uchwytów
- pojedyncze przegródki



**Uzpełnij swój
wybór:**
Przydatne akcesoria



Intuicyjna i stabilna:
Bezpieczna i ergonomiczna
w każdej pozycji



Idealny towarzysz:
Łatwa w manewrowaniu




Aparto

Modułowa szafka przyłóżkowa

Dobra szafka przyłóżkowa może zaspokoić wiele różnych potrzeb. W zależności od możliwości poznawczych i fizycznych podopiecznego najlepszym miejscem do przechowywania rzeczy osobistych może być łatwo dostępny schowek w środku szafki. Pacjent, który nie może wstawać, wymaga stabilnego stołu przyłóżkowego do spożywania posiłków i napojów. Liczne wersje z rodziny Aparto spełniają wszelkie te wymagania.

A to nie wszystko – Aparto zawiera innowacje projektowe, które przekonają zarówno podopiecznych, jak i opiekunów. Intuicyjne rozwiązania i innowacyjny projekt blatu bocznego sprzyjają samodzielności pacjenta. Dzięki dużym kołom opiekunowie mogą manewrować szafką przyłóżkową bez większego wysiłku.

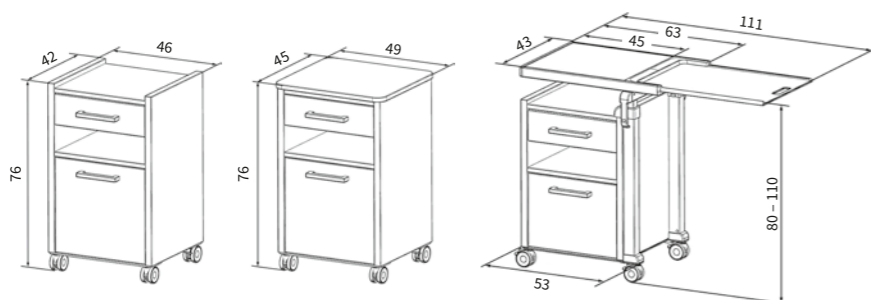

▲ Błat boczny w szafce Aparto może być w łatwy i szybki sposób złożony.



▲ Aparto oferuje dużo miejsca do przechowywania, jak i bezpieczną powierzchnię do postawienia rzeczy na szafce. Lekko podniesione boki zapobiegają wypadaniu przedmiotów.



▲ Zintegrowany wysuwany blat zapewnia praktyczne przedłużenie powierzchni użytkowej, gdy jest to wymagane.



▲ Dla rodziny szafek Aparto dostępne są „adaptory Somero”. Umożliwiają one zamocowanie uchylnego blatu bocznego od modelu Somero.



▲ Stabilny blat boczny zapewnia dużo miejsca na przedmioty codziennego użytku typu książki, przybory do pielęgnacji, czy też oferuje miejsce na posiłki. Dzięki temu podopieczni i opiekunowie mogą mieć zawsze wolne ręce.



▲ Wielofunkcyjna listwa zasilająca z klipsem dostarcza energię elektryczną do smartfonów, radia i lamp. Jest łatwa do wyjęcia w celu wyczyszczenia szafki przyłóżkowej.



▲ Dzięki płynnie działającym kołom, Aparto może bez wysiłku obracać się w miejscu lub poruszać się po pokoju.



▲ Błat boczny można zdjąć w kilka sekund, bez użycia narzędzi np. w celu dezynfekcji.

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ Rozkładany blat boczny

Błat boczny z naszej oferty Aparto można bez wysiłku przedłużyć w pozycji poziomej. Ma to ogromne zalety w codziennej pracy:

- Obsługa jedną ręką ułatwia opiekunom pracę w nagłych sytuacjach
- Bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie od ok. 81 – 111 cm
- Wielu użytkowników może obsługiwać blat boczny bez niczyjej pomocy i w ten sposób zachować pewien stopień niezależności
- Bezstopniowe rozsuwanie blatu do wymaganego stopnia
- Niezawodna higiena dzięki łatwemu wyjmowaniu do czyszczenia
- Obrotowy korpus pozwala na ekonomiczne wykorzystanie blatu po obu stronach łóżka




▲ Duże, solidne blaty Aparto mogą być również używane w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych – takich jak mycie czy zabiegi medyczne.

Aparto brevo

Elastyczna, niska szafka przyłóżkowa

Łóżka z niskim leżem na poziomej podłodze odgrywają coraz ważniejszą rolę w opiece. Dotychczas wybór odpowiednich niskich szafek przyłóżkowych był ograniczony i oferował bardzo niewiele indywidualnych opcji wyposażenia. Z Aparto brevo nie trzeba iść na żadne kompromisy: od obszernego blatu bocznego

do wysuwanego blatu. Posiada wiele funkcji pomocniczych, które dotychczas byłyby dostępne tylko w standardowych modelach. Użytkownicy łóżka z niskim leżem na poziomej podłodze mogą bez wysiłku sięgnąć po szklankę stojącą na szafce przyłóżkowej lub sięgnąć po lekturę czy włączyć lampkę.

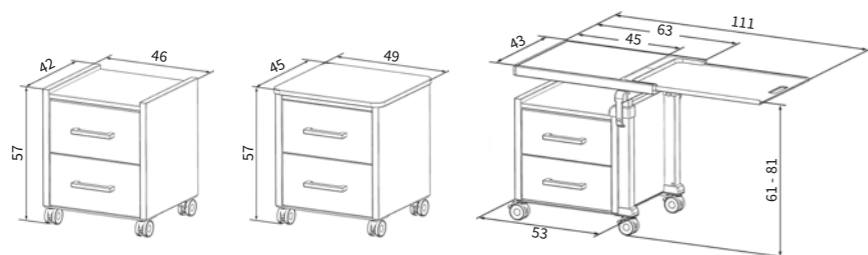

- ▲ Nawet w przypadku łóżek z niskim leżem, blat boczny z regulacją wysokości oferuje wygodną powierzchnię do przechowywania przedmiotów osobistych.
- ▼ Dzięki zaokrąglonej górnej powierzchni i zintegrowanej wysuwanej półce, Aparto brevo zapewnia przytulną wygodę i komfort przy niskiej wysokości.

- ▲ Płynnie wysuwane szuflady zapewniają bezpieczne przechowywanie.



JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ Inteligentna na każdym poziomie

Duża elastyczność pozwala na ekonomiczne użytkowanie szafki Aparto brevo:

- Można ją używać na dowolnej wysokości dzięki regulowanej wysokości blatu bocznego od ok. 61 do 81 cm
- Idealny towarzysz na poziomie podłogi, niskiej wysokości i przy standardowych łóżkach do opieki długoterminowej
- Przyjazna pozycja pracy dla opiekunów
- Dzięki obrotowemu korpusowi i łatwości manewrowania może być używana w różnych miejscach w pomieszczeniu



- ▲ Podopieczni, którzy są szczególnie podatni na upadki i uzależnieni od bardzo niskiego łóżka, doświadczają wielu ograniczeń w życiu codziennym. Dzięki niskiej wysokości Aparto brevo pacjenci mogą uzyskać lepszą jakość życia.

- ▼ Blat boczny o regulowanej wysokości przy szafce przyłóżkowej umożliwia ergonomiczną pozycję pracy personelu.

- ▼ Podopieczni z ograniczeniami fizycznymi mogą zawsze sięgnąć po rzeczy osobiste znajdujące się na szafce przyłóżkowej Aparto brevo.



Możliwości przystosowania:

Asortyment produktów Aparto oferuje obrotowe korpusy szafek

Ciesz się nową elastycznością naszych szafek przyłóżkowych Aparto: obrotowy korpus (bez użycia narzędzi) sprawia, że każdą szafkę Aparto można używać wszędzie – nawet tam, gdzie np. zdrowie podopiecznego wymaga medycznie wskazanej zmiany. Dzięki temu wszyscy opiekunowie mogą pracować ekonomicznie i odnosić korzyści z dużej pewności planowania.



▲ Szafkę obraca się w trzech prostych krokach.
Krok 1: Zwolnij blokadę korpusu szafki, pociągając ją do góry.



▲ **Krok 2:** Delikatnie popchnij korpus szafki w lewo i do przodu, a następnie obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



▲ **Krok 3:** Ustaw korpus szafki zgodnie z wymaganiami i zamocuj blokadę korpusu szafki.



▲ Łatwa w regulacji wysokość stolików przyłóżkowych z rodziny Aparto idealnie spełnia potrzeby każdego podopiecznego.



▲ Mobilny stół można ustawić nad szafką przyłóżkową Aparto, aby zaoszczędzić miejsce, gdy nie jest używany.



▲ Bezstopniowe zmienne przedłużenie blatu stolika przyłóżkowego rozszerza powierzchnię na więcej niż metr.

Serwer z serii Aparto

Innowacyjny towarzysz

Rodzina szafek przyłóżkowych Aparto wkrótce powiększy się o stół Aparto i Aparto brevo. W szczególności wersja brevo o niskiej wysokości jest idealnym towarzyszem do bardzo niskich łóżek, takich jak nasz model Tereno. Innowacyjne opcjonalne funkcje oferowane przez rodzinę szafek Aparto, takie jak oszczędzający miejsce wsuwany blat boczny i nieskomplikowane czyszczenie, są również oferowane przez stoliki.

W przygotowaniu są również różne warianty korpusów szafek z rodziny Aparto.

Dostępne wkrótce!

Dla wygodniejszej pracy i życia

Rodzina Aparto oferuje korzyści dla każdego użytkownika domu opieki

Ważny jest dla mnie dobry stosunek jakości do ceny, długa żywotność, duża elastyczność i optymalna higiena.

Kierownik Domu Pomocy Społecznej ma na uwadze dobro wszystkich podopiecznych w domu opieki. Jeśli chodzi o wybór łóżek i mebli, nacisk kładziony jest na wsparcie dla wszystkich użytkowników, łatwość obsługi i ekonomiczność w użytkowaniu. Nasze szafki przyłóżkowe Aparto spełniają te wymagania:

- Łatwa i intuicyjna obsługa
- Łatwe manewrowanie
- Wsparcie pracy personelu opiekuńczego dzięki blatowi bocznemu z regulacją wysokości

Nasza idealna szafka przyłóżkowa jest ergonomiczna i łatwa w obsłudze. Wspiera zarówno mieszkańców, jak i opiekunów.

Kierownik personelu opieki musi przezwyciężyć szereg trudności i wyzwań: personel w różnych placówkach musi być zmotywowany, a jego zdrowie zachowane. Podopieczni i ich bliscy powinni czuć się jak w domu. Nasze Aparto pomagają w tych zadaniach:

- Atrakcyjne koszty zakupu i elastyczne użytkowanie
- Przytulny, indywidualny projekt
- Łatwe, dokładne czyszczenie zapewniające bezpieczną higienę

Im mniej będę musiał korzystać z zestawu narzędzi, tym szybciej będę mógł dostosować Twój sprzęt do aktualnych wymagań.

Zarząd obiektu utrzymuje budynek i wyposażenie tak, aby stworzyć efektywne środowisko pracy. Dlatego łóżka i szafki przyłóżkowe powinny być bezpieczne, łatwe w utrzymaniu czystości i dostosowane do wymagań panujących w salach podopiecznych. Seria Aparto wspiera te cele:

- Solidna i trwała konstrukcja
- Beznarzędziowa obsługa
- Wsparcie dzięki pierwszorzędnemu serwisowi Stieglmeyer

Wiele aktywności fizycznych jest dla mnie trudnych, ale nadal chciałbym żyć tak niezależnie, jak to tylko możliwe.

Wyprowadzka z własnego domu do domu opieki często wiąże się z ogromną utratą prywatności i niezależności. Dlatego jeszcze ważniejsze jest, aby pokój i meble, które się w nim znajdują dawały poczucie indywidualności i bezpieczeństwa. Ważnym elementem jest nasza szafka przyłóżkowa Aparto:

- Atrakcyjny wygląd
- Bezpieczne i łatwo dostępne miejsca do przechowywania ważnych przedmiotów osobistych
- Łatwa w obsłudze nawet dla użytkowników o ograniczonych możliwościach





▲ Combino jest dostępna w różnych wersjach.



▲ Wielofunkcyjna szyna, zapewnia wiele miejsca na akcesoria (w wersji standard).


Combino

Wszechstronna szafka przyłóżkowa

Combino łączy w sobie funkcje serwisowe nowoczesnej szafki przyłóżkowej z prostą obsługą. Charakteryzuje się solidną stabilnością i ponadczasowym stylem. Zaokrąglone profile narożne sprawiają, że jest wyjątkowo wygodna w obsłudze.

Combino jest dostępna z blatem bocznym lub bez. Przegroda lub szuflady w różnych rozmiarach, które można dowolnie wybierać i konfigurować, zapewniają niezbędną przestrzeń do przechowywania. Oznacza to, że wszystkie rzeczy, których użytkownicy potrzebują na co dzień, są zawsze w zasięgu ręki. Istnieje możliwość wbudowania lodówki w dolnej części szafki.

Praktyczne szczegóły Combino składają się na większą wygodę w codziennym użytkowaniu. Oprócz wysuwanej półki, dostępne są też tuleje adaptera do telefonu. Lampka do czytania zapewnia dobrą orientację w nocy. Wielofunkcyjna szyna, montowana w standardzie, oferuje miejsce na akcesoria lub może służyć jako wieszak na ręczniki.

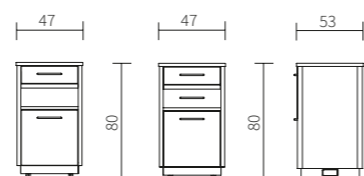

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ Dwie wersje

- Standard: jedna komora w środku oraz duża szuflada na dole
- Opcja: dwie normalne szuflady u góry i jedna duża szuflada na dole



▲ Blat boczny Combino, gdy jest schowany, nie zajmuje prawie żadnej dodatkowej przestrzeni.



▲ Blat boczny posiada nóżkę, która umożliwia jego odpięcie lub przymocowanie do szafki Combino.




Blat boczny

Elastyczne zastosowanie Combino

Stabilny i elastyczny blat boczny Combino zapewnia szczególnie komfort użytkowania. Można go łatwo przymocować i odłączyć po obu stronach szafki. Oznacza to, że Combino można umieścić po lewej lub prawej stronie łóżka do opieki długoterminowej, co sprawia, że pasuje do wszystkich znajdujących się w pomieszczeniu mebli i układu pomieszczeń.

Obrotowy blat boczny zapewnia bezpieczne miejsce do umieszczenia kubków i talerzy oraz wszelkich przedmiotów osobistych. Idealny jako stolik do czytania.

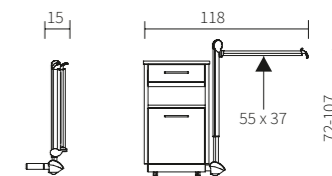




▲ Błat boczny Estrado może być schowany w korpus szafki w celu zaoszczędzenia przestrzeni.



▲ Górny blat szafki Estrado jest wyjątkowo przestronny.



▲ Uchylny blat boczny może służyć jako podpórka pod książki.

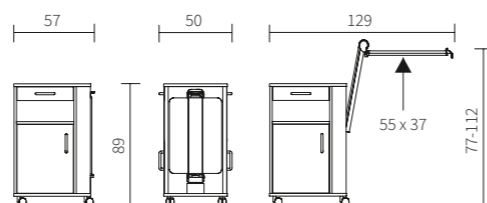

Estrado

Uniwersalna szafka przyłóżkowa

Estrado to wygodna szafka przyłóżkowa wyposażona w dodatkową cechę konstrukcyjną jaką jest oszczędność miejsca: w stanie złożonym - blat boczny jest w pełni zintegrowany z korpusem szafki. Zwiększa on

górną powierzchnię szafki Estrado, ponieważ oferuje wiele użytecznej przestrzeni. Szuflada i półka mogą być używane z obu stron, co sprawia, że szafka jest bardzo elastyczna w codziennym użytkowaniu.




▲ Górne i narożne profile szafki Alcamo są zaokrąglone, aby nadać im domowy wygląd.



▲ Szafka przyłóżkowa Alcamo jest dostępna z obu stron.



▲ Błat boczny z regulacją wysokości można łatwo przechylić.

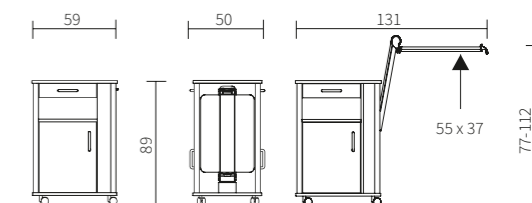

Alcamo

Przytulna szafka przyłóżkowa

Alcamo łączy wygodną wszechstronność Estrado z ciepłą domową atmosferą: jej górne i narożne profile są zaokrąglone co tworzy wyjątkowo ciepłą aurę. Pojemna szafka, półka i szuflada szafki przyłóżkowej o wysokości 89 cm tworzą bardzo pojemną przestrzeń,


aby przedmioty codziennego użytku były zawsze łatwo dostępne z obu stron. Błat boczny Alcamo można bezstopniowo i łatwo dostosować do pożądanej wysokości za pomocą sprężyny gazowej.



▲ Łatwa obsługa blatu bocznego w szafce przyłóżkowej Conturo.



▲ Błat boczny zwiększa ilość dostępnej powierzchni.

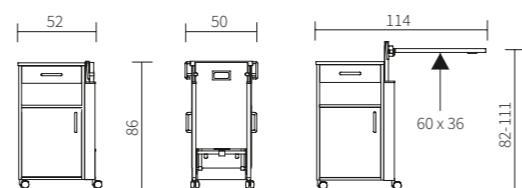

Conturo

Solidna szafka przyłóżkowa

Dzięki solidnej konstrukcji i dużej elastyczności Conturo jest wystarczająco mocna, aby z łatwością sprostać wszystkim wymaganiom codziennej pielęgnacji. Oferuje wiele dodatkowych praktycznych zalet: wszystkie szuflady i półka są dostępne z obu stron. Jeśli szafkę przyłóżkową trzeba przenieść z jednej części pokoju do drugiego, można ją łatwo manewrować dzięki kołom obracającym się o 360°.

Mechaniczna regulacja wysokości blatu bocznego jest bardzo wytrzymała i łatwa w obsłudze. Błat boczny można pochylić pod wygodnym kątem w zależności od potrzeb użytkownika.

Na życzenie Conturo można wyposażyć we wbudowaną lodówkę – to idealne miejsce do przechowywania jedzenia zwłaszcza w upalny dzień.



▲ Dzięki doskonałej manewrowości, stolik Pleto jest niezwykle wszechstronny w codziennej opiece.

Pleto

Stylowy towarzysz

Stolik Pleto charakteryzuje się wszechstronnym zastosowaniem w codziennym życiu pacjentów, a dzięki doskonałej zwrotności może być używany w dowolnym miejscu. Przede wszystkim służy jako stolik przyłóżkowy: w zależności od potrzeb można dostawić go do łóżka, krzesła albo fotela. Solidna rama w kształcie litery C gwarantuje wysoką stabilność i wytrzymałość. Wysokość Pleto można regulować w zakresie od 69 do 104 cm za pomocą sprężyny gazowej. Umożliwia to elastyczne dostosowanie go do różnych potrzeb i wykorzystanie np. jako blatu do spożywania posiłków albo podpórki do czytania. Ruchomą część blatu stolika można

przechylać w płaszczyźnie poziomej, a mniejsza część zawsze pozostaje nieruchoma, zapewniając praktyczną powierzchnię do odkładania przedmiotów. Dzięki temu pacjenci mogą na przykład odstawić napój w trakcie czytania.


Wysokość stolika Pleto jest regulowana automatycznie podczas podnoszenia łóżka, ponieważ regulacja w górę jest możliwa bez konieczności użycia dźwigni. Jest to skuteczne zabezpieczenie przed kolizją stolika z łóżkiem.



▲ Stolik Pleto jest dostępny z jednoczęściowym poziomym blatem.



▲ Błat dzielony, gdzie większa część może być przechylana, jest dostępny jako opcja.

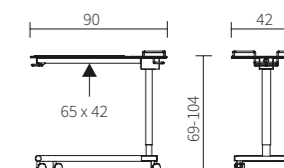



▲ Łatwa i szybka obsługa blatu bocznego Quado.



▲ Podwozie jest łatwe w czyszczeniu, a także zapewnia doskonałą stabilność szafki.



▲ Opcjonalna dodatkowa komora z boku nadaje się do przechowywania gazet i innych rzeczy osobistych.


▲ Quado można bez wysiłku dopasować do żądanej wysokości, od 85 do 115 cm za pomocą sprężyny gazowej.

Quado

Mobilny towarzysz

Quado to szafka przyłóżkowa o wielu cechach zapewniających komfort. Jej szuflada i dwie pojemne półki są dostępne z obu stron i oferują dużo miejsca do przechowywania rzeczy osobistych. Dzięki regulowanej wysokości korpusu i rozkładanemu blatowi bocznemu jest idealna do spożywania posiłków w łóżku. Dzięki doskonałej zwrotności i lekkiej konstrukcji idealnie nadaje się do użycia jako wózek do przewożenia lekarstw lub środków pielęgnacyjnych z pokoju do pokoju. Quado zapewnia optymalną higienę. Dostosowane jest do automatycznej dezynfekcji, jak również do szybkiego i dokładnego czyszczenia ręcznego.

Aby zaoszczędzić miejsce w czasie przechowywania albo transportu, szafki przyłóżkowe Quado mogą być łączone.

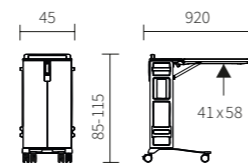

Uchwyty



184361
Zakrzywiony uchwyt łukowy | chrom



186024
Zakrzywiony uchwyt łukowy | mat



194259
Uchwyt barowy | matt



175984
Uchwyt łukowy | chrom



194258
Uchwyt łukowy | mat



151279
Uchwyt łukowy, kwadratowy | mat











306692
Uchwyt łukowy, zaokrąglony | mat

NOWOŚĆ

Dekory

Oferujemy specjalny wybór kolorów i wzorów, dzięki czemu możesz dostosować projekt szafki przyłóżkowej do własnych wymagań i dopasować ją do istniejących mebli. Chętnie doradzimy i zaplanujemy z Tobą meble do Twojej placówki.

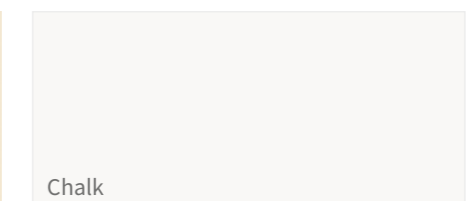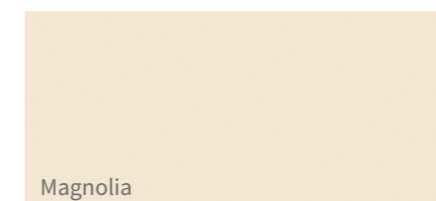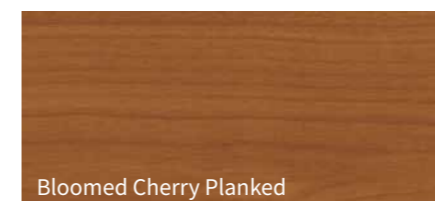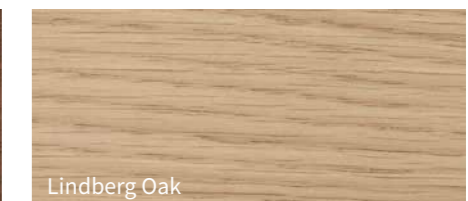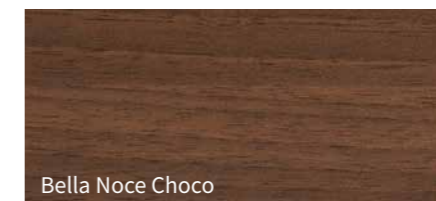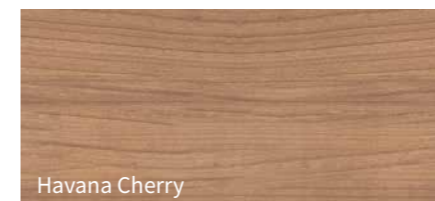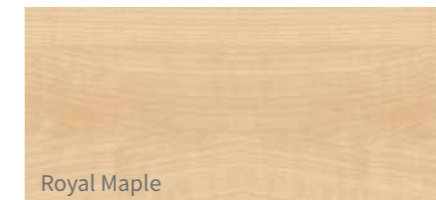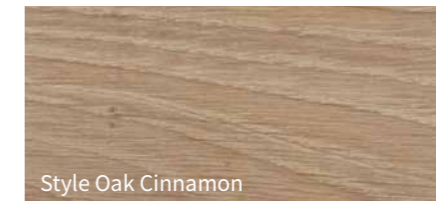



▲ Dodatkowa komora z boku szafki jest odpowiednia do przechowywania czasopism i innych rzeczy osobistych.



▲ Uchwyt na napoje zapewnia porządek na szafce.



▲ Haczyk na ręcznik ułatwia wygodne funkcjonowanie.



▲ Możliwość dołączenia kosza na śmieci do szyny wielofunkcyjnej.



▲ Dostępny jest zamek do opcjonalnego zamykania szuflady na klucz.



▲ Klips USB, który zatrzaskuje się na szynie szafki przyłóżkowej zapewnia zasilanie smartfona, tabletu itp.

Akcesoria

Codzienny komfort użytkownika

Obok łóżka najważniejszym meblem w pokoju opieki jest szafka przyłóżkowa. Aby zapewnić najbardziej indywidualne i możliwie elastyczne rozwiązanie, Stieglmeyer oferuje duży wybór dostępnych akcesoriów o wielu niezbędnych funkcjach.

Lodówka do zabudowy to bezpieczne miejsce do przechowywania napojów i jedzenia w upalne dni. Można ją łatwo zintegrować z wieloma modelami szafek przyłóżkowych.

Szyna wzdłuż blatu górnej szafki przyłóżkowej wykonana jest z aluminium. Może służyć do zamocowania praktycznego wieszaka na ręczniki lub uchwytu na butelkę czy szklankę. Szyna szafki może być również wyposażona w klips USB z przedłużaczem, w celu podłączenia do gniazdka elektrycznego.

Kosz na śmieci z pokrywą i pojemnością około pięciu litrów wystarczy zawiesić na wielofunkcyjnej szynie szafki. Jest wykonany z łatwego do czyszczenia tworzywa sztucznego. Dodatkowa komora z boku szafki zapewnia miejsce na gazety i książki.

Zmienne wkłady do szuflad pomagają utrzymać porządek i zapobiec uszkodzeniu szuflad. Jeśli użytkownik chce zachować rzeczy osobiste w szafce przyłóżkowej, dostępna jest dla większego bezpieczeństwa szuflada zamykana na klucz.

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Grupa Stieglmeyer jest światowym producentem łóżek medycznych dla szpitali, domów opieki i opieki domowej. Dzięki nowoczesnym szafkom przyłóżkowym, meblom i cyfrowym systemom wsparcia jest również dostawcą kompleksowych rozwiązań. Rodzinna firma z powodzeniem rozwija oferty na rynki międzynarodowe w ponad 100 krajach.

Nasze mocne strony:

- rozwój produktu w naszej centrali Herford w Niemczech – produkcja w czterech nowoczesnych fabrykach w Niemczech i Polsce,
- jedna fabryka w Chinach na rynek chiński,
- filie i partnerzy handlowi w wielu krajach,
- najwyższej klasy serwis z niezawodnym zaopatrzeniem w części zamienne,
- szkolenia i optymalizacja procesów dla naszych klientów,
- zrównoważone działanie z silnym zaangażowaniem społecznym.

1.000 PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE	11 LOKALIZACJI w Niemczech, Polsce, Holandii, Belgii, Francji, Finlandii, RPA i Chinach	OFERTY dostosowane do wszystkich RYNKÓW
PONAD 100.000 produkowanych łóżek rocznie	Międzynarodowe CERTYFIKATY	
DO 15 LAT dostępności części zamiennych	DYSTRYBUCJA do ponad 100 krajów	NIEMIECKI PROJEKT INŻYNIERYJNY

Nasze specjalizacje

- Szpital
- Domy opieki
- Opieka domowa
- Komfortowe łóżka
- Meble funkcyjne
- Serwis

Nasze wartości


- Doświadczenie
- Człowieczeństwo
- Niezawodność
- Dążenie do celu
- Otwartość
- Poczucie własnej wartości

Nasze marki



Wyposażenie i opcje

Model	Aparto	Aparto brevo
Ogólne		
Szafka przyłóżkowa dostępna z obu stron* ¹	O	O
Koła z indywidualną blokadą	✓	✓
Regulowana wysokość i wysuwany blat boczny	O	O
Podział korpusu szafki (od góry do dołu)		
A Dwie szuflady	-	✓
B Szuflada na górze z otwartą półką środkową i dużą szufladą na dole	✓	-
C Otwarta półka u góry z szufladą pośrodku i dużą szufladą u dołu	O	-
D Szuflada dostępna z obu stron z otwartą półką środkową i dużą szufladą * ¹	O	-
E Warianty korpusów szafek z wysuwaniem blatem i zaokrąglonym blatem górnym * ²	O* ²	O* ²
Warianty blatów bocznych		
Zintegrowany, wysuwany, nieuchylny blat boczny	O	O
- Maks. obciążenie blatu bocznego, w kg:	20	20
Blat boczny Somero z odchylanym blatem	O	-
- Maks. obciążenie blatu bocznego, w kg:	15	15
Funkcje		
Szuflada z mechanizmem cichego domykania	O	O
Plastikowa wkładka do szuflady	O	O
Blokada szuflady	O	O
Wielofunkcyjna szyna z uchwytem na lampkę do czytania	O	O
Szyna	O* ⁴	O* ⁴
Haczyk, uchwyt na ręcznik* ⁵	O* ⁴	O* ⁴
Uchwyt na butelkę lub szklankę* ⁵	O	O
Akcesoria		
Komora na dokumenty* ³	O	O
Kosz na śmieci z pokrywą * ³	O	O
Uchwyt na butelkę lub szklankę * ⁵	O* ⁴	O* ⁴
Uchwyt na butelkę w szufladzie	O	O
Listwa z wieloma gniazdami	O	O
Zatraskowy przedłużacz USB * ⁵	O* ⁴	O* ⁴

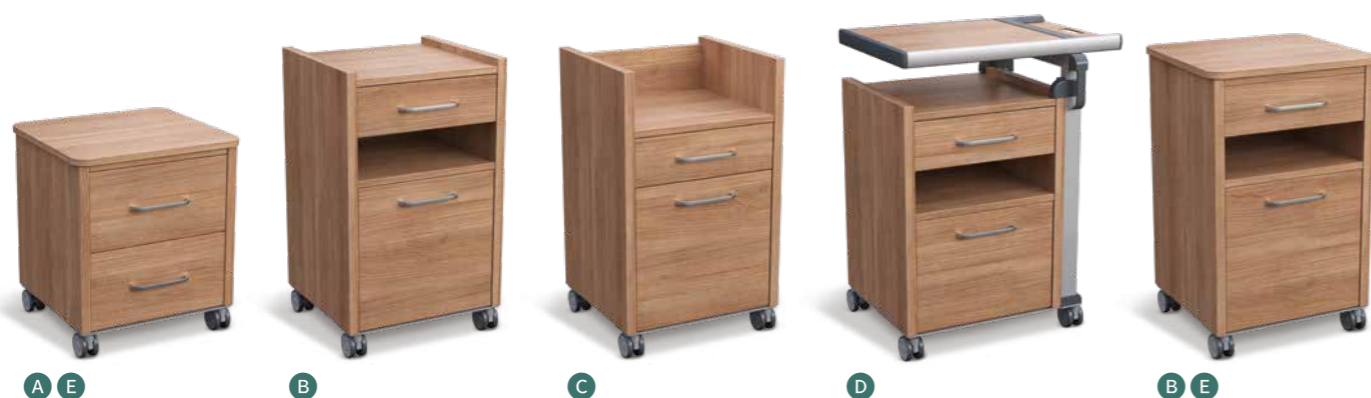

✓ = Standard
O = Opcja
- = Niedostępne

*¹ tylko w połączeniu ze zintegrowanym blatem bocznym / brak możliwości zaokrąglenia blatu lub blatu wysuwanego
*² możliwe tylko dla wariantów wolnostojących (bez zintegrowanego blatu bocznego)
*³ tylko w połączeniu z szyną wielofunkcyjną
*⁴ możliwe tylko w połączeniu z zaokrąglonym blatem i wysuwaniem blatem
*⁵ tylko w połączeniu z szyną

Model	Combino	Estrado	Alcamo	Conturo
Ogólne				
Szafka przyłóżkowa dostępna z obu stron* ¹	O	✓	✓	✓
Koła z indywidualnym hamulcem	-	✓	✓	✓
Koło niehamowane	✓	-	-	-
Blat boczny	O	✓	✓	✓
Lodówka	O	O	O	O
Podział korpusu szafki (od góry do dołu)				
Szuflada dostępna z obu stron z otwartą półką środkową i drzwiami po obu stronach	-	✓	✓	✓
Szuflada na górze z otwartą półką środkową i dużą szufladą na dole	✓	-	-	-
Dwie szuflady i jedna duża szuflada na dole	O	-	-	-
Górna szuflada z lodówką (30l) * ²	O	O	O	O
Warianty korpusów szafek z wysuwaniem blatem i zaokrąglonym blatem górnym * ²	✓	-	-	-
Warianty blatów bocznych				
Zintegrowany uchylny blat boczny Conturo	-	-	-	✓
Zintegrowany uchylny stolik nadłóżkowy Estrado/Alcamo	-	✓	✓	-
Blat boczny Combino z możliwością adaptacji i odchylania	O	-	-	-
Maks. obciążenie blatu bocznego, w kg	15	15	15	15
Funkcje				
Szuflada z mechanizmem cichego domykania	O	-	-	-
Plastikowa wkładka do szuflady	O	O	O	O
Blokada szuflady	O	O	O	O
Wielofunkcyjna szyna z uchwytem na lampkę do czytania	✓	O	-	-
Szyna	O	O	O	O
Haczyk, uchwyt na ręcznik * ⁵	O	O	O	O
Uchwyt na butelkę do szyny * ⁵	O	O	O	O
Akcesoria				
Komora na dokumenty* ³	O	O	-	O
Kosz na śmieci z pokrywą * ³	O	O	-	O
Uchwyt na butelkę lub szklankę * ⁵	O	O	O	O
Uchwyt na butelkę w szufladzie	O	-	-	-
Zatraskowy przedłużacz USB * ⁵	O	O	O	O

✓ = Standard
O = Opcja
- = Niedostępne

*¹ tylko w połączeniu ze zintegrowanym blatem bocznym / brak możliwości zaokrąglenia blatu lub blatu wysuwanego
*² możliwe tylko dla wariantów wolnostojących (bez zintegrowanego blatu bocznego)
*³ tylko w połączeniu z szyną wielofunkcyjną
*⁴ możliwe tylko w połączeniu z zaokrąglonym blatem i wysuwaniem blatem
*⁵ tylko w połączeniu z szyną



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siedziba główna / Headquarters

Niemcy / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siedziba główna / Headquarters

Niemcy / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com

Na zdjęciach: Szafki przyłóżkowe – domowy komfort i wsparcie

Podmiot prowadzący: Stieglmeyer Sp. z o.o.

Producent: Stieglmeyer GmbH & Co. KG